

Revideret udløbsdato for Stratus® CS Acute Care™ NT- proBNP TestPak reagens (CPBNPM) Lot 211214002, 211227002, 211283002, 211297002, 211339002, 212003002 og 212023002

Vores optegnelser viser, at Jeres laboratorium anvender Stratus® CS Acute Care™ NT-ProBNP (CPBNPM) metoden på Stratus® CS Analysesystem. Siemens Healthcare Diagnostics har indledt en intern undersøgelse af kalibreringsfejl som følge af slope errors, der ikke løses ved rutinemæssigt vedligehold.

En lav frekvens af slope errors er blevet bekræftet for visse Stratus® CS TestPak reagenslotnumre, når de nærmer sig udløbsdatoen.

Dette vil ikke påvirke patientresultater, så længe en kalibrering er indenfor specifikationerne og accepteres af instrumentet. En fejlet kalibrering vil forhindre, at resultater bliver rapporteret, da det ikke vil være muligt at analysere patientprøver.

For produkt lotnumre angivet i nedenstående tabel, gør venligst følgende:

1. Notér den **reviderede udløbsdato** nedenfor og brug denne dato til at afgøre, hvornår det aktuelle lot ikke længere skal bruges.
2. Når den reviderede udløbsdato nås, bortskaffes dette lot.

Bemærk: Læg nøje mærke til den reviderede udløbsdato, da Stratus® CS ikke vil meddele, at lottet er udløbet. Brugeren skal sikre sig, at produktet ikke anvendes efter den reviderede udløbsdato, som angivet i nedenstående tabel.

NT-ProBNP (CPBNPM) Lot	Printet udløbsdato	Revideret udløbsdato
211214002	04/28/2012	03/28/2012
211227002	05/11/2012	04/11/2012
211283002	07/06/2012	06/06/2012
211297002	07/20/2012	06/20/2012
211339002	08/31/2012	07/31/2012
212003002	09/29/2012	08/29/2012
212023002	10/19/2012	09/19/2012

Lotnumre, der ikke er angivet i denne tabel, kan anvendes indtil udløbsdatoen angivet på produktmærkaten

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte en af vore produktspecialister.

Vi undskylder for ulejligheden og takker for samarbejdet og din fortsatte støtte afprodukter fra Siemens Healthcare Diagnostics.