
Siemens Audiologische Technik GmbH

P.O. Box 32 80
D-91050 Erlangen
Tyskland

Til vore forretningspartnere og klienter

Internet <http://www.hearing.siemens.com>

Vor ref. 12-SAT-0212
Dato August 2012

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Adapter med europæisk stik til strømforsyning til opladere til genopladelige høreapparater Hensigt med denne skrivelse: Information og udskiftning

Kære,

Dette brev skal oplyse dig om en mulig defekt og den resulterede fare ved brugen af adapteren med europæisk stik til strømforsyningen til opladere til genopladelige høreapparater.

Identifikation af de påvirkede medicinske produkter:

Adaptre med europæisk stik til strømforsyning til opladere til genopladelige høreapparater har følgende modelnavne:

Model GT-41076-0605

Model GTM41076-0605

Problembeskrivelse:

Når adapteren med europæisk stik til strømforsyning til opladere til genopladelige høreapparater trækkes ud af stikkontakten, kan stikkets kontaktflader rive sig løs fra stikket og blive siddende i stikkontakten. Denne fejl skyldes utilstrækkelig ultralydning af adapteren med europæisk stik.



Siemens Audiologische Technik GmbH
Management: Guenther Pausch, Robin Christoph Hees

Postadresse:
Siemens Audiologische Technik
GmbH
P.O. Box 32 80
D-91050 Erlangen

Kontoradresse:
Gebbertstraße 125
91058 Erlangen
Tlf.: +49 9131 308-0

GmbH, Registreret kontor: Erlangen; Forretningsmæssig registrering: Fürth, HRB 3825; General Manager: Guenther Pausch, Robin Christoph Hees; WEEE-Reg.-Nr. DE 30144051

Hvad skal du foretage dig?

For at fastslå, om den strømforsyning, du bruger, er påvirket, bedes du sammenligne strømforsyningen med billederne senere i dette brev.

Hvis du bruger en af de viste strømforsyninger:

- Vær opmærksom på nedenstående advarsel og
- kontakt din hørespecialist for at få eftersat strømforsyningen med adapteren med europæisk stik indenfor to uger efter du har modtaget denne information.



Risiko for elektrisk stød fra beskadigede enheder

Hvis stikkets kontaktflader går løs fra strømforsyningen og bliver siddende i stikkontakten:

1. Pas på ikke at røre ved kontaktfladerne, der sidder i stikkontakten!
2. Sluk for stikkontakten og tag de løsrevne kontaktflader fra stikket ud.
Du må ikke røre ved nogen metaldele, mens du tager dem ud!
Hvis du er usikker, skal du bede en elektriker om hjælp.
3. Medbring den beskadigede strømforsyning til hørespecialisten.

Videreformidling af disse oplysninger

Du bedes sikre, at alle brugere i din organisation af de førnævnte produkter samt andre personer, som skal have besked, gøres bekendt med disse "Vigtige sikkerhedsoplysninger". Hvis du har videregivet produkterne til tredjepart, bedes du videresende en kopi af disse informationer eller give besked til kontaktpersonen, der er angivet i brevhovedet.

Opbevar denne information i hvert fald til de her beskrevne handlinger er foretaget.

De relevante nationale myndigheder har modtaget en kopi af disse "Vigtige sikkerhedsoplysninger".

Kontaktperson:

For kontaktpersonen med ansvar for dit land henvises til den vedlagte tabel.

Venlig hilsen,

Günther Pausch
Administrerende Direktør

Udo Falkner
Sikkerhedschef

Vedlagt

Vedlagt: Identifikation



Vedlagt: **Kontaktpersoner**

Land (område)	Navn på kontaktperson for landet	Kontaktperson - e-mail	Telefon
Belgien	Pol Coulonval	pc@veranneman-audio.be	0032 25126737
Bolivia	Martin Poma	audimed.poma@gmail.com	00591 222 44548
Cypern	Thalia Kounounis	akoun@cytanet.com.cy	00357 25570266
Danmark	Anette Mortensen	anette.mortensen@siemens.com	0045 63154003
De Forenede Arabiske Emirater	Marwan Asad	marwan@barakatoptical.ae	00971 4 3954008
Egypten	Hany Samir	hsamir@minapharm.com	0020 224143170
Estland	Liina Luth	liina.luht@audiomed.ee	00372 50 92066
Filippinerne	Benoit Caudreliez	benoit.caudreliez@siemens.com	0065 6370 9542
Finland	Juha Hakala	juha.hakala@kuulotekniikka.com	00358 207 290503
Frankrig	Cecile Paillard	cecile.paillard@siemens.com	0033 1 49 33 75 29
Færøerne	Anette Mortensen	anette.mortensen@siemens.com	0045 63154003
Grækenland	Adria Stamou	Asd-siemens@hol.gr	0030 2103800949
Holland	Jordan Klaassen	jordan.klaassen@siemens.com	0031 70 333 2426
Indien	Taranbir Singh Kochar	taranbirsingh.kochar@siemens.com	0091 80 28410781
Island	Anette Mortensen	anette.mortensen@siemens.com	0045 63154003
Israel	Tali Bar Moshe	tali.bm1@gmail.com	00972 37931931
Italien	Daniele Misirliyan	daniele.misirliyan@siemens.com	0039 02 57472593
Kasakhstan	Eurolux System	euroluxsystema@mail.ru	007 727 2616244
Kina	Jun Zhang	jun.zhang1@siemens.com	0086 512 67613201
Kuwait	Rolf Habig	RolfHabig@intoptic.com	00965 25722980
Libanon	Afif Yamout	info@yamouthearing.com	00961 1 662360
Luxembourg	Cecile Paillard	cecile.paillard@siemens.com	0033 1 49 33 75 29
Marokko	Cecile Paillard	cecile.paillard@siemens.com	0033 1 49 33 75 29
Namibia	Marlene Joseph	marlene.joseph@siemens.com	0027 113995940
Norge	Ole Petter Nystroem	ole-petter.nystroem@siemens.com	0047 92405836
Oman	Vikrant Malik	vikrantmalik2000@gmail.com	00968 97317470

Land (område)	Navn på kontaktperson for landet	Kontaktperson - e-mail	Telefon
Pakistan	Benoit Caudreliet	benoit.caudreliet@siemens.com	0065 6370 9542
Polen	Małgorzata Wesolowska	malgorzata.wesolowska@siemens.com	0048 616536875
Portugal	Björn Kettler	bjoern.kettler@siemens.com	0049 9131 308 3223
Rumænien	Florin Purghele	office@pecef.ro	0040 244 594815
Rusland	Yuliana Mikaelyan	yuliana.mikaelyan@siemens.com	007 495 7371853
Saudi Arabien	Dr. Sami Barakat	info@albarakatgroup.com	009661 4722677
Schweiz	Daniel Wyler	daniel.wyler@siemens.com	0041 44 711 7472
Slovakiet	Igor Vantech	igorvantech@centrum.sk	0042 15 56223886
Spanien	Francesc Carreno	fcarrero@gaes.es	0034 933005800
Sverige	Anette Mortensen	anette.mortensen@siemens.com	0045 63154003
Sydafrika	Marlene Joseph	marlene.joseph@siemens.com	0027 113995940
Sydkorea	YoungJin Kim	youngjin.kim@siemens.com	0082 2 3450 7175
Thailand	Benoit Caudreliet	benoit.caudreliet@siemens.com	0065 6370 9542
Tjekkiet	Petr Vanek	petr.vanek@siemens.com	0042 0257 328 161
Tunesien	Mahmoud Kamon	kam.mahmoud@gnet.tn	00216 2 232 2230
Tyskland	Wolfgang Bergner	cs.sat.healthcare@siemens.com	0049 9131 308 33 33
Ukraine	Smila-Audio	lylo_a@ukr.net	00380 95 2834004
Ungarn	Xénia Borda	xenia.borda@siemens.com	0036 1 302 0631
Uruguay	Carlos Lopez	secretaria@audical.com.uy	00598 2401 8196
Vietnam	Benoit Caudreliet	benoit.caudreliet@siemens.com	0065 6370 9542
Zambia	Marlene Joseph	marlene.joseph@siemens.com	0027 113995940
Østrig	Daniel Reißer	daniel.reisse@siemens.com	0049 9131 308 3236