
Vigtig feltsikkerhedsmeddelelse

Emne: Affinity™ Four seng – Opgradering af bremse

FSCA-identifikator: Modifikation 471

Handlingstype: Modifikation af enhed

Dato: 02.04.12

Til: Administrerende direktør
Facilitetens administrator
Facilitetens tekniker
Sikkerhedsleder
Biomedicinsk udviklingsafdeling
Kontaktperson for medicinsk udstyr

Berørte enheder:

Modeller: Affinity™ Four fødselsseng (P3700B/C/D)

Række af berørte serienumre: H331AA4785 til N081AA7966

Fremstillingsdato: før den 21. marts 2012

Årsag:

Hill-Rom er blevet klar over, at der ved nogle af vores Affinity™ Four fødselssenge, der er fremstillet mellem de ovenstående datoer, kan opstå problemer med bremserne. Dette kan medføre utilsigtet bevægelse.

Foranstaltninger, der skal træffes:

Vi har udviklet et forbedret bremsesystem for disse senge, og vi vil komme til din facilitet for at modificere dine berørte senge.

Indtil vi besøger din facilitet, beder vi dig om at gøre følgende:

- Lokaliser de berørte senge, der er opført på listen i denne meddelelse.
- Afprøv bremserne:
 - Når du har indstillet bremserne, skal du skubbe og trække i sengen fra modsatte hjørner for at sikre, at bremserne holder.
 - Når du slipper bremserne, skal du sørge for, at bremsehåndtaget enten er i plan (neutral) eller transport-position, samt at sengen nemt ruller.
- Hvis du stadig ikke kan få bremserne til at holde eller fungere normalt, skal du tage sengen ud af drift, indtil vi kan udføre modifikationen.
- For at sikre at bremserne fungerer, som de er tiltænkt, skal du udføre den årlige forebyggende vedligeholdelse (FV) af dine Affinity™ senge, der står beskrevet i servicemanualen. Et **regelmæssigt FV-program er meget vigtigt** for at sikre den korrekte drift af dine Hill-Rom senge.



Videregivelse af denne feltsikkerhedsmeddelelse:

Sørg for at videregive en kopi af denne skrivelse til alt andet facilitetspersonale, som du anser for relevante i den sammenhæng.

Kontaktperson:

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende denne anmodning eller de anførte procedurer, skal du kontakte Hill-Roms afdeling for teknisk support ved hjælp af den medfølgende liste for dit geografiske område.

Med venlig hilsen

Hill-Rom Technical Support