



## VIGTIG PRODUKTINFORMATION

GE Healthcare

Healthcare Systems  
9900 Innovation Drive  
Wauwatosa, WI 53226  
USA

2012-01-18

GE Healthcare Ref: FMI 40837

Til: Chefer for nuklear afdeling  
Hospitalsadministratorer/Risikoansvarlige  
Chefer for radiologi/kardiologi  
Chef for Medicoteknisk afdeling

Vedrørende: **Problem med udløsning af pal på kollimatorvogn og blylåg på Discovery NM/CT 670 og/eller Discovery NM 630**

GE Healthcare er for nylig blevet opmærksom på et potentielt problem i forbindelse med kollimatorvognen og blylåget på dit Discovery NM/CT 670- og/eller Discovery NM 630-system, som kan bringe operatørens sikkerhed i fare. **Sørg venligst for, at alle potentielle brugere og service personale i institutionen bliver gjort bekendt med denne sikkerhedsmeddelelse og de anbefalede handlinger.**

### Sikkerhedsproblemer

1. Udløsning af låsepal på vognen og frigørelse af vognen kan medføre, at kollimatoren falder ned, og at operatøren og serviceteknikere dermed kommer til skade.
2. Et andet problem er, at separation af håndtaget på blylåget kan medføre, at pladen svinger ud, hvorved serviceteknikere potentielt kan komme til skade.

### Sikkerhedsanvisninger

1. Fortsæt brugen, men hold øje med kollimatorvognen under kollimatorudveksling og sørg for, at den er låst rigtigt fast. Vær opmærksom på enhver uventet bevægelse af vognen under udvekslingsproceduren. Stop processen øjeblikkeligt, hvis vognen har flyttet sig fra docking-stedet. Dock vognen på plads igen og færdiggør udvekslingen.
2. Hvis en ekstern servicetekniker servicerer Deres system (og ikke GE-medarbejdere), skal De informere teknikeren om, at hvis detektorens interne blylåg skal løftes, skal dette udføres med brug af begge håndtag. Forsøg aldrig at løfte blypladen med kun ét håndtag.

### Oplysninger om de påvirkede produkter

GE Healthcare Discovery NM/CT 670 og/eller Discovery NM 630, alle konfigurationer.

### Produktrettelse

En repræsentant fra GE Healthcare Service vil udføre den nødvendige hardwareopdatering på samtlige berørte systemer. Udbedringen sker uden omkostninger for Dem.

### Kontaktoplysninger

Såfremt I har spørgsmål til denne vigtige produktinformation eller identifikation af berørt udstyr bedes I kontakte jeres lokale GE Healthcare service- eller salgsrepræsentant. I kan også kontakte vores Servicecenter på: **80 40 49 44**.

GE Healthcare bekræfter at Lægemiddelstyrelsen har modtaget denne meddelelse.

Vi garanterer, at vi prioriterer opretholdelse af et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau meget højt. Hvis I har spørgsmål, bedes I straks kontakte os.

Mange tak.

James Dennison  
Vice President QARA  
GE Healthcare Systems

William Denman, M.D., FRCA  
Chief Medical Officer  
GE Healthcare