

## Urinstix-kontrol

### Temperatur påvirkning af CLINITEK Chek-Stix positiv urinstix-kontrolopløsning

Vores statistik viser, at du har modtaget en eller flere af Siemens urinstix-kontroller, Chek-stix Combo Pak.

Produkt navn	Katalog nr.	Siemens Matriale nr.	Lot nr.	Æske nr.
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C9093061C	P9093061C
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C9094081J	P9094081J
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0096091F	P0100101D
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0097091E	P0097091E
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0098101F	P9101022E
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0099091D	P0099091D
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0100101E	P0100101E
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0102012B	P9101022H
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0102012D	P9101022J
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0103042B	P0103042B
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0103042G	P0103042G
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C0106062D	P0106062D
Chek-Stix Combo Pak	1364	10310483	C9105052C	P9105052C
Chek-Stix Combo Pak	1364M	10316287	C0099091B	P0099091B
Chek-Stix Combo Pak	1364M	10316287	C0100101G	P0100101G
Chek-Stix Combo Pak	1364M	10316287	C0103042E	P0103042E
Chek-Stix Combo Pak	1364N	10318290	C0099091A	P0099091A
Chek-Stix Combo Pak	1364N	10318290	C0100101H	P0100101H
Chek-Stix Combo Pak	1364N	10318290	C0103042C	P0103042C
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0099091C	P0099091C

### Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

511 Benedict Ave.  
Tarrytown, NY 10591

914-631-8000  
[www.siemens.com/diagnostics](http://www.siemens.com/diagnostics)

Page 1 of 2

<b>Produkt navn</b>	<b>Katalog nr.</b>	<b>Siemens Matriale nr.</b>	<b>Lot nr.</b>	<b>Æske nr.</b>
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0100101F	P0100101F
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0102012C	P9101022I
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0103042D	P0103042D
Chek-Stix Combo Pak	1364E	10325654	C0106062E	P0106062E

Når kontrolmaterialet med disse lotnumre er opløst, kan den positive kontrol på leucocytresultatet blive negativ, hvis opløsningen er opbevaret i mere end 2 timer ved en temperatur over 25°C (77 F)

Du kan bruge den opløste positive kontrol i op til 8 timer, hvis opløsningen er opbevaret ved 25°C (77 F) eller lavere. Hvis temperaturen er højere end 25°C og lavere end 30°C (77 F og 86 F), kan opløsningen anvendes i op til 2 timer.

Denne information gælder ved brug af kontrolmateriale på alle Clinitek instrumenter, og når urinstixene aflæses visuelt.

Der er ingen sundhedsrisiko. Det er ikke nødvendigt at gennemgå eller gentage tidligere tests.

Vi undskylder for ulejligheden og takker for din tålmodighed, imens vi arbejder på at løse dette problem.