



VIGTIG PRODUKTINFORMATION

GE Healthcare

GE Healthcare IT
540 W. Northwest Hwy
Barrington, IL 60010
USA

GE Healthcare Ref: FMI 85258, 85259

12. oktober 2012

Til: Direktør/Ansvarshavende for radiologisk afdeling
Hospitalsadministrator
Chef for radiologisk afdeling
PACS-administrator
Direktøren for IT-afdelingen
Chef for Medicoteknisk afdeling

Vedrørende: **Potentielt billedtab i Centricity PACS' Centricity til Centricity (C2C) undersøgelsesoverførsler**

GE Healthcare er for nylig blevet opmærksom på et muligt sikkerhedsproblem på grund af et potentielt billedtab i forbindelse med Centricity til Centricity (C2C) undersøgelsesoverførselsmodulet i dit Centricity PACS-system. C2C-modulet giver to eller flere Centricity PACS-systemer mulighed for at sende undersøgelser til hinanden. Bemærk, at dette problem opstår, når undersøgelser sendes fra et Centricity PACS-system til et andet Centricity PACS-system via C2C-modulet.

Du bedes sikre, at alle potentielle brugere i din organisation gøres opmærksomme på denne sikkerhedsmeddelelse og de anbefalede handlinger.

Sikkerhedsproblem

Under C2C undersøgelsesoverførslen kan der ske et potentielt billedtab, mens billederne overføres fra kilde- til destinationsserveren. Når en anden proces i destinationsserveren forsøger at få adgang til samme objekt eller leje, kan overførselsprocessen af et bestemt billede blive afbrudt. Når overførslen afbrydes, skipper overførselsservicen det billede, der sendes og fortsætter med at sende det næste billede i undersøgelsen. Tabet af et billede kan føre til forkert diagnose.

Sikkerhedsanvisninger

Brugerne bemærker muligvis ikke, at der mangler et billede, da billedet blev skippet under overførslen. Det er muligt at verificere billedtællingen, når senderen meddeler antallet af de billeder, der skal sendes til modtageren, og få en bekræftelse herpå. Som et sikkerhedshensyn bør stederne foretage denne kommunikation for at bekræfte, at alle billeder er blevet overført, når undersøgelserne overføres i et C2C-miljø.

Oplysninger om de påvirkede produkter

Centricity PACS-versionerne 3.X og derover
Centricity PACS-versionerne 4.X og derover

Produktrettelse GE Healthcare vil sørge for et patch til 3.2.X- og 4.0-systemerne for at løse problemet.

**Kontakt-
oplysninger** Kontakt venligst din lokale GEHC-IT-servicerepræsentant, hvis du har spørgsmål til dette problem. Såfremt I har spørgsmål til denne vigtige produktinformation eller identifikation af berørt udstyr bedes I kontakte vores lokale distributør på: 80 40 49 44


GE Healthcare bekræfter at Lægemiddelstyrelsen har modtaget denne meddelelse.

Vi garanterer, at vi prioriterer opretholdelse af et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau meget højt. Hvis I har spørgsmål, bedes I straks kontakte os.

Mange tak.



Russell Roberson, Ph.D., P.E.
Vice President QARA
GE Healthcare IT

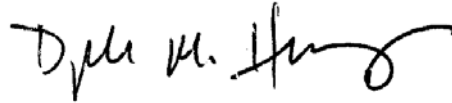

Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Chief Medical Officer
GE Healthcare