

**VIGTIG PRODUKT
INFORMATION**

03-Apr-2012

Kære kunde

Berørte produkter	HomeChoice slangesæt: R5C4455 4-grenet slangesæt til HomeChoice til UV-flash R5C4478 HomeChoice slangesæt, 8-grenet R5C4479 HomeChoice slangesæt, 4-grenet R5C4427 5-grenet fordelingsæt til system II (skruekoblinger)
Beskrivelse af problem	Baxter har opdaget en fejl i rækkefølgen på instruktionerne i brugsanvisningen til produkterne. I brugsanvisningen til Slangesæt til APD, første afsnit, punkt 1.3 instrueres brugeren i at fjerne beskyttelseshætten fra slangesættets patientslange inden tilslutning af dialyseposer. Brugeren skal ikke fjerne beskyttelseshætten fra slangesættets patientslange før tilslutning af dialyseposer. Beskyttelseshætten skal fjernes fra patientslangen efter priming og umiddelbart inden tilslutning af patientslangen til minisættet, som beskrevet i HomeChoice miniguide (se trin 6 "Tilslut dig selv og start behandlingen")
Risiko	Eksposering af patientslangen under klargøring kan føre til kontaminering og resultere i udvikling af peritonitis.
Hvad du skal gøre	<ol style="list-style-type: none">1. Der henvises til "HomeChoice miniguide" for korrekt procedure for tilslutning til patientslange (se trin 6 "Tilslut dig selv og start behandlingen").2. Vær opmærksom på, at du ikke bliver bedt om at returnere nogen produkter.3. Opbevar en kopi af dette brev, hvor disse slangesæt udleveres.4. Udfyld og returner den vedhæftede kundesvarformular til Baxter per fax eller e-mail.5. Hvis du forhandler eller distribuerer nogle af de berørte produkter til andre afdelinger, bedes du venligst informere dine kunder om denne meddelelse.
Tiltag planlagt af Baxter	Baxter er i gang med at opdatere brugsanvisningen med den korrekte rækkefølge af instruktionerne.

Baxter er et varemærke af Baxter International, INC

Yderligere information	Vi takker for dit samarbejde og beklager den ulejlighed dette medfører. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til undertegnede på tlf: 2075 5457. Lægemiddelstyrelsen er informeret om denne sag.
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med venlig hilsen,
Baxter A/S

Niels-Bo Jensen
Salgschef

**HomeChoice slangesæt
2012-007-RN
Kundesvarformular
Vigtig produktinformation, brev dateret 2. april 2012**

Udfyld og returner venligst denne formular per fax eller email som bekræftelse på, at du har modtaget denne information. En faxforside er ikke nødvendig.

Fax: 48166464

Email: lise_mosegaard@baxter.com

Sygehus navn og adresse:	
Hvis svar berører andre afdelinger, venligst noter afdelinger:	

Jeg har modtaget ovennævnte brev, udført de nødvendige tiltag og videregivet informationen efter behov.

SKAL UDFYLDES

Underskrift

Dato

Formular udfyldt af: (med blokbogstaver)	
Titel: (med blokbogstaver)	
Tlf:	