



Rubin Medical ApS
Postboks 227
0900 København C
Denmark

VIGTIG PATIENT INFORMATION

16.07. 2012

Vigtig information om din Animas® Insulin Pumpe

Kære Animas Pumper:

Vi er afhængige af dit input for kontinuerligt at kunne forbedre vores produkter. Baseret på din feedback, forbedrede vi levetiden for insulinpumpens tastatur, hvilket inkluderer Ok knappen, knapperne for Pil op / Pil ned, og kontrastknappen.

Vores foregående tastatur og alle andre komponenter i vores insulin pumper er designet og fremstillet til at modstå slid under normalt brug og normale forhold. Imidlertid, oplevede nogle patienter et gradvist slid på deres insulin pumpes tastatur der førte til skader, såsom slid og afskrælning fra kanterne af tastaturet fra pumpen.

Undersøg venligst din insulinpumpes tastatur for slid eller skader med regelmæssige mellemrum, som en del af din rutine proces med inspektion af din pumpe. Hvis dit tastatur er slidt eller beskadiget, reagerer knapperne måske ikke som tilsigtet. Hvis du ser nogen skader eller har problemer med dit tastatur, kontakt os. Animas undersøger omhyggeligt alle klager i relation til insulinpumpens tastatur. Hvis du har et bekræftet problem i relation til dit tastatur og du er dækket af Animas garanti, vil, Animas udskifte din pumpe uden omkostninger. Som forklaret i insulinpumpens brugerhåndbog. Animas yder garanti i en fire års periode fra købsdatoen i de fleste tilfælde.

Tak for at du valgte Animas som din partner i pumpeterapi.

Mvh

Rubin Medical ApS
Postboks 227
0900 København C
Denmark