



## **Vigtig sikkerhedsmeddelelse**

### **REA Azalea Base – Crashtest og kombination med andre sædesystemer**

Dato: 21. November 2012

**Invacare incident ref: TW 20767**

MHRA reference: 2011/012/020/081/001

MPA reference: 444:2012/69833

**Vigtig information:**

Rea Azalea Base leveres fra vores fabrik i Sverige uden sæde. Specielle sædesystemer monteres derefter på chassiset for at dække brugerens behov efter en nøje vurdering fra siddestillingsspecialister, terapeuter og andre resourcepersoner.

Invacare har crashtestet Rea Azalea Base, men mange af de tilgængelige sædesystemer er ikke blevet det, derfor beder vi dig foretage dig følgende:

- Læs afsnit 1.11 fra brugermanualen for Invacare Rea Azalea (udklip er på sidste side i dette brev). Komplet opdateret brugermanual kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)
- Se tabellen på side 2 om der eksisterer en kombinationserklæring på det sædesystem du har monteret på kørestolen.
- Hvis der **ikke** er en kombinationserklæring, skal du undersøge med leverandøren om sædesystemet er testet for transport i køretøjer
- For at stolen kan blive crashtestet skal der laves en risikovurdering vedr. sædesystemet og om det er sikkert at anvende kørestolen til transport i køretøjer. Risikovurderingen skal også omfatte stabilitet, vægtpåvirkninger af kørestolen osv. Hvis kørestolen efter denne risikovurdering anses for at være sikker at transportere, kan du bestille fastgøringsmærkater hos Invacare og montere dem passende steder på kørestolen (se brugermanualen). Mærkaterne har art. nr. 1563977
- Hvis du undlader at lave denne risikovurdering, er du forpligtet til at underrette kunder/brugere om, at stolen ikke må anvendes til transport i køretøjer
- **Du skal bekræfte du har læst denne skrivelse ved at returnere svar-blanket senest 15. januar 2012**



Venligst viderebring denne information til de relevante personer og vi vil gerne understrege at dette er yderst vigtigt for at nedbringe risikoen for ulykker med produktet.

Alle relevante myndigheder er informeret om denne skrivelse.

På medfølgende faktura-kopi kan du se brugeroplysninger, HMI-nr. og lignende som vi har registreret at have leveret til dig.

Skulle du have spørgsmål vedr. denne meddelelse, er du meget velkommen til at kontakte mig på 4072 3773 eller mail [pkreuz@invacare.com](mailto:pkreuz@invacare.com)

Med venlig hilsen  
**INVACARE A/S**

Per Kreuz  
*Kvalitetschef*

#### Liste over crashtestede sædesystemer iht 7176-19:2008

Producent	Sædesystem
Invacare	Flex 2 back / Flosshape cushion
Invacare	Flex 3 back /
Leckey	MyGo
Leckey	Kit
Motion Concepts	MatrX Personal back

#### Kombinationserklæring eksisterer på flg. sædesystem

Producent	Sædesystem
Motion Concepts	MatrX Personal back



## **1.11 ANVENDELSESOMRÅDER**

### **REA AZALEA BASE**

Rea<sup>®</sup> Azalea Base er medlem af Azalea-familien. En stolfamilie som er ment som et chassis til flere forskellige sædesystemer såvel som individuelt tilpassede anatomiske sæder.

Rea<sup>®</sup> Azalea Base er beregnet til såvel inden- som udendørs brug.

Den maksimale lastvægt på Rea<sup>®</sup> Azalea Base er 135 kg. Denne vægt inkluderer såvel bruger som de individuelle sædesystem.

Azalea klassen er CE-mærket. Men idet Rea<sup>®</sup> Azalea Base ikke kan betegnes som et komplet produkt og det kun er når chassiset og sædesystemet er kombineret, at en evaluering af sikkerheden kan foretages, er det op til det firma som monterer sædet, at udføre en sådan sikkerhedsevaluering.

Skulle der imidlertid forligge en aftale mellem Invacare og firmaet, der fremstiller sædesystemet, som fastslår ansvaret mellem virksomhederne, kan produktet bevare dets CE-mærkning. I alle andre tilfælde, vil firmaet som monterer sædesystemet stå til ansvar for CE-mærkning eller at stolen bliver registreret og dokumenteret som et specialtilpasset hjælpemiddel.

Rea<sup>®</sup> Azalea Base er crash-testet sammen med Invacare standard ryg- og sædesystem. Ingen andre kombinationer er testet og Invacare kan heller ikke på nogen måde forudsige omfanget af et uheld ved andre konfigurationer eller tilpasninger.

Alle andre test udført på Rea<sup>®</sup> Azalea Base er ligeledes udført ved konfigurationer med Invacare standard ryg- og sædesystem.



## SVAR-BLANKET

### SÆT KRYDS

- Jeg har læst og forstået denne meddelelse
- Jeg har læst og forstået denne meddelelse, men vi har ikke mulighed for at lokalisere stolen eller den er kasseret

Denne seddel faxes eller mailes tilbage til os **inden d. 15. januar 2012** på:

pkreuz@invacare.com

Fax: 3690 0001

### UDFYLD NEDENSTÅENDE MED KONTAKTOPLYSNINGER

Venligst skriv tydeligt

Institution/Kommune/firma.....

Navn:.....

Tlf:..... E-mail:.....

Dato:.....

Underskrift:.....