

**MEDDELELSE OM UDSTYRSSIKKERHED  
ÆNDRING AF FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE**

4. april 2012

Vi henvender os med denne skrivelse for at informere om en sikkerhedsmeddelelse for ventilatorerne Legendair™ og Supportair™, der er udarbejdet af Covidien, og som vedrører en potentiel fejl ved en komponent, der er identificeret som kondensator C53.

Denne fejl kan medføre, at ventilatoren ikke starter eller ikke kører på det interne batteri. Ventilatoren vil køre på eksternt batteri eller netstrøm.

De berørte ventilatorkoder vises nedenfor:

Legendair™ enkeltgrenet		Legendair™ dobbeltgrenet		Supportair™	
4095700	INTL LEGENDAIR ENKELTGRENET	4095900	INTL LEGENDAIR DOBBELTGRENET	4096200	INTL SUPPORTAIR
4095701	GB NO LEGENDAIR ENKELTGRENET	4095901	GB NO LEGENDAIR DOBBELTGRENET	4096201	GB SUPPORTAIR
4095702	DE LEGENDAIR ENKELTGRENET	4095902	DE LEGENDAIR DOBBELTGRENET	4096202	DE SUPPORTAIR
4095705	CA LEGENDAIR ENKELTGRENET	4095905	CA LEGENDAIR DOBBELTGRENET		
4095706	JP LEGENDAIR ENKELTGRENET	4095906	JP LEGENDAIR DOBBELTGRENET		
4095709	DK LEGENDAIR ENKELTGRENET	4095909	DK LEGENDAIR DOBBELTGRENET		
4095721	AU LEGENDAIR ENKELTGRENET	4095921	AU LEGENDAIR DOBBELTGRENET		

Ifølge vores fortegnelser har I en ventilator, der kan være berørt af dette problem.

Covidien anbefaler, at man inkluderer udskiftning af C53 kondensatoren som en del af den *reviderede* årlige forebyggende vedligeholdelse i henhold til vedlagte tillæg. Udskiftning af komponenten bør første gang foretages senest i forbindelse med næste planlagte vedligeholdelse og derefter hvert år som en del af det forebyggende vedligeholdelsesskema.

Hvis I ikke selv udfører den forebyggende vedligeholdelse, bedes I kontakte vedligeholdelsesleverandøren og informere om denne opdatering eller kontakte det lokale tekniske servicecenter hos Covidien på følgende nummer: +46 8 585 605 15.

Denne meddelelse udsendes med de relevante myndigheders kendskab.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Covidien-repræsentanten eller Covidiens tekniske service.

Vi beklager enhver ulejlighed i denne forbindelse og vil være taknemmelige for, at der straks tages hånd om denne sag.

Med venlig hilsen

Jean Le Roux  
European Product Director, Portable Ventilation  
Respiratory Solutions