

**Kundenavn**

Att.
XXvej 100
XX8200 Århus N

12. november 2012

Sikkerhedsmeddelelse vedr. Fred Easy Hjertestarter

Kære kunde og bruger,

Schiller AG har netop informeret os om, at der ved sjældne lejligheder (0,04 % risiko) kan forekomme følgende fejl på jeres Fred Easy hjertestarter:

Transistor Error vil blive vist i displayet.

Hvis dette sker skal man slukke for apparatet og tænde det igen.

Vi har medsendt en ny side, som et tillæg til brugsvejledningen for jeres apparat.

Da vi skal kunne dokumentere at I har modtaget dette brev, er det vigtigt at vi får dokumentet retur underskrevet.

Dato _____ Underskrift & stempel _____

Underskrevet dokument sendes på mail til sja@sw.dk eller på fax 7025 5620

Vi beklager ulejligheden.

Louise Nielsen

Kvalitetschef / Quality Manager

Simonsen & Weel®

Phone: +45 7025 5610
Direct: +45 2171 0073
Fax: +45 7025 5620
Email: lun@sw.dk

Simonsen & Weel A/S
Vejlegårdsvej 59
2665 Vallensbæk Strand
CVR-nr. 13 09 30 32

Tel.: 70 25 56 10
Fax: 70 25 56 20
E-mail: sw@sw.dk
Homepage: www.sw.dk