

Kære kunde,

Vi skal hermed udsende en vigtig information.

Der har været 2 episoder i forbindelse med anvendelsen af vores varenr 302024 Badestol med tilt, der giver anledning til at give en advarsel i forbindelse med brug af produktet. Ingen af episoderne har dog medført skader på personer eller ting.

Hvis brugerne læner sig langt fremover f.ex for at nå et objekt, eller rykker frem på sædet f.ex i forbindelse med en forflytning **SKAL** de sætte fødderne på gulvet, og derved fjerne noget af vægten fra stolen.

De må **IKKE** placere fødderne på fodstøtterne, idet der derved opstår en risiko for at stolen tipper forover.

Husk at i forbindelse med forflytninger skal bremserne aktiveres.

Vi skal understrege at produktet har gennemgået alle de af loven krævede tests, og at det er sikkert at anvende, hvis forskrifterne i brugermanualen følges.

Sikkerhedshenvisningerne skal altid følges.

Se vedlagte opdaterede brugervejledning med sikkerhedsadvarsel.

Med venlig hilsen

Lars Nygaard
Mobilex A/S
8660 Skanderborg

Tlf. 87932220