

SILENTIA SKÆRMSYSTEM

Dato: 2012-06-26
Berørte produkter: Samtlige produkter i Silentia Skærmsystem
Type af foranstaltning: Ændring af brugsanvisning

Baggrund

Der eksisterer et problem med, at visse sengemodeller har dele, som kan komme ind under skærmen, når sengen er nedsænket. Hvis disse dele hæves sammen med sengen, er der risiko for, at sengen med stor kraft presser skærmen op og påvirker dens fastgørelser. Det kan resultere i, at skærmen løsner sig og vælter. Skærmen kan vælte med det samme, eller når nogen påvirker eller anvender den på et senere tidspunkt. Det er nogle gange i løbet af det seneste år sket, at skærme er væltet af denne grund. Selv om ingen er kommet til skade ved disse lejligheder, har vi besluttet at indføje en advarsel i brugsanvisningen, som vist nedenfor. Risikoen vurderes at være størst i forbindelse med elektriske hæve-/sænkesenge.

Råd til brugeren



Brugere bedes være opmærksomme på følgende advarsel i brugsanvisningen.

Før du hæver en seng i nærheden af skærmen, skal du kontrollere, at ingen dele af sengen befinder sig under skærmen. Løftkraften fra sengen kan beskadige skærmen, dens tilbehør og/eller beslagene. Konsekvensen kan blive, at skærmen falder ned og skader patienter eller personale.

For identifikation af Silentias skærme er de mærket med Silentias logo foroven på produkterne.



Videresendelse af denne sikkerhedsmeddelelse

Denne sikkerhedsmeddelelse skal udsendes til alle involverede personer inden for jeres organisation samt til eventuelle repræsentanter hos andre organisationer, som har fået tilsendt produkter, der kan udgøre en risiko. Udfyld (og kopier efter behov) den vedlagte modtagelsesbekræftelse og send den til din lokale forhandler inden 30 dage.



Kontaktoplysninger

For yderligere information bedes du kontakte din lokale forhandler eller producenten.

Forhandler:

Silentia ApS
Fortunvej 29
2920 Charlottenlund

Telefon: +45 3990 8585
Fax: +45 7262 3100
E-mail: info@silentia.dk

Producent:

Silentia AB
Box 108
SE-311 22 Falkenberg
Sverige

Telefon: +46(0)346 485 80
Fax: +46(0)346 485 89
E-mail: qc@silentia.se

De relevante myndigheder er blevet orienteret om denne sikkerhedsmeddelelse.

Vi beklager den ulejlighed, som denne sikkerhedsmeddelelse medfører, og håber, at du har forståelse for vores foranstaltninger.

Örjan Göranson/adm. dir.

Bilag

Bekræftelsesformular



Bekræftelse

Jeg bekræfter hermed, at _____ (organisation)
har modtaget en vigtig sikkerhedsmeddelelse fra Silentia AB dateret 2012-06-26 og har
videresendt den i henhold til instrukserne.

(Navn, titel)

(Sted, dato)

Send dette blad til Silentia ApS via e-mail, fax eller post.

E-mail: info@silentia.dk
Fax: +45 7262 3100
Adresse: Silentia ApS
Fortunvej 29
2920 Charlottenlund

