

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremse

Kære kunde

Der er konstateret et problem på de ovennævnte scannere, der kunne udgøre en risiko for patienter og brugere, hvis det skulle opstå igen.

Denne vigtige produktinformation skal informere dig om:

- hvad problemet er, og under hvilke forhold det kan forekomme
- hvilke handlinger, der skal foretages af kunden/brugeren for at forebygge risiko for patienter eller brugere
- hvilke handlinger Philips har planlagt for at korrigere problemet.

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret fremover

Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse.

Opbevar venligst en kopi af denne meddelelse sammen med udstyrets brugermanual.

Philips Healthcare har modtaget indberetninger om, at skruerne, der holder den lodrette bremse sammen, kan være defekte.

Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant eller det lokale Philips Healthcare-kontor.

Telephone 80 30 30 35

E-mail philips.service@philips.com

Denne meddelelse er blevet rapporteret til de relevante myndigheder.

Philips beklager den ulejlighed, dette måtte forårsage.

Med venlig hilsen

Povl Pedersen
CS Branch Manager Denmark
Philips Healthcare



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremse

BERØRTE PRODUKTER	<p>De følgende CT-systemer er berørt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brilliance CT-serien: <ul style="list-style-type: none"> ○ 6 ○ 10 ○ 16 ○ 16 Power ○ 40 ○ 64 ○ CT Big Bore ○ CT Big Bore Oncology • ICT • ICT SP • Ingenuity Core • Ingenuity CT • MX8000 Dual v. EXP
BESKRIVELSE AF PROBLEMET	Philips Healthcare har modtaget indberetninger, som angiver, at patientlejet på et system uventet bevægede sig nedad, mens der var en patient på lejet. Philips har fastlagt, at årsagen var en fejlfunktion i den lodrette bremse på patientlejet på grund af, at skruerne i den lodrette bremse var blevet skøre.
MULIGE FARER	Der er risiko for, at den lodrette bremse kan svigte, mens patienten er på lejet og lejet hæves. Selvom der ikke er blevet rapporteret alvorlige skader, kan patienten eller andre brugere i nærheden af lejet komme til skade, hvis den lodrette bremse svigter, da lejet i så fald vil bevæge sig nedad.
SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER	Hvis du har modtaget denne meddelelse, betyder det, at dit system er berørt. Vi vedlægger også en liste over berørte serienumre som bilag A. Dit serienummer er placeret på mærkaten bagpå udstyret, på den nederste del af gantryet.
HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN	Hvis lejet bevæger sig nedad uventet, skal enheden tages ud af brug og den lokale Philips servicetekniker kontaktes.
PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS	En Philips servicetekniker vil reparere eller udskifte bremsen på systemet for at løse problemet.
YDERLIGERE INFORMATION OG SERVICE	<p>Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant eller det lokale Philips Healthcare-kontor.</p> <p>Telephone 80 30 30 35 E-mail philips.service@philips.com</p>



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremseBilag ASerienumre for berørte Brilliance CT 6-systemer

Systemkodenr. 728256, serienummer:

3001,3016,3019,3020,3025,3026,3030,3057,3058,3060,3071,3073,3074,3076,3080,3090,3095,3108,
3114,3119,3124,3138,3151,3155,3167,3168,3174,3178,3186,3187,3192,3193,3196,3208,3210,3212,
3213,3214,3218,3226,3245,3257,3264,3267,3269,3273,3274,3275,3281,3284,3289,3291,3296,3304,
3306,3309,3313,3317,3327,3331,3336,3337,3339,3340,3341,3342,3344,3345,3346,3347,3348,3349,
3350,3351,3352,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,
3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,
3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3402,3403,3404,3405,
3406,3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,
3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439,3440,3441,3443,
3444,3445,3447,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463,
3464,3465,3466,3467,3468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3478,3479,3480,3481,
3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3498,3499,
3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,
3518,3519,3520,3521,3522,3523,3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532,3533,3534,3535,
3536,3537,3538,3539,3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,
3554,3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,
3572,3573,3574,3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3589,
3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600,3601,3602,3603,3604,3605,3606,3607,
3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,3624,3625,
3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,3642,3643,
3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659,3660,3661,
3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,
3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,
3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716,
3717,3718,3719,3720,3721,3722,6039,6040,30003,30004,30006,30007,30008,30009,30012,30013,
30015,30016,30021,30026,30028,30029,30030,30031,30036,30037,30038,30039,30046,30047,30050,
30053,30054,30057,30060,30062,30065,30066,30072,30073,30075,30078,30079,30082,30083,30089,
30090,30094,30100,30101,30103,30105,30109,30110,30111,30117,30118,30120,30122,30124,30125,
30126,30128,30129,30130,30131

Serienumre for berørte Brilliance CT 10-systemer

Systemkodenr. 728251, serienummer:

3008,3098,4006,4007,4010,4011,4012,4016,4023,4031,4039,4050,4058,4061,4062,4063,4064,4065,
4066,4067,40004,40005,40006,40007,40008,40009,40010,40011,40012,40014,40015,40016,40017,
40018,40021,40025,40028,40030,40032

Serienumre for berørte Brilliance CT 16-systemer

Systemkodenr. 728246, serienummer:



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremse

3012,3013,3015,3017,3023,3027,3031,3043,3070,3072,3160,3185,3189,3191,3224,3295,3448,4018,4019,4024,4025,4043,4051,5001,5005,5006,5007,5013,5014,5016,5019,5022,5023,5024,5025,5028,5029,5032,5034,5036,5038,5046,5051,5052,5053,5055,5058,5059,5061,5063,5064,5069,5070,5074,5075,5077,5083,5086,5097,5102,5105,5106,5107,5108,5110,5111,5112,5113,5115,5116,5117,5119,5122,5123,5124,5125,5127,5130,5136,5137,5138,5139,5141,5143,5150,5151,5156,5158,5161,5169,5174,5179,5183,5184,5187,5188,5190,5195,5198,5202,5207,5211,5215,5217,5218,5220,5221,5224,5226,5228,5229,5230,5234,5249,5250,5252,5254,5265,5270,5274,5278,5282,5283,5285,5286,5287,5290,5291,5295,5296,5299,5309,5313,5315,5316,5317,5318,5319,5323,5328,5329,5331,5334,5343,5364,5365,5366,5367,5370,5371,5372,5375,5376,5377,5378,5379,5380,5381,5382,5383,5384,5385,5386,5387,5388,5389,5391,5392,5393,5394,5396,5397,5398,5399,5400,5401,5402,5403,5404,5405,5406,5407,5408,5409,5410,5411,5412,5414,5415,5416,5417,5418,5419,5420,5421,5422,5423,5424,5425,5426,5427,5428,5429,5432,5433,5434,5435,5437,5438,5439,5441,5442,5443,5444,5446,5447,5448,5449,5450,5451,5453,5457,5458,5459,5460,5461,5462,5463,5464,5466,5468,5471,5473,5474,5477,5478,5479,5480,5481,5482,5484,5485,5486,5487,5488,5489,5490,5491,5492,5493,5494,5496,5497,5498,5501,5502,5503,5504,5505,5506,5507,5508,5509,5510,5511,5513,5514,5515,5516,5517,5518,5519,5520,5522,5523,5524,5525,5526,5528,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5536,5537,5538,5539,5540,5541,5542,5543,5544,5545,5546,5547,5548,5549,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5556,5557,5558,5559,5560,5561,5562,5563,5564,5565,5566,5567,5568,5569,5570,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577,5578,5579,5580,5581,5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5589,5590,5591,5592,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606,5607,5608,5609,5610,5611,5612,5613,5614,5615,5616,5617,5618,5619,5620,5621,5622,5623,5624,5625,5626,5627,5628,5629,5630,5631,5632,5633,5634,5635,5636,5637,5638,5639,5640,5641,5642,5643,5644,5645,5646,5647,5648,5649,5650,5651,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,5666,5667,5668,5669,5670,5671,5672,5673,5674,5675,5676,5677,5678,5679,5680,5681,5682,5683,5684,5685,5686,5687,5688,5689,5690,5691,5692,5693,5694,5695,5696,5697,5698,5699,5700,5701,5702,5703,5704,5705,5706,5707,5708,5709,5710,5711,5712,5713,5714,5715,5716,5717,5718,5719,5720,5721,5722,5723,5724,5727,5728,5729,5730,5731,5732,5733,5734,5735,5736,5737,5738,5739,5740,5741,5742,5743,5744,5745,5746,5747,5748,5749,5750,5751,5752,5753,5754,5755,5756,5757,5758,5759,5760,5761,5762,5763,5764,5765,5766,5767,5768,5769,5770,5771,5772,5773,5774,5775,5776,5777,5778,5779,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,5791,5792,5793,5794,5795,5796,5797,5798,5799,5800,5801,5802,5803,5804,5805,5806,5807,5808,5809,5810,5811,5812,5813,5814,5815,5816,5817,5818,5819,5820,5821,5822,5823,5824,5825,5826,5827,5828,5829,5830,5831,5832,5833,5834,5835,5836,5837,5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,5857,5858,5859,5860,5861,5862,5863,5864,5865,5866,5867,5868,5869,5870,5871,5872,5873,5874,5875,5876,5877,5878,5879,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5889,5890,5891,5892,5893,5894,5895,5896,5897,5898,5899,5900,5901,5902,5903,5904,5905,5906,5908,5909,5910,5911,5912,5913,5914,5915,5916,5917,5918,5919,5920,5921,5922,5923,5924,5925,5926,5927,5928,5929,5930,5931,5932,5933,5934,5935,5936,5937,5938,5939,5940,5941,5942,5943,5944,5945,5946,5947,5948,5949,5950,5951,5952,5953,5954,5955,5956,5957,5958,5959,5960,5961,5962,5963,5964,5965,5966,5967,5968,5969,5970,5971,5972,5973,5974,5975,5976,5977,5978,5979,5980,5981,5982,5983,5984,5985,5986,5987,5988,5989,5990,5991,5992,5993,5994,5995,5996,5997,5998,5999,6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006,6008,6009,6010,6011,6012,6013,6014,6015,6016,6017,6018,6020,6021,6022,6023,6024,6025,6026,6027,6028,6029,6030,6031,6032,6033,6034,6035,6036,6037,6038,6039,6040,6041,6042,6043,6044,6045,6046,6047,6048,



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr**Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP****Defekt lodret bremse**

6049,6050,6051,6052,6053,6054,6055,6056,6057,6058,6059,6060,6061,6062,6063,6064,6065,6066,6067,6068,6069,6070,6071,6072,6073,6074,6075,6076,6077,6078,6079,6080,6081,6082,6083,6084,6085,6086,6087,6088,6089,6090,6091,6092,6093,6094,6095,6096,6097,6098,6099,6100,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6121,6122,6123,6124,6125,6126,6127,6128,6129,6130,6131,6132,6133,6134,6135,6136,6137,6138,6139,6140,6141,6142,6143,6144,6145,6146,6147,6148,6149,6150,6151,6152,6153,6154,6155,6156,6157,6158,6159,6160,6162,6163,6165,6166,6167,6168,6169,6170,6171,6172,6173,6174,6175,6176,6177,6178,6179,6180,6181,6182,6183,6184,6185,6186,6187,6188,6189,6190,6191,6192,6193,6194,6195,6196,6197,6198,6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218,6219,6220,6221,6222,6223,6224,6225,6226,6227,6228,6229,6230,6231,6232,6233,6234,6235,6236,6237,6238,6239,6240,6241,6242,6243,6244,6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6259,6260,6261,6263,6264,6265,6266,6267,6270,6271,6272,6273,6274,6275,6276,6277,6278,6279,6280,6281,6282,6283,6284,6285,6286,6287,6288,6289,6290,6291,6292,6293,6294,6295,6296,6297,6298,6299,6300,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,6313,6314,6315,6316,6317,6318,6319,6320,6321,6322,6323,6324,6325,6326,6327,6328,6329,6330,6331,6332,6333,6334,6335,6336,6337,6338,6340,6341,6342,6343,6344,6345,6346,6347,6348,6349,6350,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6358,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367,6368,6369,6370,6371,6372,6373,6374,6375,6376,6377,6378,6379,6380,6382,6383,6384,6385,6386,6387,6388,6389,6392,6393,6394,6395,6397,6398,6399,6400,6401,6402,6403,6404,6405,6406,6407,6408,6409,6410,6411,6412,6413,6414,6415,6416,6417,6418,6419,6420,6421,6422,6423,6424,6425,6426,6427,6428,6429,6430,6431,6432,6433,6434,6435,6436,6437,6438,6439,6440,6441,6442,6443,6444,6445,6446,6447,6448,6449,6450,6451,6452,6453,6454,6455,6456,6457,6458,6459,6460,6461,6462,6463,6464,6465,6466,6467,6468,6469,6470,6471,6472,6473,6474,6475,6476,6477,6478,6479,6480,6481,6482,6483,6484,6485,6486,6487,6488,6489,6490,6491,6492,6493,6494,6495,6496,6497,6498,6499,6500,6501,6502,6503,6504,6505,6506,6507,6508,6509,30019,30041,30044,30067,30069,30070,30071,30097,30119,40002,40022,40027,40035,50002,50003,50004,50009,50010,50011,50013,50014,50015,50018,50022,50023,50029,50031,50032,50033,50035,50036,50041,50042,50044,50045,50046,50049,50050,50051,50052,50055,50058,50059,50061,50062,50063,50064,50065,50066,50068,50069,50070,50073,50074,50078,50080,50081,50082,50083,50084,50086,50087,50089,50090,50091,50092,50093,50094,50095,50097,50098,50099,50101,50102,50103,50106,50109,50110,50114,50122,50124,50125,50126,50128,50129,50131,50132,50133,50134,50135,50136,50137,50138,50140,50141,50142,50153,50154,50155,50156,50157,50158,50159,50160,50161,50162,50163,50164,50165,50166,50167,50168,50169,50170,50171,50172,50173,50175,50176,50177,50178,50179,50180,50181,50182,50183,60015,60020

Serienumre for berørte Brilliance CT 16 Power-systemer

Systemkodenr. 728240, serienummer:

5003,5043,5175,5251,5284,5373,5374,5390,5395,5413,5430,5431,5436,5440,5445,5454,5455,5456,5465,5467,5469,5470,5472,5475,5476,5483,5495,5499,5500,5512,5521,5527,5822,6006,6009,6010,6011,6013,6021,6024,6026,6027,6028,6029,6030,6031,6032,6033,6034,6035,6036,6041,6045,6046,6047,6048,6049,6054,6055,6057,6058,6059,6060,6064,6066,6067,6069,6070,6071,6072,6075,6080,6081,6082,6083,6085,6089,6090,6095,6096,6099,6100,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6112,6113,6115,6117,6119,6121,6123,6127,6129,6130,6131,6133,6134,6136,6137,6138,6139,6141,6144,6146,6148,6150,6154,6155,6156,6157,6159,6160,60002,60005,60009,60011,60012,60014,60018,60021,



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremse

60022,60025,60027,60029

Serienumre for berørte Brilliance CT 40-systemer

Systemkodenr. 728235, serienummer:

9031,9036,9039,9061,9085,9088,9094,9097,9103,9104,9114,9116,9125,9129,9130,9132,9144,9146,9147,9149,9152,9153,9156,9157,9164,9167,9168,9169,9170,9174,9178,9181,9183,9186,9188,9189,9190,9191,9200,9203,9211,9212,9220,9233,9260,9265,9272,29008,29010,29011,29012,29015,29017,29019,29020,29023,29024,29028,29030,29033,29042,29043,29046,29048,29051,29055,29059,29060,29061,29062,29065,29067,29070,29071,29072,29075,29077,29078,29080,29084,29085,29086,29087,29088,29089,29090,29091,29092,29093,29094,29095,29096,29097,29098,29099,29100,29101,29102,29103,29104,29105,29106,29107,29108,29109,29111,29112,29113,29114,29116,29117,29118,29119,29120,29121,29122,29123,29124,29125,29126,29127,29128,29129,29130,29131,29132,29134,29135,29136,29137,29138,29139,29140,29141,29142,29143,29144,29145,29146,29147,29148,29149,29150,29151,29152,29153,90034,90043,90046,90048,90051,90053,90056,90058,90059,90064,90065,90069,90071,90075,90076,90083,90095,90101,90103,90108,90110,90111,90121,90122,90125,90126,90128,90130,90134,90144,90145,90146,90148,90149,90153,90155,90164,90166,90171,90172,90173,90176,90178,90179,90181,90184,90186,90187,90189,90191,90192,90195,90196,90197,90200,90204,90206,90213,90214,90221,90223,90224,90225,90226,90227,90228,90229,90230,90231,90232,90233,90234,90235,90236,90237

Serienumre for berørte Brilliance CT 64-systemer

Systemkodenr. 728231, serienummer:

4001,4003,4016,4021,9009,9037,9038,9041,9044,9045,9048,9049,9052,9056,9059,9062,9066,9069,9074,9075,9077,9080,9087,9089,9092,9105,9108,9118,9120,9137,9142,9143,9160,9162,9166,9175,9195,9197,9201,9202,9205,9206,9208,9214,9216,9217,9501,9502,9503,9514,9522,9526,9533,9538,9540,9541,9543,9544,9547,9552,9553,9554,9556,9561,9564,9566,9568,9569,9570,9575,9577,9578,9580,9584,9585,9586,9588,9590,9592,9596,9599,9607,9612,9615,9617,9620,9625,9627,9628,9630,9640,9641,9650,9654,9659,9663,9664,9670,9672,9675,9676,9678,9684,9688,9690,9694,9695,9696,9697,9703,9706,9709,9712,9713,9714,9718,9729,9731,9735,9736,9737,9738,9740,9747,9750,9751,9758,9761,9765,9766,9767,9772,9774,9777,9780,9782,9787,9788,9792,9794,9795,9797,9805,9807,9808,9811,9812,9813,9818,9820,9822,9824,9828,9830,9833,9834,9835,9837,9838,9840,9841,9843,9846,9848,9857,9866,9870,9871,9873,9874,9877,9882,9883,9902,9909,9916,9924,9933,9939,9956,9957,9958,9959,9960,9961,9962,9963,9964,9965,9966,9967,9968,9969,9970,9971,9972,9973,9974,9975,9976,9977,9978,9979,9980,9981,9982,9983,9984,9985,9986,9987,9988,9989,9990,9991,9992,9993,9994,9995,9996,9997,9998,9999,10000,10001,10002,10003,10004,10005,10006,10007,10008,10009,10010,10011,10012,10013,10014,10015,10016,10017,10018,10019,10020,10021,10022,10023,10024,10025,10026,10027,10028,10029,10030,10031,10032,10033,10034,10035,10036,10037,10038,10039,10040,10041,10042,10043,10044,10045,10046,10047,10048,10049,10050,10051,10052,10053,10054,10056,10057,10058,10059,10060,10061,10062,10063,10064,10065,10066,10067,10068,10069,10070,10071,10072,10073,10074,10075,10076,10077,10078,10079,10080,10081,10082,10083,10084,10085,10086,10087,10088,10089,10090,10091,10092,10093,10094,10095,10096,10097,10098,10099,10100,10101,10102,10103,10104,10105,10106,10107,10108,10109,10110,10111,10112,10113,10114,10115,10116,10117,10118,10119,10120,10121,10122,10123,10124,10125,10126,10127,10128,10129,



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremse

10130,10131,10132,10133,10134,10135,10136,10137,10138,10139,10140,10141,10142,10143,10144,10145,10146,10147,10148,10149,10150,10151,10152,10153,10154,10155,10156,10157,10158,10159,10160,10161,10162,10163,10164,10165,10166,10167,10168,10169,10170,10171,10172,10173,10174,10175,10176,10177,10178,10179,10180,10181,10182,10183,10184,10185,10186,10187,10188,10189,10190,10191,10192,10193,10194,10195,10196,10197,10198,10199,10200,10201,10202,10203,10204,10205,10206,10207,10208,10209,10210,10211,10212,10213,10214,10215,10216,10217,10218,10219,10220,10221,10222,10223,10224,10225,10226,10227,10228,10229,10230,10231,10232,10233,10234,10235,10236,10237,10238,10239,10241,10242,10243,10244,10245,10247,10248,10249,10250,10251,10252,10253,10254,10255,10256,10257,10258,10259,10260,10261,10262,10263,10264,10265,10266,10267,10268,10269,10270,10271,10272,10273,10274,10275,10276,10277,10278,10279,10280,10281,10282,10283,10284,10285,10286,10287,10288,10289,10290,10291,10292,10293,10294,10295,10296,10297,10298,10299,10300,10301,10302,10303,10304,10305,10306,10307,10308,10309,10310,10311,10312,10313,10314,10315,10316,10317,10318,10319,10320,10321,10322,10323,10324,10325,10326,10327,10328,10330,10331,10332,10333,10334,10335,10336,10337,10338,10339,10340,10341,10342,10343,10344,10345,10346,10347,10348,10349,10350,10351,10352,10353,10354,10355,10356,10357,10358,10359,10360,10361,10362,10363,10364,10365,10366,10367,10368,10369,10370,10371,10372,10373,10374,10375,10376,10377,10378,10379,10380,10381,10382,10383,10384,10385,10386,10387,10388,10389,10390,10391,10392,10393,10394,10395,10396,10397,10398,10399,10400,10401,10402,10403,10404,10405,10406,10407,10408,10409,10410,10411,10412,10413,10414,10415,10416,10417,10418,10419,10420,10421,10422,10423,10424,10425,10426,10427,10428,10429,10430,10431,10432,10433,10434,10435,10436,10437,10438,10439,10440,10441,10442,10443,10444,10445,10446,10447,10448,10449,10450,10451,10452,10453,10454,10455,10456,10458,10459,10460,10461,10462,10463,10464,10465,10466,10467,10468,10469,10470,10471,10472,10473,10474,10475,10476,10477,10478,10479,10480,10481,10482,10483,10484,10485,10486,10487,10488,10489,10490,10491,10492,10493,10494,10495,10496,10497,10498,10499,10500,10501,10502,10503,10504,10505,10506,10507,10508,10510,10511,10513,10514,10515,10516,10517,10518,10519,10520,10521,10522,10523,10524,10525,10526,10527,10528,10529,10530,10531,10532,10533,10534,10535,10536,10537,10538,10539,10540,10541,10542,10543,10544,10545,10546,10547,10548,10549,10550,10551,10552,10553,10554,10555,10556,10557,10558,10559,10560,10561,10562,10563,10564,10565,10566,10567,10568,10569,10570,10571,10572,10573,10574,10575,10576,10577,10578,10579,10581,10582,10583,10584,10585,10586,10587,10588,10589,10590,10591,10592,10593,10594,10595,10596,10597,10598,10599,10600,10601,10602,10603,10604,10605,10606,10607,10608,10609,10610,10611,10612,10613,10614,10615,10616,10617,10618,10619,10620,10621,10622,10623,10624,10625,10626,10627,10628,10629,10630,10631,10632,10633,10634,10635,10636,10637,10638,10639,29016,29027,29035,29037,29044,29045,29049,29057,29066,64015,64045,64051,90029,90036,90037,90041,90045,90070,90072,90077,90080,90081,90082,90085,90086,90089,90091,90097,90099,90106,90107,90117,90120,90123,90124,90132,90135,90136,90137,90141,90151,90152,90154,90156,90161,90162,90167,90168,90169,90170,90177,90182,90185,95009,95011,95013,95016,95020,95021,95022,95023,95025,95026,95030,95033,95034,95035,95036,95038,95043,95044,95045,95050,95052,95054,95055,95056,95058,95060,95062,95065,95067,95068,95069,95071,95073,95074,95075,95078,95079,95081,95084,95087,95088,95090,95092,95093,95095,95096,95097,95098,95100,95103,95104,95105,95106,95107,95108,95114,95116,95118,95120,95123,95125,95126,95130,95132,95133,95134,95136,95137,95138,95139,95140,95144,95145,95146,95150,95151,95153,95156,95158,95159,95160,95163,95164,95165,95166,95176,95178,95191,95193,95198,95199,95203,95206,95207,95208,95212,95216,95219,95221,95223,95224,95225,95226,95232,



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremse

95237,95238,95239,95240,95241,95242,95244,95246,95249,95251,95252,95254,95256,95259,95261,95262,95263,95265,95266,95268,95270,95271,95273,95274,95275,95276,95277,95278,95281,95285,95287,95288,95291,95293,95295,95299,95300,95302,95303,95310,95311,95312,95313,95314,95315,95316,95317,95318,95319,95320,95321,95322,95323,95324,95325,95326,95327,95328,95329,95330,95331,95332,95333,95334,95335,95336,95337,95338,95339,95340,95341,95342,95343,95344,95346,95347,95348,95349,95350,95351,95352,95353,95354,95355,95356,95357,95358,95359,95360,95361,95362,95363,95364,95365,95366,95367,95368,95369,95370,95371,95372,95373,95374,95375,95376,95377,95378,95379,95380,95381,95382,95383,95384,95385,95386,95387,95388,95389,95390,95391,95392,95393,95394,95395,95396,95397,95398,95399,95400,95401,95402,95403,95404,95405,95406,95407,95408,95409,95410,95411,95412,95413,95414,95415,95416,95417,95418,95419,95420,95421,95422,95423,95424,95425,95426,95427,95428,95429,95430,95431,95432,95433,95434,95435,95436,95437,95438,95439,95440,95441,95442,95443,95444,95445,95446,95447,95448,95449,95450,95451,95452,95453,95454,95455,95456,95457,95458,95459,95460,95461,95462,95463,95464,95465,95466,95467,95468,95469,95470,95471,95472,95473,95474,95475,95476,95477,95478,95479,95480,95481,95482,95483,95484,95485,95486,95487,95488,95489,95490,95491,95492,95493,95494,95495,95496,95497,95498,95499,95500,95501,95502,95503,95504,95505,95506,95507,95508,95509,95510,95511,95512,95513,95514,95515,95516,95517,95518,95519,95520,95521,95522,95523,95524,95525,95526,95527,95528,95529,95530,95531,95532,95533,95534,95535,95536,95537,95538,95539,95540,95541,95542,95543,95544,95545,95546,95547,95548,95549,95550,95551,95552,95553,95554,95556,95557,95559,95560,95561,95562,95563,95564,95565,95566,95567,95569,95571,95572,95573,95574,95576,95577,95579,95580,95581,95582,95583,95584,95585,95586,95587,95588,95589,95590,95591,95592,95593,95594,95595,95596,95597,95598,95599,95600,95601,95603,95604,95605,95606,95607,95608,95609,95610,95611,95612,95613,95614,95615,95616,95617,95618,95619,95620,95621,95622,95623,95625,95626,95627,95628,95629,95631,95632,95633,95634,95635,95636,95637,95638,95639,95640,95641,95642,95643,95644,95645,95646,95647,95648,95649,95650,95651,95652,95653,95654,95655,95656,95657,95659,95660,95661,95662,95663,95666,95667,95668,95669,95670,95671,95672,95673,95674,95675,95676,95678,95679,95680,95681,95682,95683,95684,95685,95686,95687,95688,95689,95690,95691,95692,95693,95694,95695,95696,95697,95698,95699,95700,95701,95702,95703,95704,95705,95706,95707,95708,95709,95710,95711,95712,95713,95714,95715,95716,95717,95718,95719,95721,95722,95723,95724,95725,95726,95727,95728,95729,95730,95731,95732,95733,96494

Serienumre for berørte Brilliance CT Big Bore-systemer

Systemkodenr. 728243, serienummer:

7006,7008,7014,7016,7019,7025,7026,7027,7029,7030,7031,7033,7039,7042,7043,7047,7049,7050,7054,7071,7073,7076,7078,7081,7084,7086,7087,7088,7093,7095,7098,7099,7101,7102,7103,7110,7113,7114,7115,7117,7122,7124,7125,7127,7128,7130,7132,7133,7134,7136,7138,7140,7141,7142,7144,7147,7150,7151,7152,7153,7154,7156,7157,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7166,7167,7168,7169,7170,7171,7173,7174,7175,7177,7178,7179,7181,7183,7184,7185,7186,7187,7188,7189,7191,7192,7193,7194,7195,7196,7197,7198,7199,7201,7202,7203,7204,7205,7206,7207,7208,7209,7210,7211,7212,7213,7214,7215,7216,7217,7218,7219,7220,7221,7222,7223,7224,7225,7226,7227,7228,7229,7230,7231,7232,7233,7234,7235,7236,7237,7238,7239,7240,7241,7242,7243,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7253,7254,7255,7256,7257,7258,7259,7260,7261,7262,7263,7264,7265,7266,7267,7269,7270,7272,7273,7274,7275,7276,7277,7278,7279,7280,7281,7282,7283,7284,7285,7286,7287,7288,7289,7290,7291,7292,7293,7294,7295,7296,7297,7299,7300,7302,7303,7304,



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremse

7305,7306,7307,7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7319,7320,7321,7322,7323,7324,7325,7326,7327,7328,7329,7330,7331,7332,7333,7334,7335,7336,7337,7338,7339,7340,7341,7342,7343,7344,7345,7346,7347,7348,7349,7350,7351,7352,7353,7354,7355,7356,7357,7358,7359,7360,7361,7362,7363,7364,7365,7366,7367,7368,7369,7370,7371,7372,7373,7374,7376,7377,7378,7379,7381,7382,7385,7387,7388,7389,7391,7392,7393,7394,7395,7397,7398,7399,7400,7401,7403,7404,7405,7406,7409,7410,7411,7412,7413,7414,7415,7416,7417,7418,7419,7420,7421,7422,7423,7424,7425,7426,7428,7429,7431,7432,7433,7434,7435,7436,7437,7438,7440,7441,7442,7443,7444,7445,7446,7447,7448,7449,7450,7451,7454,7455,7456,7457,7459,7460,7461,7462,7463,7464,7465,7466,7467,7468,7469,7470,7471,7472,7473,7474,7475,7476,7477,7478,7479,7480,7481,7482,7483,7484,7485,7487,7488,7489,7490,7491,7492,7493,7494,7495,7496,7497,7498,7499,7500,7501,7502,7503,7504,7505,7506,7507,7508,7509,7511,7512,7513,7515,7516,7517,7518,7519,7521,7522,7523,7524,7525,7526,7527,7528,7529,7530,7531,7532,7533,7534,7535,7536,7537,7538,7539,7540,7541,7542,7544,7545,7546,7547,7548,7549,7550,7551,7552,7553,7554,7555,7556,7557,7558,7559,7560,7561,7562,7563,7564,7565,7566,7567,7568,7569,7570,7572,7573,7574,7575,7576,7577,7578,7579,7580,7581,7582,7583,7584,7585,7586,7587,7588,7589,7590,7591,7592,7593,7595,7596,7597,7598,7599,7601,7602,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,7613,7614,7615,7616,7617,7618,7620,7622,7623,7624,7625,7626,7627,7628,7629,7630,7631,7632,7633,7634,7635,7637,7638,7639,7640,7641,7642,7643,7644,7645,7646,7647,7648,7649,7650,7652,7655,7656,7657,7658,7659,7661,7662,7663,7665,7666,7667,7671,7672,7673,7674,7675,7677,7678,7679,7680,7681,7682,7684,7685,7686,7687,7689,7690,7691,7692,7693,7695,7696,7698,7699,7700,7701,7702,7703,7704,7705,7706,7707,7709

Serienumre for berørte Brilliance CT Big Bore Oncology-systemer

Systemkodenr. 728244, serienummer:

7052,7155,7172,7176,7180,7182,7190,7200,7244,7252,7268,7271,7301,7318,7375,7380,7383,7384,7386,7390,7396,7402,7407,7408,7427,7430,7439,7452,7453,7458,7486,7510,7514,7520,7543,7571,7600,7619,7621,7636,7651,7653,7654,7660,7664,7668,7669,7670,7676,7683,7688,7694,7697,7708,7710

Serienumre for berørte iCT-systemer

Systemkodenr. 728306, serienummer:

100019,100020,100021,100022,100023,100024,100025,100028,100031,100032,100037,100038,100039,100040,100042,100043,100044,100045,100046,100047,100048,100049,100050,100051,100052,100053,100054,100055,100056,100057,100058,100059,100060,100061,100062,100063,100064,100065,100066,100067,100068,100069,100070,100071,100072,100073,100074,100077,100078,100079,100081,100082,100083,100084,100085,100086,100087,100088,100089,100090,100091,100092,100093,100094,100095,100096,100097,100098,100099,100100,100101,100102,100103,100104,100105,100106,100107,100108,100109,100110,100111,100112,100113,100114,100115,100116,100117,100118,100119,100120,100121,100122,100123,100124,100125,100126,100127,100128,100129,100130,100131,100132,100133,100134,100135,100136,100137,100138,100139,100140,100141,100142,100143,100144,100145,100146,100147,100148,100149,100150,100151,100152,100153,100154,100155,100157,100158,100159,100160,100161,100162,100163,100164,100165,100166,100167,100168,100169,100170,100171,100172,100173,100174,100175,100176,100177,100178,100179,100180,100181,100182,100183,100184,100185,100186,100187,



VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr

Brilliance CT-serien (6, 10, 16, 16 Power, 40, 64, CT Big Bore og CT Big Bore Oncology), iCT, iCT SP, Ingenuity Core, Ingenuity CT og MX8000 Dual v. EXP

Defekt lodret bremse

100188,100189,100190,100191,100192,100193,100194,100195,100196,100197,100198,100199,100200,100201,100202,100203,100204,100205,100206,100207,100208,100209,100210,100211,100212,100213,100214,100215,100216,100217,100218,100219,100220,100221,100222,100223,100224,100225,100226,100227,100228,100229,100230,100231,100232,100233,100234,100235,100236,100238,100240,100241,100242,100243,100244,100245,100246,100247,100248,100249,100250,100251,100252,100253,100254,100255,100256,100257,100258,100259,100260,100261,100262,100263,100264,100265,100266,100267,100268,100269,100270,100271,100272,100273,100274,100275,100276,100277,100278,100279,100280,100281,100282,100283,100284,100285,100286,100287,100288,100289,100290,100291,100292,100293,100294,100295,100296,100297,100298,100299,100300,100301,100302,100303,100304,100305,100306,100307,100308,100309

Serienumre for berørte iCT SP-systemer

Systemkodenr. 728311, serienummer:

200003,200004,200005,200006,200007,200008,200009,200010,200012,200013,200014,200015,200016,200017,200018,200019,200020,200021,200022,200023,200024,200025,200026,200027,200028,200029,200030,200031,200032,200033,200034,200035,200036,200037,200038,200039,200040,200041,200042,200043,200044,200045,200046,200047,200048,200049,200050,200051,200052,200053,200054,200055,200056,200057,200058,200059,200060,200061,200062,200063,200064,200065,200066,200067,200068,200069,200070,200071,200073,200074,200075,200076,200077,200078,200079,200080,200081,200082,200083,200084,200085,200086,200087,200088,200089,200090,200091,200092,200093

Serienumre for berørte Ingenuity Core-systemer

Systemkodenr. 728321, serienummer:

310001, 310002, 310003

Serienumre for berørte Ingenuity CT-systemer

Systemkodenr. 728326, serienummer:

300003,300004,300005,300006,300007,300010,300011,300012,300013,300014,300015,300016,300017,300018,300019,300020,300021,300022,300024,300025,300027,300028,300029,300030,300031,300032,300033,300034,300035,300036,300037,300038,300039,300040,300041,300042,300043,300044,300045,300046,300047,300048,300049,300050,300051,300052,300053,300054,300055,300056,300057,300058,300059,300060,300061,300062,300063,300064,300065,300066,300068,300069,300070,300071,300072,300073,300074,300075,300076

Serienumre for berørte MX8000 Dual v. EXP-systemer

Systemkodenr. 728130, serienummer:

