


VIGTIG PRODUKTINFORMATION

Handelsnavn: Medela ladestation
Produktkode: REF 079.0037 (type 200.2233)
Sag: Manglende overholdelse af rengøringsretningslinjerne
Handlingstype: Information til forretningspartnere og brugere angående korrekt rengøring af ladestationer

Medela vil gerne gøre opmærksom på, at Thopaz ladestationer kan kortslutte, næste gang de tilsluttes strømforsyningen, såfremt de har været nedsænket i væske / rengørings- / desinfektionsmiddel. I enkelte tilfælde har dette resulteret i, at der har vist sig brændemærker på ydersiden af ladestationen. På baggrund af de modtagne oplysninger har dette ikke forårsaget skade på sygehuspersonale, patienter eller andre personer.

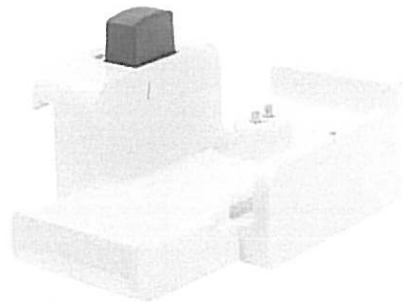

I henhold til den reviderede brugsanvisning er ladestationen et elektrisk apparat, der kun skal rengøres / desinficeres ved aftørring med en fugtig klud.

Alle produkter, der er leveret i perioden mellem januar 2008 og januar 2013 betragtes som værende berørt af denne produktinformation, såfremt rengøringsretningslinjerne ikke bliver fulgt. Denne meddelelse berører ingen øvrige Medela-produkter.

Som en øjeblikkelig korrigerende handling vil Medela kontakte alle forretningspartnere og brugere for at forsyne disse med de reviderede rengørings- / desinfektionsanvisninger og om nødvendigt instruere personalet i rengøring og desinfektion af apparatet.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om ovennævnte, er du altid velkommen til at kontakte Medela Switzerland (vigilance@medela.ch).

Baar, Schweiz, 15. februar, 2013



Marcel Felber
President
Medela AG



Markus Bütler
Vice-President Quality Management