

## Akut sikkerhedsmeddelelse

10815437

Juni 2013

### ADVIA® 120

#### Optic Cover Strut, SMN 10309266 (Gasstempelholdere til låg over optikken)

---

#### Problembeskrivelse

Siemens Healthcare Diagnostics henleder opmærksomheden på en mulig fejl ved ADVIA 120 Hæmatologi systemer. ADVIA 120's låg over optikken er placeret øverst på ADVIA 120 systemet. Når lågen åbnes, holdes det oppe af to gasstempler (SMN 10309266) i højre og venstre side. Over tid kan disse gasstempler miste deres virkning så de ikke mere kan holde lågen over optikken i åben position. Dette kan føre til at låget falder i mens vedligeholdelsesprocedurer udføres.

#### Helbredsrisiko

Der er ingen risiko for patienter. Brugeren kan blive ramt, hvis lågen falder i.

#### Instruktioner

Hvis jeres ADVIA 120 system viser problemer med at løfte og holde låget over optikken, kontakt straks Siemens Service for aftale om servicering af gasstemplerne. Hvis låget ikke vil blive i åben position, så undlad at udføre vedligeholdelsesprocedurer i det optiske område, indtil gasstemplerne er blevet udskiftet.

Siemens Service vil proaktivt udskifte gasstemplerne som en almindelig forebyggende vedligeholdelse, på baggrund af systemets alder.

Vi undskylder for eventuelle gener denne situation har forårsaget.

#### Varemærkeinformation

ADVIA er et Siemens Healthcare Diagnostics varemærke

---

#### Siemens Healthcare Diagnostics ApS.

Borupvang 5  
2750 Ballerup

[www.siemens.dk/diagnostics](http://www.siemens.dk/diagnostics)

Side 1 af 2

**FIELD CORRECTION EFFECTIVENESS CHECK**  
**ADVIA® 120 Hæmatologi system**

Optics Cover Struts, SMN 10309266

Med denne formular bekræftes modtagelsen af vedlagte Siemens Healthcare Diagnostics Akut sikkerhedsmeddelelse Juni 2013, omhandlende Optics Cover Struts (SMN 10309266). Læs venligst hvert spørgsmål og angiv det relevante svar. Fax den udfyldte formular til Siemens på nummeret angivet nederst.

1. Var informationen fyldestgørende?

Ja

Nej

Navn på personen der udfylder spørgeskemaet:

Titel:

Institution:

Instrument Serienummer:

Adresse:

By:

Tlf:

FAX FORMULAR I UDFYLDT STAND TIL:

Siemens Healthcare Diagnostics ApS

Fax: 4477 5839 att. René Hansen

---

**Siemens Healthcare Diagnostics ApS.**

Borupvang 5  
2750 Ballerup

[www.siemens.dk/diagnostics](http://www.siemens.dk/diagnostics)

Side 2 af 2