

Sikkerhedsmeddelse Invacare REA Focus – Information vedr. forhjulsofhæng

Dato: 12.3.2013

Ref: FSN40516

I henhold til gældende regler bedes du bekræfte modtagelse af denne skrivelse ved at maile/faxe medfølgende svarbrev tilbage til os

Hvilke produkter er berørt af denne information

Alle Invacare REA Focus kørestole fremstillet fra **november 2010 til november 2012**.

Alle produkterne er CE-mærkede i henhold til EU direktiv 93/42/EEC for medical devices.

Information om brugen af disse kørestole

Det er altid i Invacare's interesse at fremstille produkter, der er sikre at anvende, derfor informerer vi nu om, at vi har registreret nogle tilfælde, hvor et forhjulsofhæng har kunnet gå løs på denne type af kørestol. Der er altid en risiko ved anvendelse af en kørestol, hvor forhjulsofhænget er løst, derfor bedes du være særlig opmærksom på dette.

Risiko

Hvis skruerne til forhjulsofhænget går løs, kan kørestolen blive ustabil og mislyde vil fremkomme. Hvis man fortsætter med at anvende kørestolen på trods af dette, er der risiko for at forhjulsofhænget kan falde af, hvilket kan føre til at kørestolen tipper og brugeren kan komme til skade

Hvad skal jeg foretage mig:

1. Informer brugerne


Informér brugerne af Rea Focus om risikoen ved at anvende en kørestol, hvor forhjulsofhænget er gået løs. Hvis de oplever dette, skal fejlen rettes hurtigst muligt (skruerne spændes)

2. Service

Vær opmærksom på problemstillingen med forhjulsofhænget, når stolen er til service. Efterspænd de to skruer der holder forhjulsofhænget.

Invacare har på baggrund af dette opdateret bruger- og servicemanual. Du finder den på vores hjemmeside www.invacare.dk

Author :	A.Romann	Released :	T. Pradignac	Version :	02
Date :		Date:			

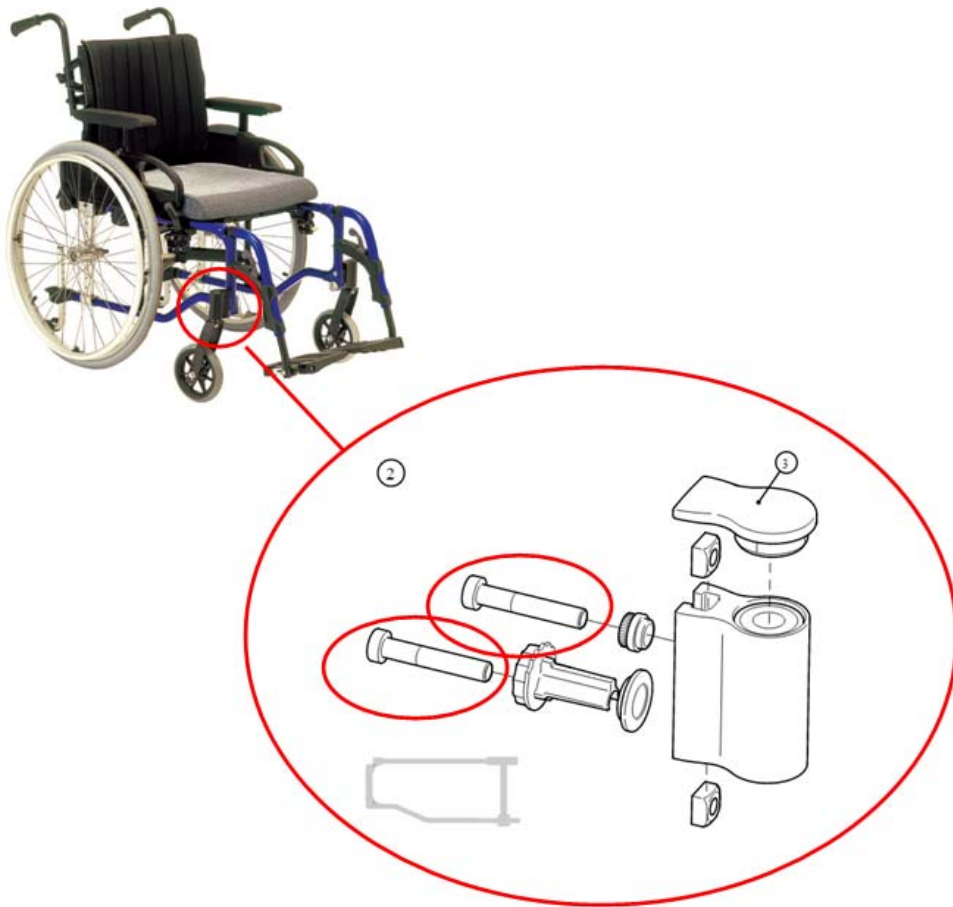

Vi bekræfter, at relevante myndigheder er informeret om denne bulletin. Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 4072 3773 eller pr. mail pkreuz@invacare.com

Med venlig hilsen
INVACARE A/S

Per Kreuz
Kvalitetschef
 Tlf. 4072 3773
pkreuz@invacare.com

Author :	A.Romann	Released :	T. Pradignac	Date :	Date:	Version :	02
----------	----------	------------	--------------	--------	-------	-----------	----



EF015 European Form	Field Safety Notice	Page 3 of 3
-------------------------------	----------------------------	-------------

SVARSEDEL Rea Focus

SÆT KRYDS

- Jeg har læst og forstået denne meddelelse
- Jeg har læst og forstået denne meddelelse, men vi har ikke mulighed for at finde brugerne af de pågældende produkter

Denne seddel faxes eller mailes tilbage til os **inden d. 1. maj 2013** på:

denmark@invacare.com

Fax: 3690 0001

UDFYLD NEDENSTÅENDE MED KONTAKTOPLYSNINGER

Venligst skriv tydeligt

Institution/Kommune:.....

Navn:.....

Tlf:..... E-mail:.....

Dato:.....

Underskrift:.....

På medfølgende fakturaer kan du se, hvilke produkter vi har registreret at have leveret til dig i den omtalte periode.

Author :	A.Romann	Released :	T. Pradignac	Version :	02
Date :		Date:			