



Servicemeddelelse vedr. strop på loftlift

Att.: Kunder/brugere/fagpersonale

Emne: Hændelse vedr. knækket strop på loftlift

Dato: 17.09.2013

Vi informerer hermed vore kunder samt fagpersonale, der måtte udføre eftersyn på forflytningshjælpemidler, da der i august 2013 har været en hændelse på en Luna loftlift, hvor løftestroppen er knækket, da den ikke er udskiftet rettidigt ved eftersyn. Vi ønsker i den forbindelse at påpege, at Ergolet ikke har kontraktligt samarbejde på eftersyn med pågældende kommune, hvor hændelsen er sket.

Vi vil i den forbindelse gøre vore kunder og fagpersonale opmærksom på, at risikoen for denne type hændelser vil kunne forekomme på alle personløftere med strop, i de tilfælde hvor eftersynet ikke udføres efter producentens anvisninger.

Følgende anvisning skal ved eftersyn følges ved gennemgang af strop:

- Stroppen tjekkes for slidtage. Den hvide inderkerne må ikke være synlig. Stroppen må ikke være 'krøllet' eller flosset.
- Alle syninger skal være intakte

Ved enhver form for mistanke om slidtage på strop – SKAL der foretages udskiftning af strop.

Det er således fagpersonens ansvar, at produktet efter eftersynet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og foretaget i overensstemmelse med producentens anvisning.

For at opnå højst mulig sikkerhed er det vigtigt, at man udfører det regelmæssige eller daglige tjek som er beskrevet i producentens brugervejledning.

Ergolet foreskriver i brugervejledningen for Luna loftlift en række daglige tjek – for strop er beskrevet:

- 'Løftestroppen på Luna kontrolleres for slid eller beskadigelse. Såfremt der er mistanke om en defekt skal Luna tages ud af drift'

Vi står naturligvis altid til rådighed, hvis der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Vi kan kontaktes på tlf.: 70 27 37 20 eller service@ergolet.dk

Ergolet ApS

Richard Christiansen

Teknisk Direktør