

<Dato>

PR1302180002

VIGTIG FELTSIKKERHEDSMEDDELELSE

«IA_Customer_Name»
«IA_Facility_Site»
«IA_Street_Address»
«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Vedrørende: DX-D 100: Sporadisk utilsigtet bevægelse**Produkt:** DX-D 100

Kære kunde,

Agfa HealthCare ønsker at gøre opmærksom på følgende oplysninger, som også er blevet meddelt til dit lands ansvarlige myndigheder.

Enhed

Denne sikkerhedsmeddelelse vedrører vores mobile DR-enhed "DX-D 100".

Vores arkiv viser, at du er en ejer af dette produkt.

En produktbeskrivelse findes på vores website:

- [DX-D 100 med trådløs detektor](#)
- [DX-D 100 med den kablede detektor.](#)

Problem

Nogle af vores kunder har for nylig oplevet sporadisk utilsigtet bevægelse, når den mobile enhed DX-D 100 køres.

Handlinger

Enheden er forsynet med en sikkerhedskontakt i kørehåndtaget. Hvis man slipper kørehåndtaget, stopper enheden.

I tilfælde af utilsigtet bevægelse bør man ikke forsøge at korrigere enhedens bevægelse ved hjælp af kørehåndtaget, men slippe håndtaget med det samme for at stoppe enheden.

Hvis man oplever utilsigtet bevægelse, skal enheden tages ud af drift. Du bedes underretten din Agfa-servicerepræsentant med det samme.

Vi beder dig om at give disse oplysninger videre til alle inden for din facilitet, der bør være opmærksomme på dem.

Vær venlig at udfylde feedbackformularen snarest muligt og sende den retur til os.

Hvis oplysningerne ovenfor ikke gælder for din facilitet eller enheden er blevet overført til en anden organisation, bedes du oplyse dette på den vedlagte feedbackformular og give denne vigtige feltsikkerhedsmeddelelse videre til den organisation, enheden er blevet overført til.

Vi siger tak, fordi du er meget opmærksom på dette problem og for din fortsatte støtte.

Har du spørgsmål om denne sag, bedes du kontakte den lokale Agfa HealthCare-organisation:

<Name of contact person> på <Tel>.

Med venlig hilsen

Paul Merckx, leder af QARA Imaging Business Division



<Dato>

PR1302180002

Agfa HealthCare NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
Belgien

<Dato>

PR1302180002

VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE
FEEDBACKFORMULAR

Vi beder dig venligst om at sende de vedlagte oplysninger tilbage snarest muligt.
Tak for dit samarbejde.

Navn på kunde/facilitet: «IA_Customer_Name» «IA_Facility_Site»

Adresse: «IA_Street_Address»

«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Meddelelsens reference: PR1302180002

Produktets reference: DX-D100

- Jeg bekræfter, at jeg har modtaget og forstået den vedlagte meddelelse.
- Denne meddelelse er ikke relevant for min facilitet.
- Enheden er blevet overført til en anden organisation.

Kunde

Navn:

Stilling:

Underskrift:

Dato:

Telefonnummer:

- Vær venlig at rette vores kontaktoplysninger som følger:

Navn på kunde/facilitet:

Adresse:

**Du bedes faxe den udfyldte formular til <fax no.>
eller e-maile os på <email address> med referencekoden ovenfor oplyst i emnelinjen**