

VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE TIL KUNDER

«IA_Customer_Name»
«IA_Facility_Site»
«IA_Street_Address»
«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Problemstilling: Løbekranens rør bevæger sig for hurtigt

Produkt: DX-D 600

Kære kunde.

Agfa HealthCare skal hermed gøre opmærksom på følgende oplysninger, der ligeledes er fremsendt til de relevante myndigheder i Danmark.

Enhed

Denne Sikkerhedsmeddelelse drejer sig om DR-enhed "DX-D 600".

Se venligst vores websted for en produktbeskrivelse → [DX-D 600](#)

(http://www.agfahealthcare.com/global/en/diagnostic_imaging/digital_radiography/dr_dx_d_600/index.jsp)

Problem

Enheden er udstyret med sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer bevægelse uden en aktiv handling fra brugerens side. Det kan dog i forbindelse med kranens normale bevægelse i enkelte tilfælde forekomme, at løbekranens rør bevæger sig for hurtigt.

Handlinger

I tilfælde af for hurtigt bevægelse skal knappen/pedalen omgående slippes for at stoppe enheden, og De bedes venligst informere Agfa HealthCares servicekontakt.

Nærværende meddelelse bedes fordelt til alle på institutionen, der nødvendigvis skal informeres om problemstillingen.

Det er vigtigt, at de handlinger, der beskrives i nærværende Vigtig sikkerhedsmeddelelse til kunder, igangsættes, og at De anerkender modtagelsen af samme.

Såfremt ovenstående oplysninger ikke måtte være relevante for Dem, eller hvis enheden er overført til en anden institution, bedes dette angives på vedhæftede feedbackskema, og nærværende Sikkerhedsmeddelelse videregives til den organisation, hvortil enheden er overført.

Vi takker for Deres opmærksomhed på problemet og fortsatte opbakning.

Kontakt venligst den lokale afdeling af Agfa HealthCare i tilfælde af spørgsmål vedrørende problemet: <Kontaktpersons navn> på <Tlf>.

Med venlig hilsen
Paul Merckx, Head of QARA Imaging Business Division



Agfa HealthCare NV

<Dato>

PR1305130018

Septestraat 27
B-2640 Mortsel
Belgium

<Dato>

PR1305130018

**VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE
FEEDBACKSKEMA**

Vedhæftede oplysninger bedes returneret til os så hurtigt som muligt. Tak for hjælpen.

Kundens/institutionen navn: «IA_Customer_Name» «IA_Facility_Site»

Adresse: «IA_Street_Address»

«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Meddelelsesreference: PR1305130018**Produktreference: DX-D600**

- Jeg bekræfter, at jeg har modtaget og forstår vedhæftede meddelelse.
- Meddelelsen er ikke relevant for denne institution.
- Enheden er overført til en anden institution. Indsæt venligst den anden institutions navn og adresse: _____.

Kunde

Navn: _____

Stilling: _____

Underskrift: _____

Dato: _____

Telefonnummer: _____

- Ret venligst vores kontaktoplysninger som følger:

Kundens/institutionen navn: _____

Adresse: _____

Det udfyldte skema faxes til <faxnr.>
eller sendes via mail til os på <mailadresse> med angivelse af den referencekode, der
er angivet i emnelinjen herover

Agfa HealthCare

[Indsæt adressen på den nationale/regionale juridiske enhed her] (fjern denne bemærkning fra det endelige dokument)

<Dato>

PR1305130018