

<Date>

PR1302180002
PR1403060003

VIGTIG FELTSIKKERHEDSMEDDELELSE

«IA_Customer_Name»
«IA_Facility_Site»
«IA_Street_Address»
«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Forsigtig: Digital radiografisk røntgensystem DX-D 100: Sporadisk utilsigtet bevægelse og potentielle problemer ved kørsel på ramper.

Kære kunde

Agfa HealthCare ønsker at gøre dig opmærksom på følgende, der ligeledes er videregivet til landets kompetente myndighed.

Enhed: DX-D 100 Mobil digital radiografisk system

Du er ifølge vores register ejer af dette produkt.
En produktbeskrivelse af DX-D 100 kan findes på vores [weBSITE](http://www.agfahealthcare.com/global/en/diagnostic_imaging/digital_radiography/dr_dx_d_100/index.jsp)
(http://www.agfahealthcare.com/global/en/diagnostic_imaging/digital_radiography/dr_dx_d_100/index.jsp).

Problem

Nogle af vore kunder har oplevet sporadiske, utilsigtede bevægelser eller ændrede kørselsegenskaber ved brug af DX-D 100-enheden. Dette opleves særligt ved ned- og opkørsel på ramper. Derudover har nogle kunder givet tilbagemelding om stivere eller langsommere kørselsegenskaber.

Handlinger

Denne enhed er forsynet med en sikkerhedskontakt i kørehåndtaget. Hvis du støder på et problem, bør kørehåndtaget slippes, så enheden standser.

Agfa arbejder på en designændring af den hard- og software, der styrer fremdrift og bremsning, og ligeledes på at forhindre utilsigtet bevægelse af enheden. Ændringerne har desuden til formål, at gøre det lettere at bevæge enheden og tilføre ekstra kraft til enheden ved op- og nedstigninger på ramper med en hældning på 5 grader eller derunder. Vi forventer, at der i løbet af de kommende uger vil være en opdatering tilgængelig og installeret.

Vi beder dig venligt videregive denne information lokalt på stedet til alle de, som det måtte være relevant for.

PR1302180002
PR1403060003

<Date>

Vi beder dig venligt yderligere om at udfylde og returnere feedback-formularen ved første given lejlighed.

Hvis ovenstående information ikke gør sig gældende på stedet, eller hvis enheden er blevet overført, bedes du venligt angive dette i feedback-formularen samt videregive denne Vigtig Feltsikkerhedsmeddelelse til det sted, hvor enheden er overført til.

Vi takker dig på forhånd for din opmærksomhed på dette problem og din fortsatte hjælp.

Skulle du have spørgsmål angående denne sag, bedes du venligt kontakte din lokale Agfa HealthCare-afdeling: <Name of contact person> på <Tel>.

Med venlig hilsen

Paul Merckx, chef for QARA Imaging Business Division



Agfa HealthCare NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
Belgien

<Date>

PR1302180002
PR1403060003



VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE FEEDBACK-FORMULAR

Vi beder dig venligst returnere den vedhæftede information ved første given lejlighed.
På forhånd tak

Kunde-/Stednavn: «IA_Customer_Name» «IA_Facility_Site»

Adresse: «IA_Street_Address»

«IA_City», «IA_State» «IA_Zip_Code»

Meddelelshenvisning: PR1302180002 og PR1403060003

Produkthenvisning: DX-D100

- Jeg bekræfter hermed, at jeg har modtaget og forstået vedhæftede meddelelse.
- Denne meddelelse vedrører ikke dette sted.
- Enheden er overført til andet sted.

Kunde

Navn:

Stillingsbetegnelse:

Underskrift:

Dato:

Telefonnummer:

- Ret venligt vores kontaktoplysninger, som følger:

Kunde-/Stednavn:

Adresse:

Fax den udfyldte formular til <fax no.>
eller send den elektronisk til <email address>, hvor ovenstående henvisningskode
bedes angives under Emne.

Agfa HealthCare

[Insert country/regional legal entity address here] (remove this guidance from final document)