

## VIGTIGT - Vigtig produktinformation *DigitalDiagnost*

### ***Udskiftning af lås til fodplade på DigitalDiagnost-Scoliosestativ til sammenføjning***

Kære kunde

Som en del af Philips' løbende fokus på pålidelighed og sikkerhed overvåger vi hele tiden vores produkters ydeevne. I forbindelse med nylige evalueringer af Philips DigitalDiagnost er vi blevet opmærksomme på et potentielt problem, som kan påvirke udstyrets ydeevne under bestemte forhold. Formålet med dette brev er at give dig oplysninger om:

- hvad problemet er, og under hvilke forhold det kan forekomme
- de handlinger, du kan foretage for at undgå eller minimere forekomsten af problemet
- de handlinger Philips har planlagt for at korrigere problemet.

**Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret fremover**

Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse.

Opbevar venligst en kopi af denne meddelelse sammen med udstyrets brugermanual.

Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette, er du velkommen til at kontakte Philips Healthcare Customer Care Center:

Telefon 80 30 30 35  
Email [philips.service@philips.com](mailto:philips.service@philips.com)

Vi undskylder for eventuel ulejlighed, dette måtte medføre, og håber, at disse oplysninger giver svar på eventuelle spørgsmål i tilstrækkeligt omfang.

Med venlig hilsen

Povl Pedersen

CS Branch Manager Denmark  
Philips Healthcare

## **VIGTIGT - Vigtig produktinformation** ***DigitalDiagnost***

### ***Udskiftning af lås til fodplade på DigitalDiagnost-Scoliosestativ til sammenføjning***


|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BERØRTE PRODUKTER</b>                        | DigitalDiagnost Scoliosestativ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BESKRIVELSE AF PROBLEMET</b>                 | <p>Krogen til sammenføjning af stativ og fodplade kan fastlåses i øverste position. Når klemmen (krogen) ikke er korrekt justeret i den korrekte stilling, holdes fodpladen ikke på plads. Hvis den falder ned, kan det skade operatørens eller patientens fod (f.eks. når stativet bevæges, eller når operatøren ikke sætter pladen ordentlig fast, når pladen flyttes opad).</p> <p>Følgende faktorer skal være til stede for at situationen opstår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krog, der ikke er korrekt justeret</li> <li>- Operatøren opdager ikke, at krogen ikke falder på plads med et klik</li> <li>- Stativet flyttes (køres på hjul)</li> <li>- Krog kan ikke holde</li> <li>- Fod i "farligt område"</li> </ul> |
| <b>MULIGE FARER</b>                             | Krogen holder ikke fodpladen ordentlig fast i lodret position. Derfor kan fodpladen falde eller svinge ned og kan skade operatøren eller patienten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER</b> | Alle stativer er berørt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## VIGTIGT - Vigtig produktinformation *DigitalDiagnost*

### ***Udskiftning af lås til fodplade på DigitalDiagnost-Scoliosestativ til sammenføjning***


**HANDLINGER, SOM  
SKAL FORETAGES AF  
KUNDEN/BRUGEREN**

Kunden/brugeren skal altid kontrollere, at kroge er placeret korrekt, og at kroge er låst. (Tryk kroge ned, indtil den er låst). Sørg for, at kroge er på plads, som vist på billedet med den grønne pil

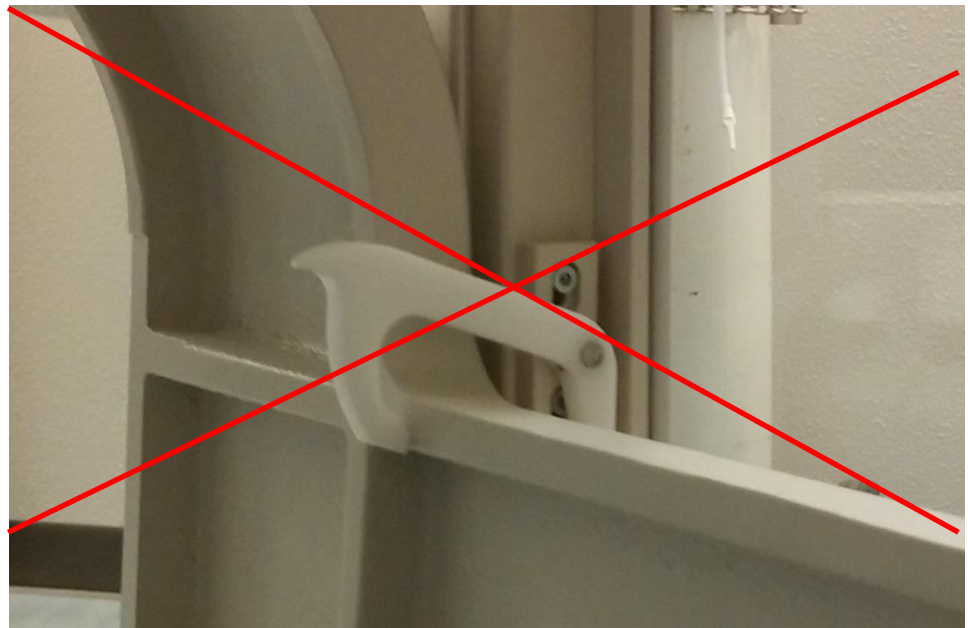

## VIGTIGT - Vigtig produktinformation *DigitalDiagnost*

### **Udskiftning af lås til fodplade på DigitalDiagnost-Scoliosestativ til sammenføjning**
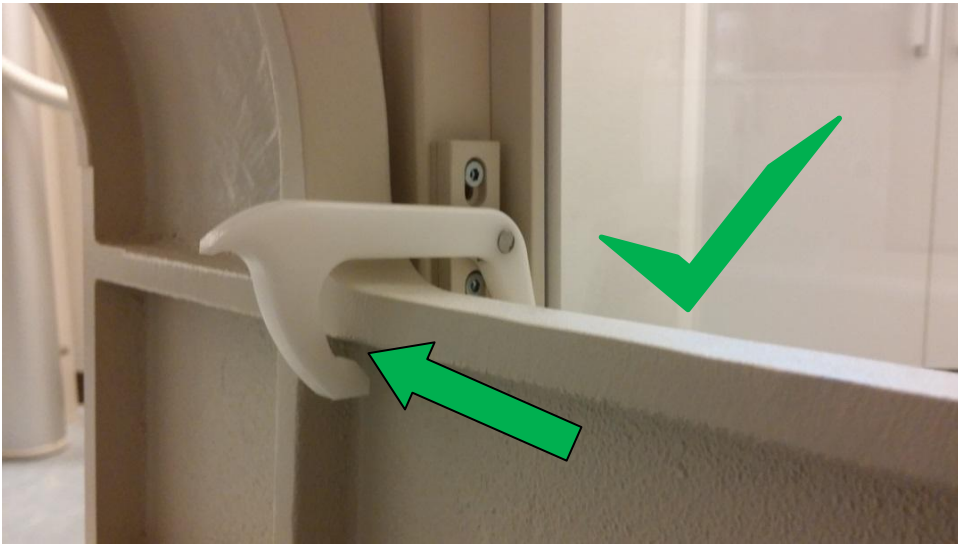
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS</b>                      | Philips planlægger at ændre designet på kuglelejerne og låsemekanismen. Du vil blive kontaktet af en tekniker fra Philips, så snart sættet med den korrigerende handling er klar til implementering. Hvis du har brug for at kommunikere med Philips i forbindelse med dette program, beder vi dig oplyse referencenummer FCO-71200111. |
| <b>YDERLIGERE INFORMATION OG SERVICE</b>                 | Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette, er du velkommen til at kontakte Philips Healthcare Customer Care Center:<br><br>Telefon           80 30 30 35<br>Email <a href="mailto:philips.service@philips.com">philips.service@philips.com</a>                                                  |