




Tillæg til driftsvejledning

Gældende for alle versioner af OP-bord TITAN

	FORSIGTIG Patientfare ved ukorrekt håndtering af fjernbetjening!
<p>Ved ukorrekt betjening af tastatur kan der ske en konstruktionsbetinget skade på en tast. En mekanisk defekt tast kan selvstændigt udløse den respektive OP-bordfunktion. Ved mistanke om et skadet tastatur skal fjernbetjeningen straks tages ud af drift! Hvis en skade på tastaturet overses og der sker en utilsigtet bordbevægelse, kan denne fejlbevægelse afbrydes på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none">• samtidig aktivering af to vilkårlige taster på fjernbetjeningen eller• aktivering af en vilkårlig tast på søjletastaturet <p>bibeholdelse af valgte tastetryk og samtidig fjerne den defekte fjernbetjening fra OP-bordets modtagelsesområde. Den defekte fjernbetjening pakkes sikkert og sendes retur til TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG i Saalfeld.</p>	

Vedlæg venligst denne anvisning permanent til den originale driftsvejledning.