

20. feb. 2014

HASTER – VIGTIG PRODUKTINFORMATION

TYPE AF HANDLING:	Tilbagekaldelse		
TELEFLEX-REFERENCE	001/13		
DE BERØRTE PRODUKTERS HANDELSNAVN:	Katalognummer	Partinummer	
Rusch Bronchopart®	116200	Se bilag 2	
Rusch Bronchopart®	116262		
Rusch Bronchopart® hvid	116201		
Rusch-bronkietube med enkeltlumen, højre	115901		
Rusch Tracheopart®	116401		

Kære kunde,

1. Detaljerede oplysninger om de berørte produkter

Teleflex har iværksat en frivillig sikkerhedsrelateret korrigerende handling for ovenstående produkter.

2. Beskrivelse af problemet

Teleflex tilbagekalder de herover anførte produkter, fordi vi har modtaget klager om, at Rusch Bronchopart® (116200) muligvis ikke lukker højre lunge korrekt af, fordi cuffen inflateres til den ene side. Hvis lungen ikke lukkes korrekt af, er der risiko for iltafmætning og tab af flygtige anæstetika, hvilket gør reintubation af patienten nødvendig.

3. VEJLEDNING I SIKKERHEDSRELATERET KORRIGERENDE HANDLING:**TILRÅDET HANDLING UDFØRT AF LÆGEPERSONALET**

1. Kontroller lagerbeholdningen for produktet, der er berørt af denne korrigerende handling. Brugerne skal ophøre med brug og distribution fra lageret af det berørte produkt og omgående sætte dette i karantæne.
2. Hvis produktet berørt af denne korrigerende handling i ovenstående tabel ikke findes i lagerbeholdningen, skal der sættes et kryds i den relevante rubrik på bekræftelsesformularen (bilag 1). Send formularen til det/den derpå nævnte faxnummer eller e-mailadresse.
3. Hvis det berørte produkt i ovenstående tabel findes i lagerbeholdningen, skal der sættes et kryds i den relevante rubrik på bekræftelsesformularen (bilag 1). Kontakt kundeservice ved at ringe til det i afsnit 6 nævnte telefonnummer for at få tildelt et returnummer. Skriv dette returnummer i den relevante rubrik på bekræftelsesformularen.
4. Udfyld "Bilag 1" for alle berørte produkter i lagerbeholdningen. Send denne formular til kundeservice øjeblikkeligt.
5. Teleflex (eller den lokale forhandler) vil udstede en kreditnota ved modtagelse af det returnerede berørte produkt.

VEJLEDNING TIL FORHANDLERE AF DET BERØRTE PRODUKT

1. Hvis De er en forhandler, skal De videresende denne vigtige produktinformation til alle de af Deres kunder, som har modtaget produktet berørt af denne korrigerende handling. Deres kunde skal herefter udfylde bekræftelsesformularen og returnere den til Dem.
2. Som forhandler skal De bekræfte over for Teleflex, at De har informeret alle de af Deres kunder, som har modtaget det berørte produkt. Når De har udført alle de påkrævede handlinger, skal De sende den udfyldte bekræftelsesformular til kundeservice.
3. Bemærk, at alle kompetente myndigheder i medlemsstaterne i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde/Schweiz (EØS/CH) og Tyrkiet, hvor Teleflex distribuerer direkte, får besked af Teleflex.
4. Hvis De er en forhandler og/eller har rapporteringsansvar inden for eller uden for EØS/CH/TK-området, bedes De underrette den lokale kompetente myndighed om denne handling. Videresend meddelelsen og al kommunikation med den lokale kompetente myndighed til Teleflex.

4. Teleflex

Teleflex informerer alle kunder, medarbejdere hos Teleflex og forhandlere om denne korrigerende handling.

5. Videresendelse af denne vigtige produktinformation

Denne produktinformation skal videresendes til alle i organisationen, der skal være opmærksomme på oplysningerne heri, eller til enhver organisation, hvortil de eventuelt påvirkede produkter er blevet videresendt. Slutbrugere, klinikere, risikoledere, forsyningskæde-/distributionscentre osv. skal også tages i betragtning i forbindelse med videregivelsen af denne produktinformation.

Sørg for, at alle er opmærksomme på denne produktinformation, indtil organisationen har udført alle krævede handlinger.

6. Kontaktperson

Hvis De ønsker yderligere oplysninger eller support i forbindelse med ovenstående, bedes De kontakte:

Kundeservice:

Kontakt: Shane Kenny

FAX: +353 (0)1 4370773

Telefon: +353 (0)90 6460869

E-mail: orders.intl@teleflex.com

Teleflex bestræber sig på at levere sikre og effektive produkter af høj kvalitet. Vi beklager den ulempe, som denne handling måtte forårsage.

For og på vegne af Teleflex,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty

Senior Director of Quality International.

**SIKKERHESRELATERET KORRIGERENDE HANDLING
BEKRÆFTELSESFOMULAR**

**KORRIGERENDE HANDLING FOR PRODUKT - TELEFLEX
ØJEBLIKkelig OPMÆRKSOMHED PÅKRÆVET**

SEND OMGÅENDE DEN UDFYLDTE FORMULAR TILBAGE TIL:
FAX: +353 (0)1 4370773 E-mail: orders.intl@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Vi bekræfter modtagelse af denne vigtige produktinformation og har udført de handlinger, der kræves heri. Vi bekræfter, at vores lagerbeholdning IKKE omfatter produkter, der er berørt af denne korrigerende handling.	<input type="checkbox"/> Vi bekræfter modtagelse af denne vigtige produktinformation og har udført de handlinger, der kræves heri. Vi bekræfter, at vores lagerbeholdning omfatter produkter, der er berørt af denne korrigerende handling. Brug og yderligere distribution af de berørte produkter er bragt til ophør. Alle produkter er tilbageholdt, og nedenstående antal vil blive returneret. Returgodkendelse nr. _____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKRIV VENLIGST PRODUKTANTALLET OG -NUMMERET TYDELIGT

DE BERØRTE PRODUKTERS HANDELSNAVN:	Rusch Bronchopart® / Rusch Bronchopart® hvid/ Rusch Tracheopart® / Rusch-bronkietube med enkeltlumen, højre	
PRODUKTNUMMER	PARTINUMMER	ANTAL
<ul style="list-style-type: none"> • Vedlæg en kopi af den udfyldte bekræftelsesformular i returpakken med de tilbagesendte enheder. • Sørg for, at RAN-nummeret (returgodkendelsesnummeret) ses tydeligt på returpakken. • Mærk returvarerne "Field Action Returns". 		

Udfyld denne bekræftelsesformular, og send den omgående tilbage til ovenstående faxnummer eller e-mailadresse.

INSTITUTIONENS NAVN (FX NAVN PÅ HOSPITAL, SUNDHEDSPLEJEORGANISATION)	
INSTITUTIONENS ADRESSE	Telefon / Fax
FORMULAR UDFYLDT AF:	TITEL/STILLING
DATO:	

Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer
116200260,09LE51	115901-000065,09JE44	116200-000260,09HE34	116200-000280,10BE07
116200280,09HE34	115901-000065,09LE51	116200-000260,09HE34	116200-000280,10BE09
116200280,09JE41	115901-000065,09LE51	116200-000260,09HE34	116200-000280,10DE16
116200280,09JE41	115901-000065,10BE06	116200-000260,09HE34	116200-000280,10JE41
116200350,09HE34	115901-000065,10DE16	116200-000260,09JE41	116200-000280,10JE41
116200350,09JE42	115901-000065,10LE52	116200-000260,09JE41	116200-000280,10LE52
116200350,09JE42	115901-000065,11GE27	116200-000260,09LE51	116200-000280,10LE52
116200350,09JE42	115901-000065,11GE28	116200-000260,09LE51	116200-000280,10LE52
116200350,09JE42	115901-000065,11GE28	116200-000260,09LE51	116200-000280,11AE04
116200350,09JE42	115901-000065,11IE37	116200-000260,10AE04	116200-000280,11AE04
116200350,09JE42	115901-000065,11JE41	116200-000260,10AE04	116200-000280,11AE04
116200350,09JE42	115901-000065,11KE47	116200-000260,10GE30	116200-000280,11AE04
116200350,09JE42	115901-000065,12AE01	116200-000260,10JE41	116200-000280,11HE33
116200350,09JE43	115901-000065,12DE16	116200-000260,11AE04	116200-000280,11IE38
116200370,09JE41	115901-000065,12DE17	116200-000260,11AE04	116200-000280,11JE41
116200370,09JE41	115901-000065,12IE37	116200-000260,11GE29	116200-000280,11JE44
116200370,09JE41	115901-000065,12KE47	116200-000260,11GE29	116200-000280,11LE51
116200370,09JE41	115901-000065,13AT36	116200-000260,11JE44	116200-000280,12AE03
116200370,09JE41	115901-000065,13FT06	116200-000260,11LE51	116200-000280,12AE03
116200370,09JE41	115901-000080,09GE31	116200-000260,12AE03	116200-000280,12CE12
116200370,09JE41	115901-000080,09GE31	116200-000260,12AE03	116200-000280,12EE22
116200370,09JE41	115901-000080,09JE44	116200-000260,12EE20	116200-000280,12GE27
116200370,09JE43	115901-000080,10AE02	116200-000260,12GE27	116200-000280,12GE30
116200370,09JE43	115901-000080,10BE06	116200-000260,12KE47	116200-000280,12IE38
116200370,09JE43	115901-000080,10GE30	116200-000260,12LE49	116200-000280,12KE45
116200370,09JE43	115901-000080,10KE48	116200-000260,13AE01	116200-000280,12KE48
116200390,09HE35	115901-000080,11AE04	116200-000260,13BT25	116200-000280,13AT36
116200390,09JE42	115901-000080,11GE27	116200-000260,13DT30R	116200-000280,13BT37
116200390,09JE42	115901-000080,11GE28	116200-000260,13DT32	116200-000280,13CT26
116200390,09JE42	115901-000080,11GE28	116200-000260,13FT12	116200-000280,13DT30
116200390,09JE42	115901-000080,11GE28	116200-000260,13GE29J	116200-000280,13DT30R
116200390,09JE42	115901-000080,11IE38	116200-000260,13GT29	116200-000280,13DT32
116200390,09JE43	115901-000080,11JE41	116200-000260,13HT12	116200-000280,13FT06
116200390,09JE44	115901-000080,12AE01	116200-000260,13HT17	116200-000280,13FT12
116200390,09KE46	115901-000080,12BE08	116200-000280,09HE34	116200-000280,13GE29J
116200390,09LE51	115901-000080,12EE21	116200-000280,09HE34	116200-000280,13HT12
116200410,09IE36	115901-000080,12EE22	116200-000280,09HE34	116200-000280,13HT17
116200410,09JE43	115901-000080,12GE28	116200-000280,09HE34	116200-000350,0914M
116201350,09JE40	115901-000080,12HE32	116200-000280,09HE34	116200-000350,0914M
116201390,09JE44	115901-000080,12JE43	116200-000280,09JE41	116200-000350,0914M
115901-000065,09HE32	115901-000080,12KE46	116200-000280,09KE45	116200-000350,0914M
115901-000065,09HE32	115901-000080,13AT44	116200-000280,09KE45	116200-000350,0914M
115901-000065,09HE32	115901-000080,13BT44	116200-000280,09KE46	116200-000350,0915M
115901-000065,09HE32	115901-000080,13GT16	116200-000280,09KE46	116200-000350,0915M
115901-000065,09HE32	116200-000260,09HE34	116200-000280,09KE46	116200-000350,0915M
115901-000065,09JE44	116200-000260,09HE34	116200-000280,09LE51	116200-000350,0916M
115901-000065,09JE44	116200-000260,09HE34	116200-000280,09LE51	116200-000350,0916M

Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer
116200-000350,0917M	116200-000350,10FE24	116200-000350,12KE46	116200-000370,0919M
116200-000350,0917M	116200-000350,10FE24	116200-000350,12LE51	116200-000370,0919M
116200-000350,0917M	116200-000350,10FE25	116200-000350,13AE01	116200-000370,0921M
116200-000350,0917M	116200-000350,10GE28	116200-000350,13AE02	116200-000370,0921M
116200-000350,0918M	116200-000350,10LE49	116200-000350,13BT19	116200-000370,0922M
116200-000350,0918M	116200-000350,10LE51	116200-000350,13BT25	116200-000370,0922M
116200-000350,0918M	116200-000350,10LE51	116200-000350,13DT25	116200-000370,09FE24
116200-000350,0918M	116200-000350,10LE51	116200-000350,13DT30	116200-000370,09GE31
116200-000350,0919M	116200-000350,10LE51	116200-000350,13DT32	116200-000370,09GE31
116200-000350,0919M	116200-000350,10LE51	116200-000350,13DT33	116200-000370,09GE31
116200-000350,0922M	116200-000350,10LE51	116200-000350,13DT33	116200-000370,09GE31
116200-000350,0922M	116200-000350,10LE51	116200-000350,13DT34	116200-000370,09GE31
116200-000350,09FE23	116200-000350,11AE03	116200-000350,13DT35	116200-000370,09GE31
116200-000350,09FE23	116200-000350,11AE03	116200-000350,13ET12	116200-000370,09GE31
116200-000350,09FE25	116200-000350,11AE03	116200-000350,13ET13	116200-000370,09HE32
116200-000350,09FE25	116200-000350,11AE03	116200-000350,13ET18	116200-000370,09HE32
116200-000350,09GE31	116200-000350,11DE15	116200-000350,13GE28J	116200-000370,09HE33
116200-000350,09GE31	116200-000350,11DE15	116200-000350,13GT05	116200-000370,09HE33
116200-000350,09HE34	116200-000350,11DE15	116200-000350,13GT11	116200-000370,09HE33
116200-000350,09HE34	116200-000350,11DE15	116200-000350,13GT23	116200-000370,09HE34
116200-000350,09HE34	116200-000350,11GE27	116200-000350,13GT29	116200-000370,09HE35
116200-000350,09JE43	116200-000350,11GE27	116200-000350,13HT07	116200-000370,09IE38
116200-000350,09JE43	116200-000350,11GE27	116200-000350,13HT12	116200-000370,09JE43
116200-000350,09JE43	116200-000350,11GE27	116200-000350,13HT12	116200-000370,09KE47
116200-000350,09JE44	116200-000350,11GE30	116200-000350,13HT17	116200-000370,09KE47
116200-000350,09JE44	116200-000350,11HE33	116200-000370,0914M	116200-000370,09LE51
116200-000350,09KE45	116200-000350,11IE39	116200-000370,0914M	116200-000370,09LE51
116200-000350,09KE45	116200-000350,11JE43	116200-000370,0914M	116200-000370,09LE51
116200-000350,09KE47	116200-000350,11JE44	116200-000370,0914M	116200-000370,10AE03
116200-000350,09KE47	116200-000350,11LE49	116200-000370,0914M	116200-000370,10BE06
116200-000350,09KE47	116200-000350,12AE01	116200-000370,0914M	116200-000370,10BE06
116200-000350,09KE47	116200-000350,12AE02	116200-000370,0914M	116200-000370,10BE06
116200-000350,09KE47	116200-000350,12AE03	116200-000370,0914M	116200-000370,10BE06
116200-000350,09KE47	116200-000350,12AE03	116200-000370,0914M	116200-000370,10BE06
116200-000350,09KE47	116200-000350,12BE07	116200-000370,0914M	116200-000370,10BE06
116200-000350,09LE51	116200-000350,12CE10	116200-000370,0914M	116200-000370,10BE06
116200-000350,09LE51	116200-000350,12DE17	116200-000370,0915M	116200-000370,10DE15
116200-000350,10AE03	116200-000350,12EE19	116200-000370,0915M	116200-000370,10DE16
116200-000350,10AE03	116200-000350,12EE22	116200-000370,0915M	116200-000370,10DE17
116200-000350,10BE06	116200-000350,12FE25	116200-000370,0915M	116200-000370,10EE20
116200-000350,10BE06	116200-000350,12FE25	116200-000370,0916M	116200-000370,10EE20
116200-000350,10DE15	116200-000350,12FE26	116200-000370,0916M	116200-000370,10EE22
116200-000350,10DE15	116200-000350,12GE27	116200-000370,0916M	116200-000370,10FE24
116200-000350,10DE17	116200-000350,12GE29	116200-000370,0916M	116200-000370,10FE24
116200-000350,10DE17	116200-000350,12HE32	116200-000370,0917M	116200-000370,10GE28
116200-000350,10EE22	116200-000350,12HE35	116200-000370,0917M	116200-000370,10GE28
116200-000350,10FE24	116200-000350,12KE45	116200-000370,0917M	116200-000370,10KE48

Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer
116200-000370,10KE48	116200-000370,12HE33	116200-000390,0922M	116200-000390,10JE41
116200-000370,10KE48	116200-000370,12JE40	116200-000390,09FE23	116200-000390,10KE46
116200-000370,10LE49	116200-000370,12JE44	116200-000390,09FE23	116200-000390,10KE46
116200-000370,10LE49	116200-000370,12KE45	116200-000390,09FE23	116200-000390,10KE46
116200-000370,10LE52	116200-000370,12KE47	116200-000390,09FE23	116200-000390,10KE46
116200-000370,10LE52	116200-000370,12KE48	116200-000390,09FE23	116200-000390,10LE52
116200-000370,11AE03	116200-000370,12LE48	116200-000390,09FE23	116200-000390,10LE52
116200-000370,11BE09	116200-000370,12LE49	116200-000390,09FE24	116200-000390,11DE14
116200-000370,11BE09	116200-000370,13AE01	116200-000390,09FE24	116200-000390,11DE14
116200-000370,11BE09	116200-000370,13B729	116200-000390,09HE32	116200-000390,11DE14
116200-000370,11DE16	116200-000370,13BT25	116200-000390,09HE32	116200-000390,11DE14
116200-000370,11DE16	116200-000370,13BT29	116200-000390,09HE32	116200-000390,11DE14
116200-000370,11DE16	116200-000370,13BT44	116200-000390,09HE33	116200-000390,11DE15
116200-000370,11DE16	116200-000370,13DT26	116200-000390,09HE33	116200-000390,11EE19
116200-000370,11GE27	116200-000370,13DT26	116200-000390,09HE33	116200-000390,11EE19
116200-000370,11GE27	116200-000370,13DT30	116200-000390,09HE35	116200-000390,11EE19
116200-000370,11GE27	116200-000370,13DT30R	116200-000390,09JE43	116200-000390,11EE19
116200-000370,11GE27	116200-000370,13DT33	116200-000390,09JE43	116200-000390,11FE26
116200-000370,11GE27	116200-000370,13ET12	116200-000390,09JE43	116200-000390,11FE26
116200-000370,11GE28	116200-000370,13ET13	116200-000390,09JE44	116200-000390,11FE26
116200-000370,11GE28	116200-000370,13ET13	116200-000390,09KE46	116200-000390,11GE27
116200-000370,11GE29	116200-000370,13ET23	116200-000390,09LE52	116200-000390,11GE27
116200-000370,11GE30	116200-000370,13ET23	116200-000390,09LE52	116200-000390,11GE28
116200-000370,11GE31	116200-000370,13FT17	116200-000390,09LE52	116200-000390,11GE30
116200-000370,11HE32	116200-000370,13GE28J	116200-000390,10AE01	116200-000390,11GE31
116200-000370,11HE33	116200-000370,13GT05	116200-000390,10AE01	116200-000390,11HE33
116200-000370,11IE37	116200-000370,13GT16	116200-000390,10AE01	116200-000390,11IE038
116200-000370,11IE38	116200-000370,13HT12	116200-000390,10AE02	116200-000390,11IE37
116200-000370,11IE39	116200-000390,0914M	116200-000390,10BE09	116200-000390,11IE38
116200-000370,11IE39	116200-000390,0914M	116200-000390,10BE09	116200-000390,11JE42
116200-000370,11JE43	116200-000390,0914M	116200-000390,10CE10	116200-000390,11JE44
116200-000370,11KE48	116200-000390,0914M	116200-000390,10CE10	116200-000390,11KE48
116200-000370,12AE01	116200-000390,0914M	116200-000390,10CE11	116200-000390,11LE49
116200-000370,12AE03	116200-000390,0915M	116200-000390,10CE11	116200-000390,11LE49
116200-000370,12AE03	116200-000390,0915M	116200-000390,10DE15	116200-000390,12AE03
116200-000370,12BE06	116200-000390,0916M	116200-000390,10DE16	116200-000390,12AE03
116200-000370,12CE10	116200-000390,0916M	116200-000390,10DE16	116200-000390,12BE08
116200-000370,12DE14	116200-000390,0917M	116200-000390,10DE18	116200-000390,12BE09
116200-000370,12DE15	116200-000390,0917M	116200-000390,10EE19	116200-000390,12CE11
116200-000370,12DE16	116200-000390,0918M	116200-000390,10FE26	116200-000390,12CE12
116200-000370,12EE19	116200-000390,0922M	116200-000390,10FE26	116200-000390,12CE13
116200-000370,12EE20	116200-000390,0922M	116200-000390,10FE26	116200-000390,12DE15
116200-000370,12EE22	116200-000390,0922M	116200-000390,10GE29	116200-000390,12DE16
116200-000370,12FE24	116200-000390,0922M	116200-000390,10GE29	116200-000390,12EE19
116200-000370,12GE28	116200-000390,0922M	116200-000390,10GE29	116200-000390,12GE28
116200-000370,12GE29	116200-000390,0922M	116200-000390,10JE41	116200-000390,12HE32
116200-000370,12GE30	116200-000390,0922M	116200-000390,10JE41	116200-000390,12IE38

Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer
116200-000390,12JE43	116200-000410,09HE32	116200-000410,11GE27	116200260,11JE42
116200-000390,12KE45	116200-000410,09IE36	116200-000410,11GE27	116200260,12DE17
116200-000390,12KE46	116200-000410,09JE44	116200-000410,11GE27	116200260,12DE17
116200-000390,12LE49	116200-000410,09JE44	116200-000410,11GE27	116200260,12EE19
116200-000390,13AE01	116200-000410,09JE44	116200-000410,11GE28	116200260,12IE37
116200-000390,13AE02	116200-000410,09JE44	116200-000410,11GE30	116200260,13CT26
116200-000390,13AT36	116200-000410,09KE45	116200-000410,11HE34	116200260,13DT32
116200-000390,13BT25	116200-000410,09LE52	116200-000410,11HE34	116200260,13ET13R
116200-000390,13BT25	116200-000410,09LE52	116200-000410,11JE43	116200280,10BE07
116200-000390,13BT37	116200-000410,09LE52	116200-000410,11KE48	116200280,10BE07
116200-000390,13DT25	116200-000410,10AE05	116200-000410,12AE02	116200280,10BE07
116200-000390,13DT30R	116200-000410,10BE06	116200-000410,12AE03	116200280,10BE07
116200-000390,13DT33	116200-000410,10BE06	116200-000410,12AE03	116200280,11HE33
116200-000390,13ET12	116200-000410,10BE06	116200-000410,12BE07	116200280,11HE33
116200-000390,13ET13	116200-000410,10DE15	116200-000410,12CE11	116200280,11JE41
116200-000390,13ET13	116200-000410,10DE17	116200-000410,12DE18	116200280,12BE07
116200-000390,13FT12	116200-000410,10EE19	116200-000410,12EE20	116200280,12DE17
116200-000390,13FT12	116200-000410,10EE20	116200-000410,12EE22	116200280,13CT26
116200-000390,13FT18	116200-000410,10EE20	116200-000410,12FE24	116200280,13DT26
116200-000390,13GE28J	116200-000410,10EE22	116200-000410,12FE25	116200280,13ET12
116200-000390,13GT16	116200-000410,10FE23	116200-000410,12FE26	116200280,13ET12R
116200-000390,13GT29	116200-000410,10FE24	116200-000410,12GE28	116200350,11AE03
116200-000390,13HT12	116200-000410,10GE28	116200-000410,12IE37	116200350,11AE03
116200-000390,13HT12	116200-000410,10GE28	116200-000410,12IE39	116200350,11DE15
116200-000410,0914M	116200-000410,10JE41	116200-000410,12JE43	116200350,11DE15
116200-000410,0914M	116200-000410,10JE41	116200-000410,12KE45	116200350,11GE27
116200-000410,0914M	116200-000410,10JE41	116200-000410,12KE46	116200350,11JE42
116200-000410,0915M	116200-000410,10JE41	116200-000410,12LE49	116200350,11JE43
116200-000410,0915M	116200-000410,10KE46	116200-000410,12LE51	116200350,12AE02
116200-000410,0915M	116200-000410,10KE47	116200-000410,13AE02	116200350,12BE07
116200-000410,0918M	116200-000410,10KE47	116200-000410,13AT02	116200350,12DE17
116200-000410,0918M	116200-000410,10KE47	116200-000410,13AT28	116200350,12DE17
116200-000410,0918M	116200-000410,10KE47	116200-000410,13BT19	116200350,12DE17
116200-000410,0922M	116200-000410,10LE51	116200-000410,13BT25	116200350,12EE19
116200-000410,0922M	116200-000410,10LE51	116200-000410,13DT26	116200350,12GE27
116200-000410,0922M	116200-000410,10LE51	116200-000410,13DT30R	116200350,12HE33
116200-000410,0922M	116200-000410,10LE52	116200-000410,13DT31	116200350,13AE01
116200-000410,09FE23	116200-000410,10LE52	116200-000410,13ET12	116200350,13CT26
116200-000410,09FE23	116200-000410,10LE52	116200-000410,13ET18	116200350,13DT33
116200-000410,09FE23	116200-000410,11AE04	116200-000410,13FT12	116200350,13DT33
116200-000410,09FE23	116200-000410,11AE04	116200-000410,13GE30J	116200350,13ET12
116200-000410,09FE23	116200-000410,11AE04	116200-000410,13GT11	116200350,13FT12R
116200-000410,09FE23	116200-000410,11AE04	116200-000410,13GT24	116200350,13FT12R
116200-000410,09FE23	116200-000410,11AE04	116200-000410,13GT29	116200350,13GT11
116200-000410,09FE23	116200-000410,11AE04	116200-000410,13HT12	116200350,13HT07
116200-000410,09GE31	116200-000410,11de15	116200-000410,13HT17	116200370,11DE15
116200-000410,09HE32	116200-000410,11DE16	116200260,10GE31	116200370,11EE20

Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer
116200370,11EE20	116200390,11IE37	116200410,13ET12R	116201-000350,10GE29
116200370,11GE27	116200390,11IE37	116200410,13ET12R	116201-000350,10GE30
116200370,11GE27	116200390,11IE38	116200410,13ET12R	116201-000350,10GE30
116200370,11GE27	116200390,11IE39	116200410,13ET12R	116201-000350,10KE48
116200370,11HE32	116200390,11IE39	116200410,13ET12R	116201-000350,10KE48
116200370,11IE39	116200390,11IE39	116200410,13ET13R	116201-000350,10LE52
116200370,11JE42	116200390,11JE42	116201350,11JE40	116201-000350,11GE31
116200370,11JE43	116200390,11JE42	116201350,13FT12R	116201-000350,11JE40
116200370,12AE01	116200390,12EE19	116201350,13GT05	116201-000350,11JE42
116200370,12AE01	116200390,12JE44	116201390,10CE10	116201-000350,11JE44
116200370,12AE03	116200390,13AT36	116201390,10DE18	116201-000350,12BE08
116200370,12AE03	116200390,13AT36	116201410,10KE47	116201-000350,12DE15
116200370,12BE06	116200390,13BT25	116201-000350,0919M	116201-000350,12EE22
116200370,12BE06	116200390,13BT29	116201-000350,0919M	116201-000350,12GE30
116200370,12DE18	116200390,13BT37	116201-000350,0921M	116201-000350,12HE32
116200370,12DE18	116200390,13BT44	116201-000350,0921M	116201-000350,12IE36
116200370,12DE18	116200390,13CT26	116201-000350,0921M	116201-000350,12IE37
116200370,12GE31	116200390,13DT33	116201-000350,0921M	116201-000350,12JE43
116200370,12IE39	116200390,13ET12	116201-000350,0921M	116201-000350,12KE47
116200370,12IE39	116200390,13ET12	116201-000350,0921M	116201-000350,12LE49
116200370,12JE44	116200390,13ET12	116201-000350,0921M	116201-000350,13AE01
116200370,12JE44	116200390,13ET12	116201-000350,0922M	116201-000350,13AT44
116200370,13AT44	116200390,13HT12	116201-000350,09FE23	116201-000350,13DT25
116200370,13BT44	116200410,10AE05	116201-000350,09FE23	116201-000350,13DT26
116200370,13CT26	116200410,10BE06	116201-000350,09FE23	116201-000350,13DT30
116200370,13ET13	116200410,10DE16	116201-000350,09FE23	116201-000350,13DT30
116200370,13ET13	116200410,10GE28	116201-000350,09FE24	116201-000350,13ET12
116200370,13ET13	116200410,10JE41	116201-000350,09HE32	116201-000350,13ET23
116200370,13ET13	116200410,10JE41	116201-000350,09HE32	116201-000350,13FT17
116200370,13ET13R	116200410,11DE15	116201-000350,09HE32	116201-000350,13GT05
116200370,13ET13R	116200410,11GE27	116201-000350,09HE33	116201-000350,13GT24
116200370,13ET13R	116200410,11HE34	116201-000350,09HE33	116201-000350,13HT07
116200390,10AE01	116200410,11HE34	116201-000350,09HE33	116201-000350,13HT12
116200390,10AE02	116200410,11HE34	116201-000350,09HE33	116201-000350,13HT12
116200390,10CE11	116200410,11HE34	116201-000350,09JE43	116201-000350,13HT17
116200390,10DE18	116200410,11JE43	116201-000350,09KE47	116201-000370,0915M
116200390,10DE18	116200410,11JE43	116201-000350,09KE47	116201-000370,0915M
116200390,10EE19	116200410,12AE03	116201-000350,09LE51	116201-000370,0915M
116200390,10EE19	116200410,12BE07	116201-000350,10AE04	116201-000370,0915M
116200390,10EE20	116200410,12BE07	116201-000350,10BE06	116201-000370,0915M
116200390,10GE29	116200410,12BE07	116201-000350,10BE06	116201-000370,0915M
116200390,10GE29	116200410,13BT44	116201-000350,10DE15	116201-000370,0915M
116200390,10JE41	116200410,13DT32	116201-000350,10DE18	116201-000370,0917M
116200390,10JE41	116200410,13DT32	116201-000350,10DE18	116201-000370,0917M
116200390,11DE15	116200410,13ET12	116201-000350,10FE24	116201-000370,0917M
116200390,11GE30	116200410,13ET12R	116201-000350,10FE24	116201-000370,0917M
116200390,11HE33	116200410,13ET12R	116201-000350,10FE24	116201-000370,0917M

Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer
116201-000370,0917M	116201-000370,10LE52	116201-000370,13AT36	116201-000390,10CE10
116201-000370,0919M	116201-000370,10LE52	116201-000370,13AT44	116201-000390,10GE29
116201-000370,0919M	116201-000370,10LE52	116201-000370,13BT37	116201-000390,10GE29
116201-000370,0922M	116201-000370,11AE04	116201-000370,13DT30	116201-000390,10GE29
116201-000370,09FE24	116201-000370,11AE04	116201-000370,13DT32	116201-000390,10GE29
116201-000370,09FE24	116201-000370,11AE04	116201-000370,13ET18	116201-000390,10JE43
116201-000370,09FE24	116201-000370,11AE04	116201-000370,13ET23	116201-000390,10JE43
116201-000370,09GE28	116201-000370,11AE04	116201-000370,13FT06	116201-000390,10JE43
116201-000370,09GE28	116201-000370,11AE04	116201-000370,13GT11	116201-000390,10JE43
116201-000370,09GE28	116201-000370,11AE04	116201-000370,13GT29	116201-000390,10LE51
116201-000370,09GE28	116201-000370,11AE04	116201-000370,13HT12	116201-000390,10LE51
116201-000370,09HE33	116201-000370,11EE19	116201-000370,13HT17	116201-000390,10LE51
116201-000370,09HE33	116201-000370,11EE19	116201-000390,0914M	116201-000390,10LE51
116201-000370,09HE33	116201-000370,11EE19	116201-000390,0914M	116201-000390,11BE09
116201-000370,09IE36	116201-000370,11EE19	116201-000390,0917M	116201-000390,11BE09
116201-000370,09IE36	116201-000370,11EE19	116201-000390,0917M	116201-000390,11BE09
116201-000370,09IE36	116201-000370,11EE19	116201-000390,0917M	116201-000390,11BE09
116201-000370,09IE36	116201-000370,11EE19	116201-000390,0917M	116201-000390,11BE09
116201-000370,09IE36	116201-000370,11GE31	116201-000390,0917M	116201-000390,11BE09
116201-000370,09JE43	116201-000370,11HE32	116201-000390,0917M	116201-000390,11FE25
116201-000370,09KE45	116201-000370,11IE37	116201-000390,0917M	116201-000390,11FE25
116201-000370,09KE47	116201-000370,11IE38	116201-000390,0917M	116201-000390,11FE25
116201-000370,09KE47	116201-000370,11IE38	116201-000390,0917M	116201-000390,11FE25
116201-000370,09KE47	116201-000370,11JE40	116201-000390,0917M	116201-000390,11FE25
116201-000370,09LE51	116201-000370,11JE41	116201-000390,0917M	116201-000390,11FE25
116201-000370,10AE04	116201-000370,11KE45	116201-000390,0917M	116201-000390,11FE25
116201-000370,10BE06	116201-000370,12AE01	116201-000390,0917M	116201-000390,11FE25
116201-000370,10BE06	116201-000370,12AE01	116201-000390,0922M	116201-000390,11FE25
116201-000370,10BE06	116201-000370,12AE03	116201-000390,09HE33	116201-000390,11FE25
116201-000370,10BE06	116201-000370,12BE08	116201-000390,09HE33	116201-000390,11FE25
116201-000370,10BE06	116201-000370,12CE11	116201-000390,09HE33	116201-000390,11GE28
116201-000370,10EE20	116201-000370,12CE13	116201-000390,09HE33	116201-000390,11IE37
116201-000370,10EE20	116201-000370,12DE14	116201-000390,09HE33	116201-000390,11IE38
116201-000370,10FE24	116201-000370,12EE22	116201-000390,09HE33	116201-000390,11IE38
116201-000370,10FE24	116201-000370,12FE25	116201-000390,09IE36	116201-000390,11IE39
116201-000370,10GE28	116201-000370,12GE28	116201-000390,09IE36	116201-000390,11JE40
116201-000370,10GE28	116201-000370,12GE29	116201-000390,09IE36	116201-000390,11JE42
116201-000370,10GE28	116201-000370,12GE30	116201-000390,09IE36	116201-000390,11KE45
116201-000370,10GE28	116201-000370,12GE31	116201-000390,09IE36	116201-000390,11KE48
116201-000370,10JE42	116201-000370,12HE32	116201-000390,09JE44	116201-000390,11LE50
116201-000370,10JE42	116201-000370,12IE37	116201-000390,09JE44	116201-000390,12BE06
116201-000370,10JE42	116201-000370,12IE38	116201-000390,09KE45	116201-000390,12BE08
116201-000370,10KE48	116201-000370,12IE39	116201-000390,09LE52	116201-000390,12CE11
116201-000370,10KE48	116201-000370,12JE43	116201-000390,09LE52	116201-000390,12CE12
116201-000370,10LE50	116201-000370,12KE45	116201-000390,09LE52	116201-000390,12DE14
116201-000370,10LE50	116201-000370,12LE49	116201-000390,10AE04	116201-000390,12DE16
116201-000370,10LE50	116201-000370,13AE01	116201-000390,10CE10	116201-000390,12EE19
116201-000370,10LE52	116201-000370,13AE02	116201-000390,10CE10	116201-000390,12EE20

Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer
116201-000390,12EE21	116201-000410,10DE14	116262-000280,10BE09	116262-000390,10DE15
116201-000390,12EE22	116201-000410,10DE15	116262-000280,11GE29	116262-000390,10DE16
116201-000390,12GE27	116201-000410,10DE16	116262-000280,11GE30	116262-000390,10EE20
116201-000390,12GE28	116201-000410,10DE18	116262-000280,13HT07	116262-000390,10FE26
116201-000390,12GE30	116201-000410,10EE19	116262-000350,09HE32	116262-000390,10KE48
116201-000390,12GE31	116201-000410,10EE20	116262-000350,10AE04	116262-000390,11AE04
116201-000390,12HE32	116201-000410,10GE28	116262-000350,10CE11	116262-000390,11DE17
116201-000390,12JE41	116201-000410,10GE28	116262-000350,10CE12	116262-000390,11DE17
116201-000390,12JE43	116201-000410,10GE28	116262-000350,10KE47	116262-000390,11IE38
116201-000390,12LE49	116201-000410,10KE48	116262-000350,10LE52	116262-000390,11IE39
116201-000390,12LE50	116201-000410,11BE08	116262-000350,11JE42	116262-000390,11KE48
116201-000390,13AE01	116201-000410,11BE09	116262-000350,11JE44	116262-000390,11LE52
116201-000390,13AE02	116201-000410,11FE25	116262-000350,12DE17	116262-000390,12BE09
116201-000390,13AT36	116201-000410,11FE25	116262-000370,0914M	116262-000390,12EE19
116201-000390,13AT44	116201-000410,11FE25	116262-000370,0914M	116262-000390,12EE19
116201-000390,13BT25	116201-000410,11FE25	116262-000370,09GE31	116262-000390,12KE48
116201-000390,13DT25	116201-000410,11FE25	116262-000370,09HE34	116262-000410,0914M
116201-000390,13DT30R	116201-000410,11GE30	116262-000370,09HE34	116262-000410,0914M
116201-000390,13ET13	116201-000410,11IE38	116262-000370,10AE04	116262-000410,0914M
116201-000390,13ET23	116201-000410,11IE38	116262-000370,10CE11	116262-000410,09HE34
116201-000390,13FT06	116201-000410,11IE39	116262-000370,10CE12	116262-000410,09JE43
116201-000390,13GT11	116201-000410,11JE41	116262-000370,10KE47	116262-000410,10AE05
116201-000390,13HT07	116201-000410,11KE48	116262-000370,10KE47	116262-000410,10BE06
116201-000390,13HT12	116201-000410,12AE03	116262-000370,10KE47	116262-000410,10CE11
116201-000390,13HT12	116201-000410,12BE07	116262-000370,10LE49	116262-000410,10DE15
116201-000410,0915M	116201-000410,12CE11	116262-000370,10LE49	116262-000410,10KE48
116201-000410,0915M	116201-000410,12CE12	116262-000370,11DE15	116262-000410,11AE04
116201-000410,0915M	116201-000410,12DE15	116262-000370,11IE37	116262-000410,11DE17
116201-000410,0922M	116201-000410,12EE20	116262-000370,11JE41	116262-000410,11GE29
116201-000410,09FE23	116201-000410,12FE23	116262-000370,11JE44	116262-000410,11HE34
116201-000410,09FE23	116201-000410,12GE30	116262-000370,12BE09	116262-000410,11IE39
116201-000410,09FE23	116201-000410,12HE33	116262-000370,12DE15	116262-000410,12CE11
116201-000410,09FE23	116201-000410,12IE36	116262-000370,12GE29	116262-000410,12EE20
116201-000410,09FE23	116201-000410,12IE37	116262-000370,12JE41	116262-000410,12GE29
116201-000410,09FE23	116201-000410,12IE38	116262-000370,12LE49	116262-000410,12HE32
116201-000410,09FE23	116201-000410,12JE40	116262-000390,0914M	116262-000410,12IE39
116201-000410,09FE23	116201-000410,12KE45	116262-000390,0914M	116262-000410,12JE40
116201-000410,09FE23	116201-000410,12KE47	116262-000390,0914M	116262-000410,13BT25
116201-000410,09FE23	116201-000410,12LE51	116262-000390,0918M	116262-000410,13DT33
116201-000410,09FE23	116201-000410,13AE02	116262-000390,0922M	116401-000750,09HE34
116201-000410,09FE23	116201-000410,13AT36	116262-000390,09GE29	116401-000750,09HE34
116201-000410,09HE32	116201-000410,13AT44	116262-000390,09GE29	116401-000750,09HE34
116201-000410,09LE52	116201-000410,13BT19	116262-000390,09GE29	116401-000750,09HE34
116201-000410,09LE52	116201-000410,13BT25	116262-000390,09GE29	116401-000750,09HE34
116201-000410,10AE05	116262-000260,10AE04	116262-000390,09LE51	116401-000750,09IE38
116201-000410,10BE06	116262-000280,09JE42	116262-000390,10AE05	116401-000750,09JE44
116201-000410,10CE11	116262-000280,10AE04	116262-000390,10CE11	116401-000750,10BE09

Katalognummer, Partinummer	Katalognummer, Partinummer
116401-000750,10GE30	116401-000950,11FE26
116401-000750,10JE41	116401-000950,11GE29
116401-000750,10LE52	116401-000950,11HE34
116401-000750,11FE25	116401-000950,11JE43
116401-000750,11FE25	116401-000950,11LE49
116401-000750,11GE28	116401-000950,11LE51
116401-000750,11HE34	116401-000950,12DE14
116401-000750,11JE41	116401-000950,12GE29
116401-000750,12AE02	116401-000950,12LE49
116401-000750,12AE02	116401-000950,13BT29
116401-000750,12DE14	
116401-000750,12DE14	
116401-000750,12GE29	
116401-000750,12JE43	
116401-000750,12KE48	
116401-000750,13AE02	
116401-000750,13BT37	
116401-000750,13DT31	
116401-000750,13FT06	
116401-000750,13GT24	
116401-000850,09HE32	
116401-000850,10BE09	
116401-000850,10BE09	
116401-000850,10JE41	
116401-000850,10JE41	
116401-000850,10JE41	
116401-000850,10LE52	
116401-000850,11FE25	
116401-000850,11GE29	
116401-000850,11GE30	
116401-000850,11HE34	
116401-000850,11IE38	
116401-000850,11LE51	
116401-000850,12AE02	
116401-000850,12CE11	
116401-000850,12DE14	
116401-000850,12EE21	
116401-000850,12IE38	
116401-000850,12LE49	
116401-000850,13AE02	
116401-000850,13DT33	
116401-000850,13ET12	
116401-000950,10BE09	
116401-000950,10CE10	
116401-000950,10JE42	
116401-000950,10LE52	
116401-000950,11FE25	