

Siemens AG, H CP XP MK, Allee am Röthelheimpark 2, 91052 Erlangen

Kontaktperson i den regionale enhed
Department Healthcare Service
Telefon 76405075
Fax
E-mail Bue.lars.holm@siemens.com
Dato 31.10.2014

Sikkerhedsmeddelelse

Til alle brugere af Acquisition Workstation i forbindelse med SIEMENS Mammomat Inspiration-mammografisystemet

Kontaktperson i forretningsenheden
Department H CP XP MK WH IN
+49 9131 847120
Telefon
Fax +49 9131 848456
E-mail Heiderose.Pfaff@siemens.com
Dato

Acquisition Workstation betjeningspult i forbindelse med Mammomat Inspiration-mammografisystem: Potentielt problem hvis bordet ikke er monteret på gulvet

Kære kunde

Formålet med dette brev er at oplyse om et potentielt problem og risiko for personskade ved brug af Mammomat Inspiration Acquisition Workstation (betjeningspult med strålingsafskærmning, materiale nr. 10549892, når pulten ikke er fastgjort til gulvet).

Hvornår opstår fejlen, og hvori består de potentielle risici?

Hvis skærmene er placeret yderligt på bordpladen, kan Acquisition Workstation pulten blive ustabil, og kan vælte og forårsage personskade på brugeren.

Hvad kan brugeren gøre for at undgå den potentielle risiko ved problemet?

Vi anbefaler kraftigt at placere skærmene midt på bordpladen, hvis pulten ikke er fastgjort til gulvet, for at undgå, at det vælter.

Siemens AG
Healthcare Sector; Ledelse: Hermann Requardt
Clinical Products Division; Ledelse: Britta Fuenfstueck
X-Ray Products; Ledelse: Andre Hartung

Allee am Röthelheimpark 2
91052 Erlangen
Tyskland

Tlf.: +49 (9131) 84 0

Siemens Aktiengesellschaft; Bestyrelsesformand: Gerhard Cromme;
Direktion: Joe Kaeser, Bestyrelsesformand, præsident og administrerende direktør; Roland Busch, Klaus Helmrich,
Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Ralf P. Thomas
Registrerede kontorer: Berlin og München, Tyskland; Salgselskaber: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684
WEEE-registreringsnr. DE 23691322

Hvornår løses problemet?

Siemens er ved at udarbejde en modifikation til løsning af dette problem (XP060/14/S). Du vil modtage information af din lokale Siemens-servicerepræsentant, så snart denne modifikation er tilgængelig. Modifikationen omfatter en ny bundplade, som forbedrer stabiliteten.

Vi værdsætter jeres forståelse og samarbejde i forbindelse med denne sikkerhedsmeddelelse og beder jer orientere personalet med det samme. Sørg også for, at denne sikkerhedsmeddelelse er tilgængeligt i systemets brugsanvisning. Personalet bør være opmærksom på dette problem, indtil modifikationen er blevet udført.

Hvis du har solgt eller på anden måde skaffet dig af med dette apparat/udstyr, og det ikke længere er under din kontrol, beder vi dig videregende denne sikkerhedsmeddelelse til udstyrets nye bruger. Vær venlig også at give os oplysninger om den nye ejer af udstyret.

Vi undskylder eventuel ulejlighed i forbindelse med dette.

Med venlig hilsen

Siemens A/S
Healthcare