



## Accu-Chek® Mobile – Vigtig information om blodsuktermåling

En forkert udført blodsuktermåling kan føre til forkerte måleresultater; herved er der risiko for, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandlingen, hvilket i værste fald kan føre til alvorlige sundhedsskader. Overhold derfor følgende anvisninger for at udføre en korrekt blodsuktermåling.

### Rigtig

### Forkert

### Begrundelse

1



Vask dine hænder med varmt vand og sæbe og skyl dem grundigt. Tør dine hænder grundigt i et rent håndklæde, før du udtager blod.




Udfør **ingen** blodsuktermåling, hvis dine fingre er uvaskede, anavsede eller klæbrige (f.eks. på grund af mad- eller drikkevare rester).

Uvaskede, anavsede eller klæbrige fingre kan medføre forkerte måleresultater og dermed risiko for tilførsel af høj insulinosis.

1

2

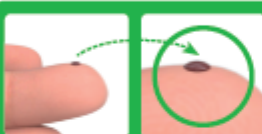

Anvend altid en lille, ny, fintformet bloddråbe.



Der må **ikke** udføres en blodsuktermåling med en udtværet bloddråbe, eller hvis den ikke er fintformet. Tvær **ikke** bloddråben ud med testfeltet.

Hvis du udfører blodsuktermålinger med en udtværet bloddråbe, eller hvis du tværer bloddråben ud med testfeltet, øges risikoen for en infektion på indstikstedet. Dette kan medføre forkerte måleresultater og dermed risiko for tilførsel af høj insulinosis.

2

3



Berør testfeltet let og roligt med bloddråben. Tilfør bloddråben til midten af testfeltet.



Tryk **ikke** testfeltet mod fingeren. Undgå urolige bevægelser.

Hvis du trykker testfeltet mod fingeren, kan dette medføre forkerte måleresultater og dermed risiko for tilførsel af høj insulinosis.

3

4

Når du har udtaget bloddråben, skal du tilføre den til testfeltet med det samme.

Tag fingeren væk fra testfeltet, så snart der lyder en signaltone og *Måling er i gang* vises i displayet.

**Bemærk:** Bip-lyde kan kun høres, når bip-lyde er tilkoblet. Se brugsanvisning for indstilling af lydsignal.



Vent **ikke** med at tilføre bloddråben til testfeltet. Berør **ikke** testfeltet med fingeren, efter at signaltonen har lydt og *Måling er i gang* vises i displayet.

Hvis du ikke tilfører bloddråben til testfeltet med det samme, kan dette medføre forkerte måleresultater og dermed risiko for tilførsel af høj insulinosis. Signaltonen hjælper dig med at få et pålideligt måleresultat.

4

ACCU-CHEK og ACCU-CHEK MOBILE er varemærker tilhørende Roche.

© 2014 Roche Diagnostics

www.accu-check.com

Roche Diagnostics GmbH  
68305 Mannheim, Sandhofer Str. 116, Germany

ACCU-CHEK®



07290184001(01)