

**VIGTIGT - Vigtig produktinformation
Ingenia MR FlexTrak-trolley**

Operatørens fod kan komme i klemme under FlexTrak-trolleyen

Kære kunde

Der er konstateret et problem på Philips Ingenia MR FlexTrak-trolleyer, Trolley med variabel højde IRF, som, hvis det opstår igen, kan udgøre en risiko for brugeren. Hensigten med denne FSN781 00414 er at informere dig om:

- hvad problemet er, og under hvilke forhold det kan forekomme
- hvilke handlinger, der skal foretages af brugeren for at forebygge risiko for brugere
- hvilke handlinger Philips har planlagt for at korrigere problemet.

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret fremover

Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse.

Opbevar venligst en kopi af denne meddelelse sammen med udstyrets brugermanual.

Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte Philips Healthcare Customer Care Center:

Telefon 80 30 30 35
Email philips.service@philips.com

Denne meddelelse er blevet rapporteret til den relevante myndighed.

Philips beklager den ulempe, dette måtte forårsage.

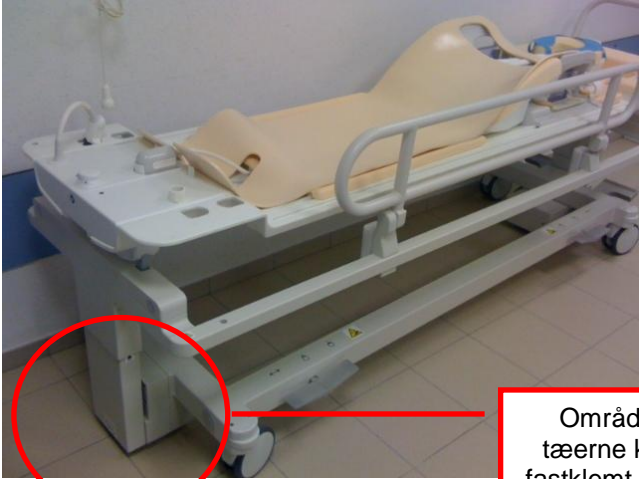

Med venlig hilsen

Povl Pedersen

CS Branch Manager Denmark
Philips Healthcare


VIGTIGT - Vigtig produktinformation Ingenia MR FlexTrak-trolley

Operatørens fod kan komme i klemme under FlexTrak-trolleyen

| | |
|---------------------------------|---|
| BERØRTE PRODUKTER | Alle Ingenia FlexTrak-trolleyer, Trolley med variabel højde IRF, med følgende produktidentifikationsnummer: 989603019291, 989603019292, 989603019293 |
| BESKRIVELSE AF PROBLEMET | <p>Ved brug af Ingenia MR FlexTrak-trolleyen er der en risiko for at klemme operatørens fod mellem gulvet og trolleyens hydraulikenhed.</p>  <div data-bbox="987 1205 1273 1346" style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Område, hvor tæerne kan blive fastklemt, se næste hillede</p> </div> |
| MULIGE FARER | <p>Der er risiko for skader på operatørens fod eller tæer, hvis den/de kommer i klemme mellem gulvet og trolleyens hydraulikenhed. Årsag kan være afstanden mellem kolonnen og gulvet, den rektangulære form på kolonnen, operatørens position ved håndtering af trolleyen i forhold til kolonnens position, hvor lejepladen mindsker synligheden af det område, hvor foden kan komme i klemme.</p>  |

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Ingenia MR FlexTrak-trolley

Operatørens fod kan komme i klemme under FlexTrak-trolleyen

| | |
|--|---|
| SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER | <p>Alle Ingenia FlexTrak-trolleyer, Trolley med variabel højde IRF, med følgende produktidentifikationsnummer: 989603019291, 989603019292, 989603019293</p> <p>Denne produktidentifikation kan findes under det forreste eller bageste dæksel på Ingenia MR FlexTrak-trolleyen.</p>  |
| HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN | <p>Den farlige situation opstår, når operatøren flytter trolleyen, mens han/hun står i den korte ende af trolleyen og ikke flytter foden, når trolley nærmer sig den. Risikoen foreligger primært, når trolleyen betjenes af 2 personer. Derfor skal man ved brug af trolleyen være ekstra forsigtig og følge anvisningerne for brug af trolleyen på hospitalet eller scanningsinstitutionen, herunder brug af det korrekte fodtøj.</p> |
| PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS | <p>Der udsendes en korrigerende handling med reference FCO781 00414, der kræver, at Philips serviceteknikere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udskifter de forreste og bageste dæksler på Ingenia MR FlexTrak-trolleyen med nye dæksler med en beskyttelseskofanger, som forhindrer, at foden kommer i klemme. <p>Hvis du har brug for at kommunikere med Philips i forbindelse med dette program, beder vi dig oplyse referencenummeret FCO781 00414</p> |
| YDERLIGERE INFORMATION OG SUPPORT | <p>Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte Philips Healthcare Customer Care Center:</p> <p>Telefon 80 30 30 35 Email philips.service@philips.com</p> |