

## VIGTIGT - Vigtig produktinformation Expression IP5 Informationsportal

### Tab af trådløs kommunikation med værtsmonitoreringssystemet

Kære kunde

Der er konstateret et problem på Philips Expression IP5 Informationsportal. Denne vigtige produktinformation skal informere dig om:

- hvad problemet er, og hvornår det kan forekomme,
- hvilke handlinger der skal foretages af kunden/brugeren for at forebygge risiko for patienter eller brugere
- hvilke handlinger Philips har planlagt for at korrigere problemet.

**Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret fremover**

Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse.

Når kontakten elektrostatisk udladning (ESD) anvendes på en af de fire skruer på IP5's bagpanel, kan den trådløse funktion i IP5 blive afbrudt. Hvis dette skulle opstå, kan den trådløse forbindelse mellem IP5 og værtsmonitoreringssystemet, Expression MRI-patientmonitoreringssystemet eller Expression MR-200 MRI-patientmonitoreringssystemet blive afbrudt. Det kan potentielt medføre en forsinkelse i behandlingen eller diagnosticeringen af patienten.

Vores optegnelser viser, at du har det berørte produkt. På næste side kan du også se yderligere instruktioner og handlinger, der vil blive udført for at løse dette problem.

Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte **<Kontaktoplysninger for Philips-repræsentanten i det pågældende land, udfyldes af KM / land>**.

Denne meddelelse er blevet rapporteret til den relevante myndighed.

Philips beklager den ulejlighed, dette måtte forårsage.

Med venlig hilsen



Rusty Kelly  
Quality and Regulatory Senior Manager



## VIGTIGT - Vigtig produktinformation

### Expression IP5 Informationsportal

#### Tab af trådløs kommunikation med værtsmonitoreringssystemet

<b>BERØRT PRODUKT</b>	<p>Produkt: 865471 (Expression Information Portal IP5) / servicenummer 453564251511</p> <p>Serial Numbers: US23200121, US23200122, US23200123, US23200124, US23200125, US23200126, US23200127, US23200128, US23200129, US23200130, US23200131, US23200132, US23200133, US23200134, US23200135, US23200136, US23200137, US23200138, US23200139, US23200140, US23200141, US23200142, US23200143, US23200144, US23200145, US23200146, US23200147, US23200148, US23200149, US23200150, US23200151, US23200152, US23200153, US23200154, US23200155, US23200156, US23200157, US23200158, US23200159, US23200160, US23200161, US23200162, US23200163, US23200164, US23200165, US23200166, US23200167, US23200168, US23200169, US23200170, US23200172, US23200173, US23200176, US23200177, US23200178, US23200179, US23200180, US23200181, US23200182, US23200183, US23200184, US23200188, US23200189, US23200190, US23200191, US23200192, US23200193, US23200194, US23200195, US23200196, US23200197, US23200198, US23200199, US23200200, US23200201, US23200202, US23200203, US23200204, US23200205, US23200206, US23200207, US23200208, US23200209, US23200210, US23200211, US23200212, US23200213, US23200214, US23200215, US23200216, US23200217, US23200218, US23200219, US23200220, US23200221, US23200222, US23200223, US23200224, US23200225, US23200226, US23200227, US23200228, US23200229, US23200230, US23200231, US23200232, US23200233, US23200234, US23200235, US23200236, US23200237, US23200238, US23200239, US23200240, US23200241, US23200242, US23200243, US23200244, US23200245, US23200246, US23200247, US23200248, US23200249, US23200250, US23200251, US23200252, US23200253, US23200254, US23200255, US23200256, US23200257, US23200258, US23200259, US23200260, US23200261, US23200262, US23200263, US23200264, US23200265, US23200266, US23200267, US23200268, US23200269, US23200270, US23200271, US23200272, US23200273, US23200274, US23200275, US23200276, US23200277, US23200278, US23200279, US23200280, US23200281, US23200282, US23200283, US23200284, US23200285, US23200286, US23200287, US23200288, US23200289, US23200290, US23200291, US23200292, US23200293, US23200294, US23200295, US23200296, US23200297, US23200298, US23200299, US23200300, US23200301, US23200302, US23200303, US23200304, US23200305, US23200306, US23200307, US23200308, US23200309, US23200310, US23200311, US23200312, US23200313, US23200314, US23200315, US23200316, US23200317, US23200318, US23200319, US23200320, US23200321, US23200322, US23200323, US23200324, US23200325, US23200326, US23200327, US23200328, US23200329, US23200330, US23200331, US23200332, US23200333, US23200334, US23200335, US23200336, US23200337, US23200338, US23200339, US23200340, US23200341, US23200342, US23200343, US23200344, US23200345, US23200346, US23200347, US23200348, US23200349, US23200350, US23200351, US23200352, US23200353, US23200354, US23200355, US23200356, US23200357, US23200358, US23200359, US23200360, US23200361, US23200362, US23200363, US23200364, US23200365, US23200366, US23200367, US23200368, US23200369, US23200370, US23200371, US23200372, US23200373, US23200374, US23200375, US23200376, US23200377, US23200378, US23200379, US23200380, US23200381, US23200382, US23200383, US23200385, US23200386, US23200387, US23200388, US23200389, US23200390, US23200391, US23200393, US23200394, US23200395, US23200397, US23200398, US23200399, US23200400, US23200401, US23200402, US23200403, US23200405, US23200406, US23200407, US23200408, US23200409, US23200410, US23200411, US23200413, US23200415, US23200416, US23200419, US23200421, US23200422, US23200423, US23200424, US23200425, US23200427, US23200428, US23200429, US23200431, US23200434, US34600510, US34600511, US34600512, US34600513, US34600514, US34600515, US34600516, US34600517, US34600518, US34600519, US34600520, US34600521, US34600522, US34600523, US34600524, US34600525, US34600526, US34600528, US34600529, US34600530, US34600531, US34600532, US34600533, US34600534, US34600535, US34600536, US34600537, US34600538, US34600539, US34600540,</p>
-----------------------	--



## VIGTIGT - Vigtig produktinformation

### Expression IP5 Informationsportal

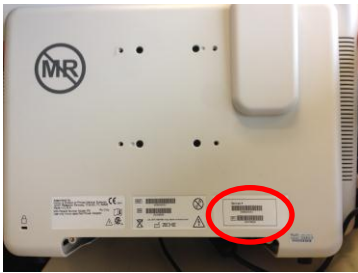
#### Tab af trådløs kommunikation med værtsmonitoreringssystemet

	<p>US34600541, US34600542, US34600543, US34600544, US34600545, US34600546,  US34600547, US34600548, US34600549, US34600550, US34600551, US34600552,  US34600553, US34600554, US34600555, US34600556, US34600557, US34600558,  US34600559, US34600560, US34600561, US34600562, US34600563, US34600564,  US34600565, US34600566, US34600567, US34600568, US34600569, US34600570,  US34600571, US34600572, US34600573, US34600574, US34600575, US34600576,  US34600577, US34600578, US34600579, US34600580, US34600581, US34600582,  US34600583, US34600584, US34600585, US34600586, US34600587, US34600588,  US34600589, US34600590, US34600591, US34600592, US34600593, US34600594,  US34600595, US34600596, US34600597, US34600598, US34600599, US34600600,  US34600601, US34600602, US34600603, US34600604, US34600605, US34600606,  US34600607, US34600608, US34600609, US34600610, US34600611, US34600612,  US34600613, US34600614, US34600615, US34600616, US34600617, US34600618,  US34600619, US34600620, US34600621, US34600622, US34600623, US34600624,  US34600625, US34600626, US34600627, US34600628, US34600629, US34600630,  US34600631, US34600632, US34600633, US34600634, US34600635, US34600636,  US34600637, US34600638, US34600639, US34600640, US34600641, US34600642,  US34600643, US34600644, US34600645, US34600646, US34600647, US34600648,  US34600649, US34600650, US34600651, US34600652, US34600653, US34600654,  US34600655, US34600656, US34600657, US34600658, US34600659, US34600660,  US34600661, US34600662, US34600663, US34600664, US34600665, US34600666,  US34600667, US34600668, US34600669, US34600670, US34600671, US34600672,  US34600673, US34600674, US34600675, US34600676, US34600677, US34600678,  US34600679, US34600680, US34600681, US34600682, US34600683, US34600684,  US34600685, US34600686, US34600687, US34600688, US34600689, US34600690,  US34600691, US34600692, US34600693, US34600694, US34600695, US34600696,  US34600697, US34600698, US34600699, US34600700, US34600701, US34600702,  US34600703, US34600704, US34600705, US34600706, US34600707, US34600708,  US34600709, US34600710, US34600711, US34600712, US34600713, US34600714,  US34600715, US34600716, US34600717, US34600718, US34600719, US34600720,  US34600721, US34600722, US34600723, US34600724, US34600729, US34600730,  US34600731, US34600732, US34600733, US34600734, US34600735, US34600736,  US34600737, US34600738, US34600739, US34600740, US34600741, US34600742,  US34600743, US34600744, US34600745, US34600747, US34600748, US34600749,  US34600750, US34600751, US34600752, US34600753, US34600754, US34600755,  US34600756, US34600757, US34600758, US34600759, US34600760, US34600761,  US34600762, US34600763, US34600764, US34600765, US34600766, US34600767,  US34600768, US34600769, US34600770, US34600771, US34600772, US34600773,  US34600774, US34600775, US34600776, US34600777, US34600778, US34600779,  US34600780, US34600781, US34600782, US34600783, US34600784, US34600786,  US34600787, US34600788, US34600789, US34600790, US34600791, US34600792,  US34600794, US34600795, US34600796</p>
<b>BESKRIVELSE AF PROBLEMET</b>	<p>Når kontakten elektrostatisk udladning (ESD) anvendes på en af de fire skruer på IP5's bagpanel, kan den trådløse funktion i IP5 blive afbrudt. Hvis dette skulle opstå, kan den trådløse forbindelse mellem IP5 og værtsmonitoreringssystemet, Expression MRI-patientmonitoreringssystemet eller Expression MR-200 MRI-patientmonitoreringssystemet blive afbrudt.</p> <p><i>BEMÆRK: Dette problem påvirker ikke Expression MRI-patientmonitoreringssystemet eller Expression MR-200 MRI-patientmonitoreringssystemet, kun IP5.</i></p>



## VIGTIGT - Vigtig produktinformation Expression IP5 Informationsportal

### Tab af trådløs kommunikation med værtsmonitoreringssystemet

<b>MULIGE FARER</b>	Tab af kommunikation med værtsmonitoreringssystemet kan medføre en forsinkelse i behandlingen eller diagnosticeringen af patienten.
<b>SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER</b>	 <p>Billedet til venstre viser bagsiden af IP5. Serienummeret på IP5 kan findes på servicemærkaten i det område, der er markeret med en rød cirkel.</p>
<b>HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN</b>	<p>Imens der afventes en opdatering til din IP5, kan du fortsætte med at bruge den, forudsat at du følger instruktionerne nedenfor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvis det er nødvendigt at justere/flytte IP5, skal du kun håndtere IP5 på siderne og undgå at berøre bagpanelet, hvis muligt. Hvis det er nødvendigt at berøre bagpanelet, skal du berøre det tæt på de ydre kanter og ikke i midten, hvor skruerne sidder.</li> <li>2. Flyt alt ledende udstyr eller materialer mindst 1" væk fra bagpanelet.</li> <li>3. IP5 vil udsende hørlige og synlige alarmer ved kommunikationsfejl. Reager på alle alarmer med det samme. Da Expression MRI-patientmonitoreringssystemet og Expression MR-200 MRI-patientmonitoreringssystemet ikke påvirkes af dette problem, kan de stadigvæk benyttes som primær kilde til monitorering af patienter.</li> </ol>
<b>PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS</b>	En repræsentant for Philips vil kontakte dig angående din berørte enhed. For at korrigere problemet vil to ferritklemmer blive tilføjet til et kabel placeret inde i enheden for at beskytte mod elektrisk puls fra elektrostatiske udladninger. Denne korrigerende foranstaltning udføres uden beregning af Philips.
<b>YDERLIGERE INFORMATION OG SUPPORT</b>	Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant: <Kontaktoplysninger for Philips-repræsentanten i det pågældende land, udfyldes af KM / land>.

