

**Computed Tomography /
Advanced Molecular Imaging**

FSN 72800621_88200494

9. marts 2015

**VIGTIGT - Vigtig produktinformation
Rettelse vedr. medicinsk udstyr**

Tilbehørsenhed - nødstrømsforsyning (UPS)

Funktionssvigt på UPS-batterier

Kære kunde.

Hos Philips forstår vi vigtigheden af at sikre, at dine billedannelsessystemer er funktionsdygtige og fungerer korrekt. For at hjælpe med at sikre det sikreste og mest effektive kliniske miljø videregiver vi de følgende oplysninger.

Nødstrømsforsyningsenheder (UPS-enheder) er ekstraudstyr og tredjeparts-tilbehør, der anvendes sammen med dit Philips-udstyr. En UPS kan være købt fra en tredjepart, bestilt via Philips eller være anskaffet til dit system på anden måde. Uanset deres oprindelse kræver UPS-enheder periodisk vedligeholdelse, herunder periodisk udskiftning af batterier på grund af deres begrænsede driftslevetid.

Philips er blevet opmærksomme på funktionssvigt på UPS-enheder, der resulterede i lækage af elektrolyt (svovlsyre), overophedning og/eller udsendelse af dampe. Analyser har konstateret, at disse funktionssvigt som oftest opstår på grund af, at batterierne i UPS-enheder anvendes efter deres brugslevetid - typisk tre til fem år.

Selvom der ikke har været rapporteret alvorlige skader, skal denne vigtige produktinformation (FSN) informere dig om risikoen for, at der kan opstå funktionssvigt på UPS-enheder på denne måde og anbefale din implementering af et vedligeholdelsesprogram i overensstemmelse med UPS-producentens anbefalinger.

For at hjælpe dig med at identificere behov for vedligeholdelsesaktiviteter fremsender Philips de medfølgende vedligeholdelsesoplysninger.

Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant:

Telefon 80 30 30 35
Email philips.service@philips.com

Philips beklager den ulejlighed, dette måtte forårsage.

Med venlig hilsen

Yuchol Kim
Sr. Manager, Quality and Regulatory

Computed Tomography /
Advanced Molecular Imaging

FSN 72800621_88200494

9. marts 2015

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Rettelse vedr. medicinsk udstyr

Tilbehørsenhed - nødstrømsforsyning (UPS)

Funktionssvigt på UPS-batterier

BERØRTE PRODUKTER	Alle systemer, der understøttes af UPS-enheder.
BESKRIVELSE AF PROBLEMET	<p>Uden forebyggende vedligeholdelse og/eller periodisk udskiftning af batteriet kan der opstå funktionssvigt på UPS-enheder, hvilket kan medføre lækage af batterisyre, overophedning og/eller udsendelse af dampe.</p> <p>Alle UPS-enheder, der er baseret på bly-/syrebatterier, er berørt af dette problem.</p> <p>Der er ikke rapporteret skader eller dødsfald som følge af dette problem.</p>
MULIGE FARER	<p>Mulige farer som følge af funktionssvigt på UPS-enheder omfatter, men er ikke begrænset til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemisk forbrænding • Termisk forbrænding • Irritation af øjne, næse og/eller svælg
SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER	<p>Produkter med tilsluttede UPS-tilbehørsenheder.</p> <p>Bemærk: Tilsluttede UPS-enheder omfatter store systemenheder og små konsolunderstøttende enheder.</p>
HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN	<p>Gennemse de medfølgende materialer, og implementer et vedligeholdelsesprogram for UPS'en på din institution som anbefalet af producenten af din UPS.</p> <p>Hvis du opdager en usædvanlig lugt, varme eller ser væske i området omkring UPS'en, må du ikke røre ved UPS'en eller eventuel omgivende væske. Følg institutionens procedurer for potentielt skadelige materialer. Vær opmærksom på alle personer i nærheden af den potentielt farlige situation, herunder, men ikke begrænset til - patienter, personale, og servicepersonale. Kontakt straks serviceteknikeren.</p>
PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS	<ul style="list-style-type: none"> • Videregive denne vigtige produktinformation for at give generelle oplysninger • Levere en informationsfolder om UPS'er, der giver en oversigt over vedligeholdelsesbehov og en foreslået vedligeholdelsesstrategi

FORTROLIGT.

TRYKTE EKSEMPLARER ER IKKE UNDERLAGT VERSIONSKONTROL. KONTROLLER DOKUMENTVERSION FØR BRUG.

**Computed Tomography /
Advanced Molecular Imaging**

FSN 72800621_88200494

9. marts 2015

**VIGTIGT - Vigtig produktinformation
Rettelse vedr. medicinsk udstyr**

Tilbehørsenhed - nødstrømsforsyning (UPS)

Funktionssvigt på UPS-batterier

YDERLIGERE INFORMATION OG SUPPORT	Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant: Telefon 80 30 30 35 Email philips.service@philips.com
--	---

FORTROLIGT.

TRYKTE EKSEMPLARER ER IKKE UNDERLAGT VERSIONSKONTROL. KONTROLLER
DOKUMENTVERSION FØR BRUG.