

**VIGTIG FELTSIKKERHEDSMEDDELELSE**

IA\_Customer\_Name  
IA\_Facility\_Site  
IA\_Street\_Address  
IA\_City, IA\_State IA\_Zip\_Code

**Forsigtig: Digital radiografisk røntgensystem DX-D 100:  
Sådan bevæges enheden manuelt**

Kære kunde

Agfa HealthCare fokuserer på at give dig den bedst mulige kundepleje samt produkter og tjenester af højeste kvalitet. Agfa HealthCare vil gerne gøre dig opmærksom på følgende:

**Enhed:**

Denne meddelelse vedrører det mobile digital radiografiske røntgensystem **DX-D 100**.


**Baggrundsinformation:**

Ved motordrevet bevægelse er det ikke muligt at flytte enheden manuelt. Proceduren for skift til manuel bevægelse, og det fornødne værktøj, er nævnt i brugervejledningen og beskrevet nedenfor.

**Handlinger**

- **Procedure for skift fra motoriseret til manuel bevægelse.**

*“I det tilfælde, at enheden skal flyttes manuelt, skal de to skruer på hvert hjul skrues ud med den medfølgende unbrakonøgle. Dette vil frakoble hjulene fra motorerne (og løsne bremserne), hvorefter enheden frit kan flyttes.”*

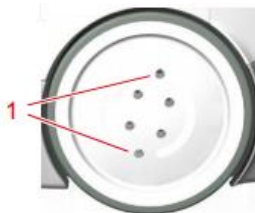


**1** Unbrakoskruer

Denne information er også vist i brugervejledningen (afsnittet "Problemløsning").

PR1405160001-VR0000105

- **Opbevaring af unbrakonøgle**

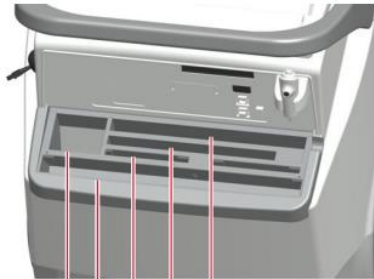

- 1 *En kasse eller rulle med beskyttende engangsposer til detektoren*

*Kassetterne kan anvendes til opbevaring af unbrakonøglen, der bruges til at frakoble hjulene fra motoren.*

Denne information er også vist i brugervejledningen (afsnittet "Opbevaringsbeholder").

- **Aktuel brugervejledning**

Den aktuelle brugervejledning (opå DVD) er vedlagt dette brev.

Vi beder dig venligt yderligere om at udfylde og returnere feedback-formularen ved første given lejlighed.

Hvis ovenstående information ikke gør sig gældende på stedet, eller hvis enheden er blevet overført, bedes du venligt angive dette i feedback-formularen samt videregive denne Vigtig Feltsikkerhedsmeddelelse til det sted, hvor enheden er overført til.

Vi takker dig på forhånd for din opmærksomhed på dette problem og din fortsatte hjælp.

Skulle du have spørgsmål angående denne sag, bedes du venligt kontakte din lokale Agfa HealthCare-afdeling: **<Name of contact person>** på **<Tel>**.

Med venlig hilsen  
Paul Merckx, chef for QARA Imaging Business Division



Agfa HealthCare NV  
Septestraat 27  
B-2640 Mortsel  
Belgium

**VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE**  
**FEEDBACK-FORMULAR**

Vi beder dig venligst returnere den vedhæftede information ved første given lejlighed.  
På forhånd tak

Kunde-/Stednavn: IA\_Customer\_Name IA\_Facility\_Site

Adresse: IA\_Street\_Address

IA\_City, IA\_State IA\_Zip\_Code

**Meddelelshenvisning:** PR1405160001-VR0000105

**Produkthenvisning:** DX-D 100

- Jeg bekræfter hermed, at jeg har modtaget og forstået vedhæftede meddelelse.
- Denne meddelelse vedrører ikke dette sted.
- Enheden er overført til andet sted.

**Kunde**

Navn:

Stillingsbetegnelse:

Underskrift:

Dato:

Telefonnummer:

- Ret venligt vores kontaktoplysninger, som følger:

Kunde-/Stednavn:

Adresse:

**Fax den udfyldte formular til <fax no.>**  
**eller send den elektronisk til <email address>, hvor ovenstående henvisningskode**  
**bedes angives under Emne.**

PR1405160001-VR0000105



---

Agfa HealthCare ....

*[Indsæt land/regional adresse på juridisk person her] (fjern denne vejledning fra det endelige dokument)*