

## Vigtigt Safety Notice

LQT6283LB - LQT6283LE

LCRD2 Inlet and outlet tube connected on the same compartment

Macopharma ref: 1511 127

Incident Reported n° [201515257](#)

Helsingborg 18/12/2015

Kære Kunde,

Macopharma er den 19/11/2015 blevet infomeret om, at der er observeret 2 defekte filtre i lot 278315H 25 reference NPT6288LA: Manglende filtrering gennem filtermedie LCRD2 filter.



### **Anbefaling:**

Dette er en isoleret hændelse, som detekteres meget let: blodet strømmer lige ned til opsamlingsposen uden at passere gennem filteret. Dette resulterer i den ene side af filteret forbliver **helt hvid** (se billedet ovenfor). MacoPharma anbefaler alle sine kunder til at udføre en visuel inspektion på filtrering af alle produkter, der indeholder filter LCRD2.

## Vigtigt Safety Notice

LQT6283LB - LQT6283LE

LCRD2 Inlet and outlet tube connected on the same compartment

Udfyld venligst vedlagte formular og returnere den til faxnummer: + 33 3201184 90 eller e- mail: [cellule.materiovigilance@macopharma.com](mailto:cellule.materiovigilance@macopharma.com), med CC [joakim.hagvik@macopharma.se](mailto:joakim.hagvik@macopharma.se)

Det er fordi vi ved, at du har modtaget denne meddelelse. Venligst distribuere denne information til de berørte parter i din virksomhed.

Navn på lokation	
Adress	
By	
Name	
Funktion	
Telefon nummer:	
Date:	
Underskrift:	