

## Adresse

Ihre Zeichen/Nachricht vom

Unsere Zeichen  
BM/ATSEV

Durchwahl Tel. 06274/6344-  
89401

Fax 06274/6344-  
89120

Datum  
2016-06-20

### **Vigtig sikkerhedsanvisning til Miele's kabinet- og sengevaskere PG 8821, PG 8822, PG8825, PG8830, PG 8922 og PG8930: Korrigerende tiltag vedr. spulearmskontrol - begrænset bevægelse af enkelte spulearme**

Som følge af vores ansvar og høje sikkerhedskrav, retter vi denne henvendelse til dig for at gøre opmærksom på vigtigheden af regelmæssig kontrol af desinfektionsmaskiners funktionsevne.

Miele har konstateret, at der i enkelte tilfælde, ved særlige omstændigheder, kan opstå en defekt i dyse-rørene. Dette kan medføre, at en eller flere spulerør ikke kan rotere korrekt med en begrænset rengøringsydelse til følge. Ved kemotermisk desinfektion er der begrænset risiko for nedsat desinfektion af rekvisitter (lille risiko).

For at sikre, at din maskine arbejder pålideligt, bør du regelmæssigt, mindst dagligt, visuelt og manuelt kontrollere spulerørenes retning i din kabinet- og sengevasker. Alle dyser skal pege i den samme retning (undtagen dyse-rørparret ved dørene). Kontroller hvert enkelt dyse-rør for, om det kan dreje - hvis nogle rør kan drejes manuelt, er der muligvis ikke længere nogen forbindelse i hele systemet, og der kan være tale om en fejl. Hvis der skulle vise sig nogle uregelmæssigheder ved kontrollen, bedes du venligst omgående henvende dig til Miele Service.

For at kunne identificere en defekt i spulesystemet sikkert, og dermed øge sikkerheden, har Miele udviklet et overvågningssystem for spulearmene. I de kommende uger vil en medarbejder fra Miele Service kontakte dig for at aftale tid med henblik på at udstyre maskinen med overvågningssystemet. Derved vil det blive registreret, hvis spulearmene ikke roterer korrekt, og maskinen vil meddele det.

Send venligst denne information videre til rette modtager, hvis du ikke er den rigtige kontaktperson.

Ansvarlige myndigheder er informeret om tiltaget.

Vi beklager ulejligheden på grund af denne sag. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Returner venligst vedlagte svarblanket til os senest den 05.08.2016.

Med venlig hilsen

Miele Werk Bürmoos GmbH

Manfred Neuhauser  
Werkleitung

Andreas Kühner  
Qualitätsmanagement

Tel.: +43 (0)6274 6344 89424

Mobil: +43 (0)664 81 98 683

Fax: +43 (0)6274 6344 89120

Seite 2 von 3

Miele Werk Bürmoos GmbH  
Managementsystem  
Miele-Straße 1  
13485,  
A-5111 Bürmoos  
Telefon +43 (0)6274/6344-0  
Telefax +43 (0)6274/6344-89120

Bank: UniCredit Bank Austria AG  
Konto-Nr.: 52962 016 101, BLZ: 12000  
DVR: 0004081  
FN 322459 f, Landesgericht Salzburg  
UID-Nr.: ATU64917326  
BIC: BKAUATWW  
IBAN: AT42 1200 0529 6201 6101

E-Mail: buermoos@miele.at  
Internet: <http://www.miele-buermoos.at>

Zertifiziertes  
nach ISO 9001, ISO  
ISO 14001 & SA 8000

## SVARBLANKET

E-mail: buermoos@miele.at

Fax: 0043 6274 6344 89120

Miele Werk Bürmoos GmbH

Miele – Straße 1

5111 Bürmoos

Austria

Jeg bekræfter hermed at have modtaget jeres informationsskrivelse "**Korrigerende tiltag vedr. spulearmskontrol - begrænset bevægelse af enkelte spulearme**". Vi videregiver denne information til den ansvarlige kontaktperson.

Dato: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Sygehus: \_\_\_\_\_

Afdeling: \_\_\_\_\_

Gade: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_

Type/serie-nr.: \_\_\_\_\_

Desinfektion:  kemotermisk  termisk