

**LIFEPAK CR® Plus / LIFEPAK EXPRESS® AED BEKRÆFTELSESSIDE**

Arket/arkene skrives under, forsynes med dato og sendes udfyldt til kontakten herunder

Konto #	Udfyldt af (Udskriv navn): _____	Den udfyldte formular bedes returneret: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Med fax til: +31 43 808 0003</li> <li>• Med E-mail til: <a href="mailto:RS.EMEArecall@physio-control.com">RS.EMEArecall@physio-control.com</a></li> <li>• Eller med post til: Physio-Control Operations Netherlands B.V. Galjoenweg 68, 6222 NV Maastricht, Holland</li> </ul>
	Underskrift: _____	
	Tlf.: (_____) _____ Dato: __/__/__	
Attention: Risk Management	E-mail: _____	

**INSTRUKTIONER**

- **Kontrollér, at det anførte serienummer stemmer overens med serienummeret på etiketten, som er placeret på bagsiden af dit apparat**
- **Åbn låget og lyt til de indtalte meddelelser inden for 5 sekunder**
  - Hvis de indtalte meddelelser aktiveres korrekt, trykkes på TÆND/SLUK-knappen, hold den inde i 2 sekunder for at slukke for apparatet. Fortsæt med at overvåge dit/dine apparat(er) som ved din etablerede rutinekontrol, til du kontaktes af Physio-Control for at få udskiftet alle berørte serienumre.
  - Hvis de indtalte meddelelser ikke aktiveres, bedes du tage dit apparat ud af drift og kontakte Physio-Control Kundesupport på +45 69 70 58 , valgmulighed 7, kl. 9.00 til 17.00, mandag – fredag for at aftale korrektion af apparatet.

**HUSK:**

- **Kontroller udløbsdatoen på elektroderne og udskift elektrodepakken og CHARGE-PAK (OPLADNINGSENHEDEN), hvis datoen er overskredet.**
- **Hvis klar-displayet ikke viser OK-indikator, skal du se de næste trin i Bruger-tjeklisten i Bilag C i Brugsanvisningen.**

Serienummer	Model	Indtalte meddelelser kan høres (sæt ring om en)	Elektroder kontrolleret og elektroder og CHARGE-PAK udskiftet om nødvendigt (Sæt ring om en)	Har aldrig ejet et apparat	Apparat permanent kasseret (skrottet) eller taget ud af drift	Apparatet kan ikke lokaliseres	Apparatet er blevet overført til en anden facilitet*	*Angiv den nye adresse og de nye kontaktoplysninger
EKSEMPEL	EXPRESS	(JA) / NEJ	(JA) / NEJ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--