

Vigtig produktinformation

Küschall kørestole produceret mellem 12. oktober og 20. december 2016


Date: 23.1.2016

Ref: 584163

Vigtig information:

Kære Kunde,

Vi gør hermed opmærksom på at kørestole produceret i den ovennævnte periode er blevet forsynet med en mærkat, der ikke lever op til vores kvalitetsstandarder. Printet på mærkaten kan utilsigtet forsvinde ved at gnide på denne, eller ved rengøring af stolen med almindeligt anvendte rengøringsmidler.

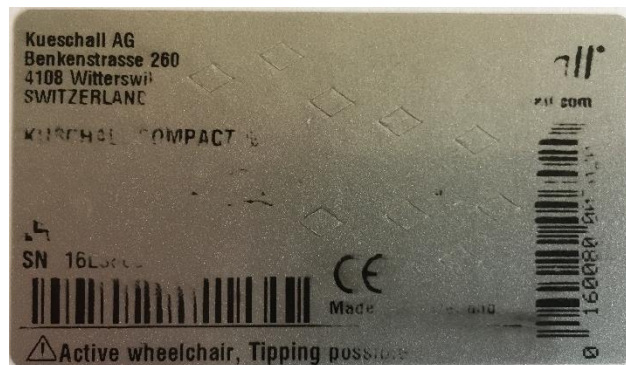

Eksempel på print der er ødelagt

Det er stadig sikkert at anvende produktet og der er ingen potentiel risiko for brugeren af produktet på grund af denne fejl

Sammen med denne vigtige produktinformation, modtager du en ny serienummermærkat, som skal monteres i stedet for den nuværende, der sidder på stellet på kørestolen.

For at udskifte mærkaten bedes du fjerne den der sidder på stellet eksisterende, husk at få alt væk. For at sikre en glat overflade, er det vigtigt at alle rester af den gamle mærkat er grundigt fjernet. Hvis den gamle mærkat sidder godt fast, kan det hjælpe at varme denne op med svag varme.

Rens derefter overfladen med almindeligt anvendt rengøringsmiddel – brug ikke aggressive produkter som acetone eller rensbenzin, da det kan beskadige lakken på stellet.

Fjern folien på bagsiden af den nye mærkat og placer den på understellet.

Udfyld vedlagte svarskema og send det til pkreuz@invacare.com. Du kan også udfylde tage et billede af svarskemaet med din telefon og sende det til 40723773.

Du bedes venligst sikre dig, at denne information er gjort tilgængelig for alt relevant personale i din organisation og vær ekstra opmærksom i en passende periode.

Vi bekræfter hermed at myndighederne er informeret om denne vigtige produktinformation

Hvis du har spørgsmål i forhold til dette brev, eller har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen

Invacare A/S

Per Kreuz

Tlf. 40723773

pkreuz@invacare.com

Sdr. Ringvej 37

2605 Brøndby