

**Vigtig sikkerhedsmeddelelse**  
**LIFEPAK® 15 monitor/defibrillator og LIFEPAK® 12 monitor/defibrillator med**  
**End-Tidal CO<sub>2</sub> option**



Physio-Control Denmark | Lifesaving starts here.™

**ADRESSE**

c/o Harbour House  
Sundkrogsgade 21  
2100 Copenhagen  
Denmark

**E-MAIL**

order.nordic@physio-control.com  
info.nordic@physio-control.com

[www.physio-control.dk](http://www.physio-control.dk)

**VIGTIGT – Send venligst dette brev øjeblikkeligt til de personer som er ansvarlige for at vedligeholde/monitorere din LIFEPAK® 15 og LIFEPAK® 12 monitor/defibrillator.**

Juli 2017

Kære kunde,

denne bekendtgørelse er en meddelelse til specifikke ejere af LIFEPAK 12 og LIFEPAK 15 apparater med End-Tidal CO<sub>2</sub> (EtCO<sub>2</sub>) funktionalitet. Physio-Control foretager en frivillig rettelse af disse LIFEPAK 12 og LIFEPAK 15 apparater.

Det vedhæftede godkendelsesblad inkluderer listen af berørte apparaters serienumre, som stemmer overens med vores dokumenter, er i din besiddelse og derfor berørt af denne feltrettelse.

**Beskrivelse af problem**

Physio-Control er blevet opmærksom på et problem hvor EtCO<sub>2</sub>-læsning periodisk kan vise en værdi af "XXX" efter opstart eller under apparatets drift (se eksempel nedenfor).



I forbindelse med undersøgelsen mener producenten af EtCO<sub>2</sub>-modulet, at komprimeret luft må have forurenede filtre indeni i EtCO<sub>2</sub>-modulet. Som et resultat af filtrets forurening, vil EtCO<sub>2</sub>-displayet på LIFEPAK 12 eller LIFEPAK 15 sørge for en udlæsning af "XXX". Der vil være hele eller punkterede linjer til stede på apparatets display på den plads hvor EtCO<sub>2</sub>-ellers viser bølgeform og SERVICE LED'en vil blive tændt. I denne situation vil EtCO<sub>2</sub> registrering ikke længere være tilgængelig.

Hvis det ovenstående problem forekommer, så kontakt straks Physio-Control på telefonnummeret nedenfor. Hvis det ovenstående problem ikke forekommer, så fortsæt venligst med at udføre de daglige selvtests af apparat, som vist i driftvejledningerne og apparatet er sikkert at bruge.

**Physio-Control's planlagte handlinger**

Physio-Control kontakter kunder med berørte apparater for at planlægge rettelsen i deres apparat(er), som vil inkludere erstatning af EtCO<sub>2</sub>-moduler.

**Påkrævede kundehandlinger**

1. Videre send venligst denne information til alle dine afdelinger, trænere og brugere som må have påvirket LIFEPAK 12 eller LIFEPAK 15 apparat(er).
2. Følg venligst instruktionerne på godkendelsesbladet for hvert serienummer som er anført på din ejendel. Returnér omgående det komplette godkendelsesblad til Physio-Control.

3. Hvis du oplever "XXX" efter opstart eller mens apparater er igang, så kontakt venligst Physio-Control for at få serviceret dit apparat.

Skulle du have nogle spørgsmål i forbindelse med dette emne, så kontakt os venligst på +45 6960 7058, 8:30 til 16:00, mandag – fredag.

Venlig Hilsen,

Kathryn Janecke  
Sr. Director Quality  
PHYSIO-CONTROL, INC.