

**VIGTIGT - Vigtig produktinformation**  
***Mobil detektorholder******Vogn til mobil detektorholder - klemmeproblem***

Kære kunde

Som en del af Philips' løbende fokus på pålidelighed og sikkerhed overvåger vi hele tiden vores produkters ydeevne. I forbindelse med nylige evalueringer af den mobile detektorholder er vi blevet opmærksomme på et potentielt problem, som kan påvirke udstyrets ydeevne under bestemte forhold. Formålet med dette brev er at give dig oplysninger om:

- Hvad problemet er, og under hvilke forhold det kan forekomme,
- de handlinger, du kan foretage for at undgå eller minimere forekomsten af problemet og
- de handlinger, Philips har planlagt for at korrigere problemet.

**Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret fremover**

Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse.

Opbevar venligst en kopi af denne meddelelse sammen med udstyrets brugermanual.

Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips repræsentant:

Telefon 80 30 30 35  
Email [philips.service@philips.com](mailto:philips.service@philips.com)

Vi undskylder for eventuel ulejlighed, dette måtte medføre, og håber, at disse oplysninger giver svar på eventuelle spørgsmål i tilstrækkeligt omfang.

Med venlig hilsen

Karmen Gruenert  
Director Q&R DXR Hamburg

## VIGTIGT - Vigtig produktinformation *Mobil detektorholder*

### *Vogn til mobil detektorholder - klemmeproblem*

<b>BERØRTE PRODUKTER</b>	Mobil detektorholder (9890-010-88152)
<b>BESKRIVELSE AF PROBLEMET</b>	Hvis låsemekanismen på den mobile detektorholders bevægelige klemme ikke er korrekt justeret eller ikke sikret, kan den bærbare detektor falde ned, når den bevægelige klemme sidder nederst (nedenunder detektoren), og ekstra kraft anvendes. Dette kan ske, når detektoren roteres med uret fra liggende til stående position.
<b>MULIGE FARER</b>	Den trådløse bærbare detektor (WPD) sidder fast i den mobile detektorholder via en låsemekanisme. De 4 forsænkede skruer, som bruges til at fastgøre låsemekanismen, kan løsne sig. Hvis dette sker, og mekanismen svigter, kan detektoren falde ned, når holderen roteres 90° med uret fra liggende.
<b>SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER</b>	Alle mobile detektorholdere
<b>HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN</b>	Kunden bør kontrollere låsemekanismen på den mobile detektorholder. Låsemekanismen kan flyttes uden at trykke på aktuatoren, holderen skal ikke drejes med uret.
<b>PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS</b>	Philips vil: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fastgøre de fire berørte skruer,</li> <li>2. placere udløsserskruen korrekt og</li> <li>3. afprøve klemmens lukkekraft.</li> </ol> Philips vil kontakte dig for at aftale tid til denne handling.  Hvis du har brug for at kommunikere med Philips i forbindelse med dette program, beder vi dig oplyse korrigerende handling 71200174.
<b>YDERLIGERE INFORMATION OG SUPPORT</b>	Hvis du ønsker yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant.  Telefon        80 30 30 35 Email            philips.service@philips.com