



URGENT FIELD SAFETY NOTICE (sikkerhedsmeddelelse)

Produkt: Premicath Neonatal PICC-linjer med guidewire

Udgave: Revision af brugerinstruktioner (IFU / DFU)

Dato: 27. november, 2017

Information til alt personale involveret i anlæggelse af Neonatal PICC line

Varenummer:

1261.153, 1261.203, 1261.205, 1261.206, 1261.207, 1261.208, 1261.306, 1261.307,
6261.203, 6261.206, 6261.306

Beskrivelse

Vi vil gerne informere brugere af ovenstående produkter om, at bruger instruktionerne (IFU) er blevet ændret med hensyn til fjernelse af guidewire. Nedenfor er det relevante segment af den ændrede tekst fremhævet.

For at fjerne guidewire skal du afbryde forbindelsen mellem t-stykket og kateteret. Hvis der opstår modstand, stop og lad karret hvile i et minut og prøv at fjerne guidewire igen meget langsomt. Omhyggelig skylning af kateteret med saltvand eller fortyndet lipidopløsning hjælper med at fjerne guidewiren. Hvis modstanden stadig vedvarer, trækker du guidewire og katetre samtidigt.

Foranstaltninger af brugeren:

Få kendskab til de reviderede brugerinstruktioner.

Del denne besked med andre brugere, så de er opmærksomme på de reviderede brugerinstruktioner.

Kontaktoplysninger: Kontakt din lokale Vygon-repræsentant Susanne Philipsen 21451010 for yderligere information.

En meddelelse til Lægemiddelstyrelsen er udarbejdet i forbindelse med distributionen af denne fieldnotice.

Vygon Denmark ApS
Tuborg Boulevard 12-3
2900 Hellerup
www.vygon.dk