

## Vigtig information om Accu-Chek<sup>®</sup> Insight insulinpumpesystem

### Minimering af risikoen for lækage under udskiftning af en forfyldt insulinampul

Kære bruger af Accu-Chek<sup>®</sup> Insight Insulinpumpesystem,

Vores brugeres sikkerhed kommer i første række, og derfor er det vigtigt for os at understrege vigtigheden af, hvordan du som bruger betjener Accu-Chek<sup>®</sup> Insight insulinpumpesystemet, så vi sammen kan minimere risikoen for lækage, når du udskifter en forfyldt insulinampul.

Vi oplever desværre stadig enkelte tilfælde af lækage, og det har i visse tilfælde ført til alvorlige uønskede hændelser som ketoacidose. Derfor håber vi, at du vil læse nedenstående instruktioner grundigt.

**Særligt vigtigt** er det, at pumpen holdes lodret, og at ampullen og adapteren sættes sammen i en vinkel på 90°, som vist på nedenstående illustration. Ellers risikerer man, at membranen bliver beskadiget af adapternålen, og det kan resultere i en insulinlækage.



#### Ydermere er det vigtigt at:

- altid udskifte adapteren og slangerne, hver gang man skifter ampul
- kontrollere, at der er insulin i slangen efter en ampuludskiftning
- foretage ampuludskiftninger mindst tre timer, før du går i seng
- holde øje med blodsukkerniveauet i op til 3 timer efter en insulinampuludskiftning
- altid kontrollere pumpen for utætheder, hvis du oplever usædvanlige udsving i dit blodsukkerniveau
- altid have en ekstra behandlingsform (f.eks. en insulinpen) ved hånden

De relevante myndigheder, sundhedspersoner, distributører og detailhandlere er informeret om dette tiltag.



Vi takker på forhånd for din forståelse og samarbejde.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om, hvordan man betjener eller bruger Accu-Chek® Insight systemet, eller hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Accu-Chek® kundesupport på tlf. 36 39 99 54.

Med venlig hilsen  
Roche Diabetes Care

*Roche Diabetes Care Danmark er en del af Roche Diagnostics A/S, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre.*