

**VIGTIGT - Vigtig produktinformation**  
***MobileDiagnost wDR******Advarselmærkat for klempunkt mangler på glidesøjlen***

Kære kunde

Som en del af Philips' løbende fokus på pålidelighed og sikkerhed overvåger vi hele tiden vores produkters ydeevne. I forbindelse med nylige evalueringer af Philips MobileDiagnost wDR er vi blevet opmærksomme på et potentielt problem, som kan påvirke udstyrets ydeevne under bestemte forhold. Formålet med dette brev er at give dig oplysninger om:

- hvad problemet er, og under hvilke forhold det kan forekomme
- de handlinger, du kan foretage for at undgå eller minimere forekomsten af problemet
- de handlinger Philips har planlagt for at korrigere problemet.

**Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret fremover**

Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse.

Opbevar venligst en kopi af denne meddelelse sammen med udstyrets brugermanual.

Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette, er du velkommen til at kontakte Philips Customer Care Center:

Telefon 80 30 30 35  
Email [philips.service@philips.com](mailto:philips.service@philips.com)

Vi undskylder for eventuel ulejlighed, dette måtte medføre, og håber, at disse oplysninger giver svar på eventuelle spørgsmål i tilstrækkeligt omfang.

Med venlig hilsen

Michael Mizrachi  
Head of Q&R DXR

## VIGTIGT - Vigtig produktinformation *MobileDiagnost wDR*

### *Advarselmærkat for klempunkt mangler på glidesøjlen*

<b>BERØRTE PRODUKTER</b>	MobileDiagnost wDR
<b>BESKRIVELSE AF PROBLEMET</b>	Når operatøren eller en omkringstående person rører ved den indre del af den lodrette glidesøjle (som rørrarmen bevæger sig op og ned på), uden at være opmærksom på rørrarmens bevægelse, kan fingrene komme i klemme.
<b>MULIGE FARER</b>	<p>En risikovurdering konkluderede, at en finger, der kom i klemme, ville kunne medføre et hæmatom eller at det i værste fald kunne resultere i en brækket finger.</p> <p>Ifølge brugerhåndbogen skal man holde alle kropsdele og beklædning fri af udstyret, så man undgår at komme i klemme i de bevægelige komponenter i dette medicinske udstyr.</p>
<b>SÅDAN IDENTIFICERER DU BERØRTE PRODUKTER</b>	MobileDiagnost wDR-systemer er berørt.
<b>HANDLINGER, SOM SKAL FORETAGES AF KUNDEN/BRUGEREN</b>	<p>Ingen handling påkrævet fra din side. Der er ingen begrænsninger for anvendelse af dette udstyr. Kunden kan fortsætte med at bruge udstyret efter den tilsigtede brug.</p> <p>Hvis du føler dig usikker med hensyn til disse instruktioner, skal du kontakte Philips.</p>
<b>PLANLAGTE TILTAG HOS PHILIPS</b>	<p>Philips har til hensigt at påsætte en ny mærkat på berørte systemer, som vil eliminere dette problem.</p> <p>Du vil blive kontaktet af Philips, når sættet med den korrigerende handling er klar til implementering.</p> <p>Hvis du har brug for at kommunikere med Philips i forbindelse med dette program, beder vi dig oplyse korrigerende handling 71200182.</p>
<b>YDERLIGERE INFORMATION OG SUPPORT</b>	<p>Hvis du ønsker yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte Philips Customer Care Center:</p> <p>Telefon           80 30 30 35 Email             philips.service@philips.com</p>