

20. marts 2019

VIGTIG INFORMATION OM MULIG FORKERT ANVENDELSE

Information til apoteker om det medicinske udstyr VorteFri® Flaske 5 ml., varenummer 213163

VorteFri® Flaske er medicinsk udstyr til topikal behandling af vorter.
Som angivet på flaskens etiket, indeholder produktet en ætsende substans
(myresyre). Advarselssymboler og fremhævet tekst på både flaske
og pakning advarer om den ætsende effekt, og hvad man som
bruger skal være opmærksom på i anvendelsen.

Produktet kommer i en brun glasflaske med et hvidt låg og kan minde
om andre former for medicinsk udstyr – især dem, der er til oral
anvendelse, som også har et hvidt låg. Det kan have alvorlige følger,
hvis der tages fejl mellem produkter, så VorteFri® fejlagtigt bliver brugt
oralt.

Mylan har allerede taget sine forholdsregler for at ændre lågets farve
på VorteFri®, fra hvid til orange. I løbet af de kommende måneder
kommer disse produkter på markedet.



For så vidt muligt at undgå forveksling, anbefaler vi, at VorteFri® altid opbevares i sin
originale æske. Desuden er det vigtigt at minde kunderne om, at produktet har en
ætsende effekt, som de skal være opmærksomme på, når de skiller sig af med
produktet. Brugere af produktet bør altid læse produktmærkatet inden brug og beholde
brugsvejledning i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Vi vil sætte pris på, at I deler denne information med jeres team

Lægemiddelstyrelsen er informeret om sagen.

Med venlig hilsen


Martin Bjerre
Meda – Mylan Company