


Vigtige supplerende kontroltiltag!


Novalung kits / iLA active iLA kit IPS / i-cor puls kit



 ADVARSEL	Følgende procedure for visuel kontrol OG lækagetestning af DP3-pumpehovedet SKAL udføres hver gang inden brug af patientsættet. Manglende overholdelse af denne procedure kan medføre alvorlig personskade eller endog død for patienten!
--	--

Bemærk venligst:

1. Visuelt eftersyn af DP3-pumpehovedet:

Kontrollér DP3-pumpehovedets tilslutning, inden patientsættet anvendes.

 Hvis det klæbende område af kabinetets tilslutning er mælket/uklart, må patientsættet **IKKE** benyttes!

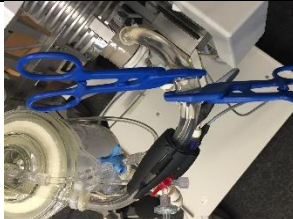

Mælket/uklar misfarvning af det klæbende område:	Korrekt tilslutning:
	

DK

2. Lækagetest af DP3-pumpehovedet:

Supplement til brugsanvisningen, afsnittet Forberedelse/priming/udluftning:

Gå videre til det sidste trin i afsnittet Forberedelse/priming/udluftning, og gå frem som følger:

1.	Kontrollér, at patientsættet er fri for luft. Fjern om nødvendigt resterende luft fra systemet ved at banke let og udføre yderligere priming.	
2.	Krydsafklem slangesegmentet mellem DP3-pumpehovedet og oxygenatoren ved brug af to klemmer (krydsafklemning).	
3.	Forøg hastigheden til 9000 o/min. Bemærk: Der kan forekomme relativt kraftige vibrationer på grund af trykopbygningen.	
4.	Kontrollér, om pumpehovedet lækker, i ca. 60 sekunder.  Patientsættet må IKKE benyttes, hvis der identificeres en lækage på DP3-pumpehovedet!	
5.	Hvis der ikke registreres en lækage, sænkes hastigheden til 2000 o/min. og klemmerne åbnes. Patientsættet kan anvendes.	

Der kan nu gås videre til forberedelsesprocessen som beskrevet i brugsanvisningen til det respektive patientsæt.