

December 2018

**Meget VIGTIG PRODUKTINFORMATION**

**Sikkerhedsmanchet til infusionsstativer til aferesystemet Spectra Optia®**

**Emne: Produktopgradering**

Kære kunde

Terumo BCT vil gøre alt for at sikre, at du modtager support af den bedste mulige kvalitet, og vi vil derfor også altid gøre en stor indsats for at viderekommunikere oplysninger vedr. Terumo BCT-produkter. Dette brev informerer om den nye sikkerhedsmanchet til infusionsstativet i Spectra Optia-systemet.

Nye Spectra Optia-systemer vil blive leveret med en sikkerhedsmanchet til infusionsstativet (vist på figur 1 nedenfor). Denne funktion er blevet tilføjet for at undgå klemfare mellem infusionsstativet og maskinen, når infusionsstativet sænkes.

Hvis operatøren ikke holder fast på infusionsstativet, mens han trykker på udløserknappen på infusionsstativet, kan infusionsstativet komme i frit fald. Hvis operatørens hånd eller andre kropsdele er i vejen for det faldende infusionsstativ, kan operatøren komme til skade. Da dette er en ekstra sikkerhedsfunktion, skal sikkerhedsmanchetterne ikke fjernes, efter de er installeret på infusionsstativet.



*Figur 1: Foto af sikkerhedsmanchetten, efter den er installeret på Spectra Optia-infusionsstativet.*



*Figur 2: Foto af sikkerhedsmanchetten før installation.*

Dine lokale Terumo BCT-repræsentanter vil arbejde sammen med dig om at sikre, at sikkerhedsmanchetter til infusionsstativer tilvejebringes og installeres på de Spectra Optia-systemer, der allerede er i brug. På nye maskiner vil serviceteknikere montere sikkerhedsmanchetten på infusionsstativet under installation.

Vi sætter stor pris på din fortsatte støtte og ser frem til at betjene dig. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din Terumo BCT-repræsentant eller vores regionale kundesupportcenter. Bemærk venligst, at den kompetente nationale myndighed er blevet underrettet om denne produktinformation.

Venlig hilsen

**Spencer A. Brown**  
Senior Manager, Customer Experience & Advocacy

**Terumo BCT, Inc.**  
10811 West Collins Ave.  
Lakewood, Colorado 80215-4440  
USA  
Tlf. i USA: 1.877.339.4228  
Tlf.: +1.303.231.4357  
Fax: +1.303.542.5215

**Terumo BCT Europe N.V.**  
Europa, Mellemøsten og Afrika  
Ikaroslaan 41  
1930 Zaventem  
Belgien  
Tlf.: +32.2.715.0590  
Fax: +32.2.721.0770

**Terumo BCT Asia Pte. Ltd.**  
89 Science Park Drive  
#04-25 (Lobby B)  
The Rutherford  
Singapore 118261  
Tlf.: +65.6715.3778  
Fax: +65.6774.1419

**Terumo BCT Latin America S.A.**  
La Pampa 1517-12<sup>th</sup> Floor  
C1428DZE  
Buenos Aires  
Argentina  
Tlf.: +54.11.5530.5200  
Fax: +54.11.5530.5201

**Terumo BCT Japan, Inc.**  
Tokyo Opera City Tower 49F,  
3-20-2, Nishi-Shinjuku,  
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1450,  
Japan  
Tlf.: +81.3.6743.7890  
Fax: +81.3.6743.9800