

December 2018

Meget VIGTIG PRODUKTINFORMATION

Sikkerhedsmanchet til infusionsstativer til aferesystemet Trima Accel®

Emne: Produktopgradering

Kære kunde

Terumo BCT vil gøre alt for at sikre, at du modtager support af den bedst mulige kvalitet, og vi vil derfor også altid gøre en stor indsats for at viderekommunikere oplysninger vedr. Terumo BCT-produkter. Dette brev informerer om den nye sikkerhedsmanchet til infusionsstativet i Trima Accel-systemet.

Nye Trima Accel-systemer vil blive leveret med en sikkerhedsmanchet til infusionsstativet (vist på figur 1 nedenfor). Denne funktion er blevet tilføjet for at undgå klemfare mellem infusionsstativet og maskinen, når infusionsstativet sænkes.

Hvis operatøren ikke holder fast på infusionsstativet, mens han trykker på udløserknappen på infusionsstativet, kan infusionsstativet komme i frit fald. Hvis operatørens hånd eller andre kropsdele er i vejen for det faldende infusionsstativ, kan operatøren komme til skade. Da dette er en ekstra sikkerhedsfunktion, skal sikkerhedsmanchetterne ikke fjernes, efter de er installeret på infusionsstativet.



Figur 1: Foto af sikkerhedsmanchetten, efter den er installeret på Trima Accel-infusionsstativet.



Figur 2: Foto af sikkerhedsmanchetten før installation.

Dine lokale Terumo BCT-repræsentanter vil arbejde sammen med dig om at sikre, at sikkerhedsmanchetter til infusionsstativer tilvejebringes og installeres på de Trima Accel-systemer, der allerede er i brug. På nye maskiner vil serviceteknikere montere sikkerhedsmanchetten på infusionsstativet under installation.

Vi sætter stor pris på din fortsatte støtte og ser frem til at betjene dig. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din Terumo BCT-repræsentant eller vores regionale kundesupportcenter. Bemærk venligst, at den kompetente nationale myndighed er blevet underrettet om denne produktinformation.

Venlig hilsen

Spencer A. Brown

Terumo BCT, Inc.
10811 West Collins Ave.
Lakewood, Colorado 80215-4440
USA
Tlf. i USA: 1.877.339.4228
Tlf.: +1.303.231.4357
Fax: +1.303.542.5215

Terumo BCT Europe N.V.
Europa, Mellemøsten og Afrika
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Belgien
Tlf.: +32.2.715.0590
Fax: +32.2.721.0770

Terumo BCT Asia Pte. Ltd.
89 Science Park Drive
#04-25 (Lobby B)
The Rutherford
Singapore 118261
Tlf.: +65.6715.3778
Fax: +65.6774.1419

Terumo BCT Latin America S.A.
La Pampa 1517-12th Floor
C1428DZE
Buenos Aires
Argentina
Tlf.: +54.11.5530.5200
Fax: +54.11.5530.5201

Terumo BCT Japan, Inc.
Tokyo Opera City Tower 49F,
3-20-2, Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 163-1450,
Japan
Tlf.: +81.3.6743.7890
Fax: +81.3.6743.9800

Senior Manager, Customer Experience & Advocacy