

Field Safety Notice (FSN)

Handelsbetegnelse af de berørte produkter: MC 1124 og MC 1104

FSCA – identifikation: 13-12-2019

Type tiltag: Enheds modifikation.

Dato: 13-12-2019

Attention: Distributører og kunder.

Identificering af berørte produkter:

Elektriske kørestole MC 1124 og MC 1104 der er produceret før 15.07.2019 er berørt af denne FSN.

Kørestolene ser ud som på billederne herunder.



De berørte kørestole kan identificeres ud fra serienummeret. For MC 1124 skal serienummeret være mindre end JD810119268C60. For MC 1104 skal serienummeret være mindre end JD935617040C30

Serienummerskiltet på en MC 1124 og MC 1104 findes i den indcirklede position bagerst på køretøjet:

Medema A/S


Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning

CVR-NR: 51 89 27 12

Tlf: 70 10 17 55
info@medema.com
www.medema.com



medemagruppen

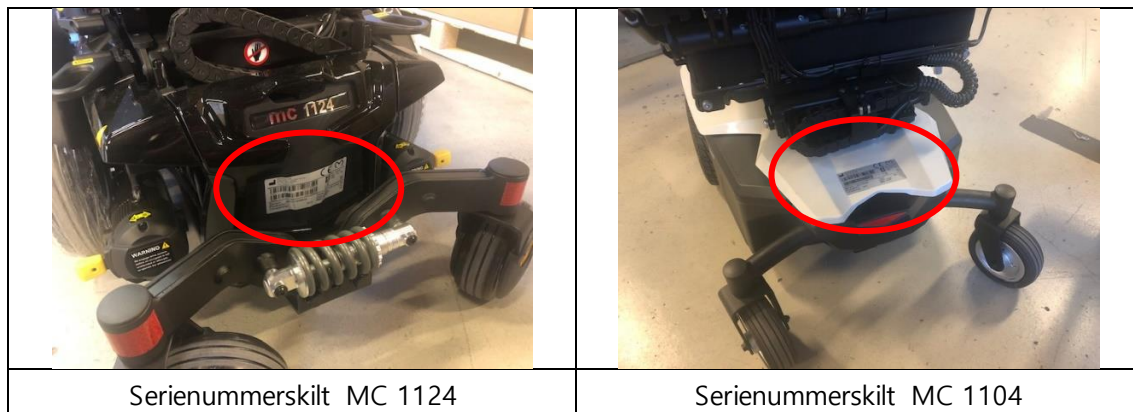

Beskrivelse af problemet:

Stolene er udstyret med en hejs og tilt. Der er 10 bolte der samler drejeledene i Hejs og tilten. I et tilfælde er der sket det at én af boltene er faldet ud fordi den ikke har været sikret med Loctite.

Boltene sidder parvis i den ene henholdsvis den anden side af hejs og tilten. Risikoen for personfare opstår, hvis der falder 2 bolte ud samtidigt og parvis. 4 af positionerne er der ikke nogen personfare selv om de skulle falde ud. Den farligste position er det boltepar der forbinder tilt funktionen. Hvis begge bolte falder ud samtidigt og tyngdepunktet er tiltet så der er bagvægt i sædet er der risiko for, at brugeren kan falde ud af sædet.

Potentiel risiko

Vi har produceret 166 stk. MC 1124 der potentielt ikke er sikret med Loctite og 7 stk. MC 1104. Der er observeret at 1 bolt er faldet af på en stol, men risikoen for der kommer flere anses for høj.

Anbefalet aktion som brugeren bør følge:

Aktion: (korrigerende)

Hvis brugeren bemærker noget unormalt i sædepositionen, for eksempel at man sidder skævt, så stop øjeblikkeligt med at benytte hejs og tilt funktionerne og kontakt i stedet serviceteknikker.

Alle berørte stole må have de 10 bolte sikret med Loctite af serviceteknikker ifølge FSCA 13-12-2019. Kontakt venligst:

Danmark

Medema AS
Enggårdvej 7
Snebjerg
7400 Herning
Telefon: 70 10 17 55

Norge

Medema Norge AS
Stamveien 6
1481 Hagan
Norge
Telefon: 67 06 49 00

