

KG, P.O. Box 100107, 33501 Bielefeld, Tyskland

Ålborg Universitetshospital

- Sterilcentralen -

Hobrovej 18 – 22, 9000 Ålborg

Dit tegn/din besked fra Vores sign Dial Tlf. 0521 807-Fax 0521 807-Date

20.01.2023

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for vaskemaskine-desinfektorer Steelco PWD 8626 og Steelco PWD 8628

Kære damer og herrer,

Hermed ønsker vi at informere dig om et muligt sikkerhedsproblem med produkttypen Steelco PWD 8626 og Steelco PWD 8628 fremstillet af Miele & Cie. KG med intelligent cyklusvalg

Ifølge vores optegnelser er vaskedesinfektorer af disse typer installeret i dit anlæg.

Disse enheder er udstyret med et intelligent cyklusvalg, der genkender lastbærerne og automatisk tildeler og starter det dedikerede program.

Med dette brev vil vi gerne informere dig om et muligt sikkerhedsproblem i forbindelse med valget af Intelligent cyklus. Vi er ved at være opmærksomme på, at den indsatte loadcarrier i meget få tilfælde ikke blev opdaget på en korrekt måde, og at der ikke blev valgt en optimal cyklus.

Hver gang du starter programmet, selv i indstillingen "automatisk belastningsgenkendelse/Automatisk programallokering", anbefaler vi, at du kontrollerer på enhedens display, om det program, der er beregnet til den anvendte lastbærer, er startet. Hvis der vises et uegnet program, afbrydes programmet, og læsseholderen trækkes kortvarigt ud af maskinen på læssesiden og sættes derefter tilbage i maskinen. Sluk derefter for indstillingen "automatisk belastningsgenkendelse/automatisk program", og brug indstillingen "direkte operatørs programvalg og valg" (se brugsanvisning). Du bør også kontakte Miele eller Steelco Service direkte, så de kan udskifte den defekte komponent.

- 2 -

Miele & Cie. KG
Telf. 0521 807-0
33611 Bielefeld

Verwaltungs-GmbH, Gütersloh, Reg.-Ger. Gütersloh, HRB 1325,
Telefon: 0521 807-0 Zinkann

BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00
Fax: 0521 807-2090 Managing Direktører

UniCredit Bank AG Berlin

Internet:
0890 0002 6688 58

selskabet er et kommanditselskab med hjemsted i Gütersloh,
-Giver. Gütersloh, HRA 3268. Pers. havde.

Verwaltungs-GmbH, Gütersloh, Reg.-Ger. Gütersloh, HRB 1325,

BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 4784 0065 0151 2128 00

UniCredit Bank AG Berlin

Www.miele.de Dr. Markus Miele, Rebecca Steinhage, Dr. Reinhard Zinkann.

Deutsche Bank AG Gütersloh

BIC: DEUTDE33HAN; IBAN: DE34 4807 0040 0334

Commerzbank AG Gütersloh

Verwaltungs-GmbH, Gütersloh, Reg.-Ger.

: Olaf Bartsch, Dr. Stefan Breit, Dr. Axel Kniehl,

BIC: HYVEDE33HAN; IBAN: DE41 1002

Denne anbefaling kan ignoreres, hvis din maskine betjenes af " direkte operatørs programvalg og -valg" eller er tilsluttet et eksternt batchdokumentationssystem, der verificerer det valgte program med det tilsigtede program. I denne forbindelse vil vi gerne med henblik på fuldstændighed endnu en gang minde dem om nødvendigheden af også at underkaste oparbejdningsresultatet regelmæssig rutinekontrol.

Under den næste vedligeholdelse, selvom din maskine ikke er påvirket, vil serviceteknikeren proaktivt udskifte denne komponent for dig gratis.

Sørg for , at alle brugere af produktet ovenfor i din organisation og andre personer skal gøres opmærksomme på denne sikkerhedsmeddelelse. De kompetente myndigheder er blevet underrettet om denne skrivelse.

Derudover kræver vi et returbrev fra dig. Udfyld og underskriv derfor vedlagte svarformular og returner den til os via e-mail som PDF-scannet kopiogto ugers modtagelse.

Din kontaktperson hos Steelco - og også modtageren af din returnering er:

Modtager: Mr. Lennarth Ohlendorff (Steelco)

e-mail: l.ohlendorff@steelcogroup.com

Vi beklager ulejligheden og besvarer gerne eventuelle spørgsmål, du måtte have.

Vi står til Deres rådighed og takker Dem for Deres samarbejde.

Med venlig hilsen

Miele & Cie. KG
Regulatorisk medarbejder

Dr. Andreas Brömmelhaus