

Field Safety Notice

Invacare NordBed Kid seng – betjening af nedfældbare sider

Date: 9.Feb.2024

Ref. Invacare: FSN_NordBed Kid_02_2024

Ref. MPA: 6.6.2-2023-100835

Vigtig information

Af hensyn til vores brugeres sikkerhed vil vi gerne henlede din opmærksomhed på den korrekte brug og installation af NordBed Kid, når den **bruges sammen med de nedfældbare sider og kun med disse.**

Under udviklingen af et nyt produkt udføres validering og verifikation for at sikre, at produktet opfylder internationale standarder og fungerer efter hensigten. Derudover leveres brugsanvisninger for at hjælpe brugerne med at bruge produkterne på en sikker og korrekt måde.

Invacare er blevet opmærksom på 3 nærværdige hændelser relateret til Invacare NordBed Kid i Sverige. Derfor vil Invacare gerne minde dig om den korrekte brug og installation af NordBed Kid, når den bruges sammen med de nedfældbare sider.

Invacare NordBed Kids brugermanual forklarer allerede i detaljer den korrekte brug og håndtering af de nedfældbare sider (NordBed Kid brugermanual, afsnit: "4.5.1 Betjening af sengeheste"). Det blev dog konstateret, at instruktionerne kunne forbedres for at fjerne en vis uklarhed, som kan have forårsaget misforståelser og som følge heraf ført til forkert brug af de nedfældbare sider.

Derfor har Invacare besluttet at forbedre denne brugsanvisning med mere tydelige billeder og forklaringer. Invacare besluttede proaktivt også at benytte lejligheden til at forbedre servicemanualen.

Vedhæftet denne sikkerhedsmeddelelse kan du finde to dokumenter, der viser de ovennævnte opdateringer:

1. **Tillæg til NordBed Kid-brugermanualen – Varenummer 60136420-A**
2. **Tillæg til NordBed Kid Service Manual – Varenummer 60136431-A**

Hvorfor bliver du kontaktet?

Disse oplysninger er relevante for alle brugere af Invacare NordBed Kid-sengen, der bruges sammen med de nedfældbare sider. I henhold til vores informationer har du modtaget en eller flere Invacare NordBed Kid-senge, som bruges eller kan bruges i fremtiden, med de nedfældbare sider.

Hvad skal du gøre?

1. Du skal informere og levere tillægget til brugermanualen til alle berørte slutbrugere. Dette kan gøres ved at sende dette link: <https://www.invacare.dk/da/pleje-hospitalssenge/plejesenge-hospitalssenge/nordbed-kid>
2. Du skal opbevare tillægget/linket til servicemanualen sammen med den aktuelle servicemanual. Du finder den her: <https://www.invacare.dk/da/pleje-hospitalssenge/plejesenge-hospitalssenge/nordbed-kid>

Sørg for, at oplysningerne i denne meddelelse gøres tilgængelige for alt relevant personale i din organisation og/eller kundebase, og at bevidstheden opretholdes i en passende periode.

Invacare bekræfter, at de relevante kompetente myndigheder er blevet informeret om denne Field Safety Notice.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen

Steen Dyrheden

Teknisk Chef

E-mail: sdyrhede@invacare.com

Tlf.: 40683835