

PrisMax brugervejledning:

Alarm		Brugervejledning til PrisMax, SW 3.XX, AW8103 Rev E																															
T2309	Sektion 3.1.8 Opsætning af alarmer, Side 183	<table><tr><th colspan="2">Luft detekteret under priming</th><th>T2309</th></tr><tr><td>Årsag</td><td colspan="2">Brugerhandlinger</td></tr><tr><td>Tom primingpose</td><td colspan="2">Kontrollér primingposen.</td></tr><tr><td>Åben slangeforbindelse</td><td colspan="2">Kontrollér slangeforbindelserne.</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Genprime eller kassér sættet.</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Hvis der stadig er luft i sættet, skal det kasseres.</td></tr></table>		Luft detekteret under priming		T2309	Årsag	Brugerhandlinger		Tom primingpose	Kontrollér primingposen.		Åben slangeforbindelse	Kontrollér slangeforbindelserne.			Genprime eller kassér sættet.			Hvis der stadig er luft i sættet, skal det kasseres.													
Luft detekteret under priming		T2309																															
Årsag	Brugerhandlinger																																
Tom primingpose	Kontrollér primingposen.																																
Åben slangeforbindelse	Kontrollér slangeforbindelserne.																																
	Genprime eller kassér sættet.																																
	Hvis der stadig er luft i sættet, skal det kasseres.																																
T0830	Sektion 3.1.5 Alarmer med medium prioritet, Side 144	<table><tr><th colspan="2">Blodlækage detekteret</th><th>T0830</th></tr><tr><td>Årsag</td><td colspan="2">Brugerhandlinger</td></tr><tr><td>Blodlækagedetektoren (BLD) registrerer blod i udløbsslangen, hvilket kan være tegn på brud på en filtermembran.</td><td colspan="2">Kontrollér, om der er luftbobler i udløbsslange i blodlækagedetektoren (BLD).</td></tr><tr><td>Lækage i filtermembran</td><td colspan="2">Tryk på knappen Alarm fra for at løsne boblerne.</td></tr><tr><td>Slange forkert installeret i blodlækagedetektoren (BLD)</td><td colspan="2">Hvis der opstår luftbobler igen, skal du kontrollere, om udløbsslangen er bukket, eller sænke blodflowhastigheden (BFR).</td></tr><tr><td>Slangen er uklar, eller der er snavs i spalten</td><td colspan="2">Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i blodlækagedetektoren (BLD).</td></tr><tr><td>Luft i udløbsslangen</td><td colspan="2">Kontrollér, om der er væske eller restmateriale i blodlækagedetektorens (BLD) spalte og udløbsslange: Rengør med en fnugfri klud, og tør derefter grundigt.</td></tr><tr><td>Den forkerte sektion af slangen er installeret i blodlækagedetektoren (BLD).</td><td colspan="2">Hvis der er blod i udløbsslangen, skal sættet skiftes. Send prøve af udløbet til blodlaboratoriet for en celleoptælling.</td></tr><tr><td>Blodlækagedetektorens (BLD) optik er snavset.</td><td colspan="2">Tryk på knappen Kassér sæt, og skift sættet.</td></tr><tr><td>TPE: Dannede elementer af lipider i plasma, misfarvet plasma.</td><td colspan="2">Tryk på knappen Fortsæt for at rydde alarmer og vende tilbage til normal drift.</td></tr></table>		Blodlækage detekteret		T0830	Årsag	Brugerhandlinger		Blodlækagedetektoren (BLD) registrerer blod i udløbsslangen, hvilket kan være tegn på brud på en filtermembran.	Kontrollér, om der er luftbobler i udløbsslange i blodlækagedetektoren (BLD).		Lækage i filtermembran	Tryk på knappen Alarm fra for at løsne boblerne.		Slange forkert installeret i blodlækagedetektoren (BLD)	Hvis der opstår luftbobler igen, skal du kontrollere, om udløbsslangen er bukket, eller sænke blodflowhastigheden (BFR).		Slangen er uklar, eller der er snavs i spalten	Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i blodlækagedetektoren (BLD).		Luft i udløbsslangen	Kontrollér, om der er væske eller restmateriale i blodlækagedetektorens (BLD) spalte og udløbsslange: Rengør med en fnugfri klud, og tør derefter grundigt.		Den forkerte sektion af slangen er installeret i blodlækagedetektoren (BLD).	Hvis der er blod i udløbsslangen, skal sættet skiftes. Send prøve af udløbet til blodlaboratoriet for en celleoptælling.		Blodlækagedetektorens (BLD) optik er snavset.	Tryk på knappen Kassér sæt , og skift sættet.		TPE: Dannede elementer af lipider i plasma, misfarvet plasma.	Tryk på knappen Fortsæt for at rydde alarmer og vende tilbage til normal drift.	
Blodlækage detekteret		T0830																															
Årsag	Brugerhandlinger																																
Blodlækagedetektoren (BLD) registrerer blod i udløbsslangen, hvilket kan være tegn på brud på en filtermembran.	Kontrollér, om der er luftbobler i udløbsslange i blodlækagedetektoren (BLD).																																
Lækage i filtermembran	Tryk på knappen Alarm fra for at løsne boblerne.																																
Slange forkert installeret i blodlækagedetektoren (BLD)	Hvis der opstår luftbobler igen, skal du kontrollere, om udløbsslangen er bukket, eller sænke blodflowhastigheden (BFR).																																
Slangen er uklar, eller der er snavs i spalten	Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i blodlækagedetektoren (BLD).																																
Luft i udløbsslangen	Kontrollér, om der er væske eller restmateriale i blodlækagedetektorens (BLD) spalte og udløbsslange: Rengør med en fnugfri klud, og tør derefter grundigt.																																
Den forkerte sektion af slangen er installeret i blodlækagedetektoren (BLD).	Hvis der er blod i udløbsslangen, skal sættet skiftes. Send prøve af udløbet til blodlaboratoriet for en celleoptælling.																																
Blodlækagedetektorens (BLD) optik er snavset.	Tryk på knappen Kassér sæt , og skift sættet.																																
TPE: Dannede elementer af lipider i plasma, misfarvet plasma.	Tryk på knappen Fortsæt for at rydde alarmer og vende tilbage til normal drift.																																


	Sektion 3.1.10 Alarm fra/Deaktiver alarmer, Side 207	Blodlækage detekteret Deaktiverende reaktion Deaktiverer blodlækagedetektoren (BLD) i 60 sekunder Deaktiverer blodlækagedetektering eller gennormalisering, eller begge, når deaktivering er aktiv. Deaktiveringshandling <i>i</i> OBS! Alarmregistrering forsinket i op til 40 sekunder. Deaktivering vil blive afstillet automatisk, 60 sekunder efter at den er angivet. T0830
T1313	Sektion 3.1.8 Opsætning af alarmer, Side 184/185	BLD-normalisering mislykkedes Årsag Transmission under forventede værdier Udløbsslange installeret forkert Luftbobler i udløbsslangen Snavset udløbsslange Blodlækagedetektorens (BLD) holdere er snavsede Afklemmt udløbsslange Brugerhandlinger <i>i</i> OBS! Alarmregistrering forsinket i op til 40 sekunder. Skub slangen frem og tilbage i blodlækagedetektoren (BLD). Pres luftboblerne ud af returslangen. Fjern og rengør udløbsslangen med en vatpind fugtet med sprit. Rengør blodlækagedetektorens (BLD) holder. Tryk på knappen Fortsæt for at teste igen. Tryk på knappen Kassér sæt, og skift det forreste sæt. T1313

T0853	Sektion 3.1.5 Alarmer med medium prioritet, Side 151	<table><tr><th>Normalisering mislykket</th><th>T0853</th></tr><tr><td>Årsag BLD-normaliseringsfejl under behandling. Slange er installeret forkert i BLD'en. Slangen er uklar, eller der er snavs i spalten. Luft i udløbsslangen. Den forkerte del af slangen er installeret i BLD'en. BLD-optik er snavset. Der er blod i udløbsslangen.</td><td>Brugerhandlinger Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i BLD. Fjern luftbobler i udløbsslangen. Skub slangen ind i BLD for at forbedre registreringssignalet. Hvis den viste transmissivitet (registreringssignal) > 85 %, skal du trykke på knappen Fortsæt for at forsøge igen. Hvis den viste transmissivitet (registreringssignal) < 85 %, skal du skifte sættet. Tryk på knappen Alarm fra for at deaktivere detektion af denne alarm. Tryk på knappen Kassér sæt, og skift sættet. Tryk på knappen Fortsæt for at rydde alarmen og vende tilbage til normal drift.</td></tr></table>	Normalisering mislykket	T0853	Årsag BLD-normaliseringsfejl under behandling. Slange er installeret forkert i BLD'en. Slangen er uklar, eller der er snavs i spalten. Luft i udløbsslangen. Den forkerte del af slangen er installeret i BLD'en. BLD-optik er snavset. Der er blod i udløbsslangen.	Brugerhandlinger Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i BLD. Fjern luftbobler i udløbsslangen. Skub slangen ind i BLD for at forbedre registreringssignalet. Hvis den viste transmissivitet (registreringssignal) > 85 %, skal du trykke på knappen Fortsæt for at forsøge igen. Hvis den viste transmissivitet (registreringssignal) < 85 %, skal du skifte sættet. Tryk på knappen Alarm fra for at deaktivere detektion af denne alarm. Tryk på knappen Kassér sæt , og skift sættet. Tryk på knappen Fortsæt for at rydde alarmen og vende tilbage til normal drift.
Normalisering mislykket	T0853					
Årsag BLD-normaliseringsfejl under behandling. Slange er installeret forkert i BLD'en. Slangen er uklar, eller der er snavs i spalten. Luft i udløbsslangen. Den forkerte del af slangen er installeret i BLD'en. BLD-optik er snavset. Der er blod i udløbsslangen.	Brugerhandlinger Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i BLD. Fjern luftbobler i udløbsslangen. Skub slangen ind i BLD for at forbedre registreringssignalet. Hvis den viste transmissivitet (registreringssignal) > 85 %, skal du trykke på knappen Fortsæt for at forsøge igen. Hvis den viste transmissivitet (registreringssignal) < 85 %, skal du skifte sættet. Tryk på knappen Alarm fra for at deaktivere detektion af denne alarm. Tryk på knappen Kassér sæt , og skift sættet. Tryk på knappen Fortsæt for at rydde alarmen og vende tilbage til normal drift.					
	Sektion 3.1.10 Alarm fra/Deaktiver alarmer, Side 210	<table><tr><th>Normalisering mislykket</th><th>T0853</th></tr><tr><td>Deaktiverende reaktion Deaktiverer BLD i 60 sekunder Deaktiverer blodlækkagedetektering eller gennormalisering, eller begge, når deaktivering er aktiv.</td><td>Deaktiveringshandling  OBS! Alarmregistrering forsinket i op til 40 sekunder. Deaktivering vil blive afstillet automatisk, 60 sekunder efter at den er angivet.</td></tr></table>	Normalisering mislykket	T0853	Deaktiverende reaktion Deaktiverer BLD i 60 sekunder Deaktiverer blodlækkagedetektering eller gennormalisering, eller begge, når deaktivering er aktiv.	Deaktiveringshandling  OBS! Alarmregistrering forsinket i op til 40 sekunder. Deaktivering vil blive afstillet automatisk, 60 sekunder efter at den er angivet.
Normalisering mislykket	T0853					
Deaktiverende reaktion Deaktiverer BLD i 60 sekunder Deaktiverer blodlækkagedetektering eller gennormalisering, eller begge, når deaktivering er aktiv.	Deaktiveringshandling  OBS! Alarmregistrering forsinket i op til 40 sekunder. Deaktivering vil blive afstillet automatisk, 60 sekunder efter at den er angivet.					
T1205	Sektion 3.1.8 Opsætning af alarmer, Side 185	<table><tr><th>Fejl i BLD-selvtesten</th><th>T1205</th></tr><tr><td>Årsag Luft i udløbsslangen Udløbsslangen er installeret forkert i BLD</td><td>Brugerhandlinger Kontrollér BLD Kontrollér, at der ikke er luftbobler i udløbsslangen. Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i BLD. Tryk på knappen Fortsæt for at forsøge at placere klemmeventilen igen. Hvis der er luft i hele returslangen, skal sættet skiftes. Tryk på knappen Kassér sæt, og skift sættet.</td></tr></table>	Fejl i BLD-selvtesten	T1205	Årsag Luft i udløbsslangen Udløbsslangen er installeret forkert i BLD	Brugerhandlinger Kontrollér BLD Kontrollér, at der ikke er luftbobler i udløbsslangen. Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i BLD. Tryk på knappen Fortsæt for at forsøge at placere klemmeventilen igen. Hvis der er luft i hele returslangen, skal sættet skiftes. Tryk på knappen Kassér sæt , og skift sættet.
Fejl i BLD-selvtesten	T1205					
Årsag Luft i udløbsslangen Udløbsslangen er installeret forkert i BLD	Brugerhandlinger Kontrollér BLD Kontrollér, at der ikke er luftbobler i udløbsslangen. Kontrollér, at udløbsslangen er korrekt installeret i BLD. Tryk på knappen Fortsæt for at forsøge at placere klemmeventilen igen. Hvis der er luft i hele returslangen, skal sættet skiftes. Tryk på knappen Kassér sæt , og skift sættet.					

T2284	Sektion 3.1.4.2 TherMax Side 141	TherMax-engangssættet er ikke isat		T2284
		Årsag	Brugerhandling	
		Blodvarmerposen registreres ikke under behandlingen	Bekræft, at blodvarmerposen er skubbet helt ind.	
			Tryk på knappen Kassér sæt , og skift sættet.	
			Afbryd behandlingen, hvis problemet ikke kan afhjælpes.	

PrisMax Graphical User Interface (GUI):

1. **Alarm T2309 : Luft detekteret under priming** - PrisMax systemet viser følgende alarmskræm ved alarm *T2309 : Luft detekteret under priming* er aktiv.

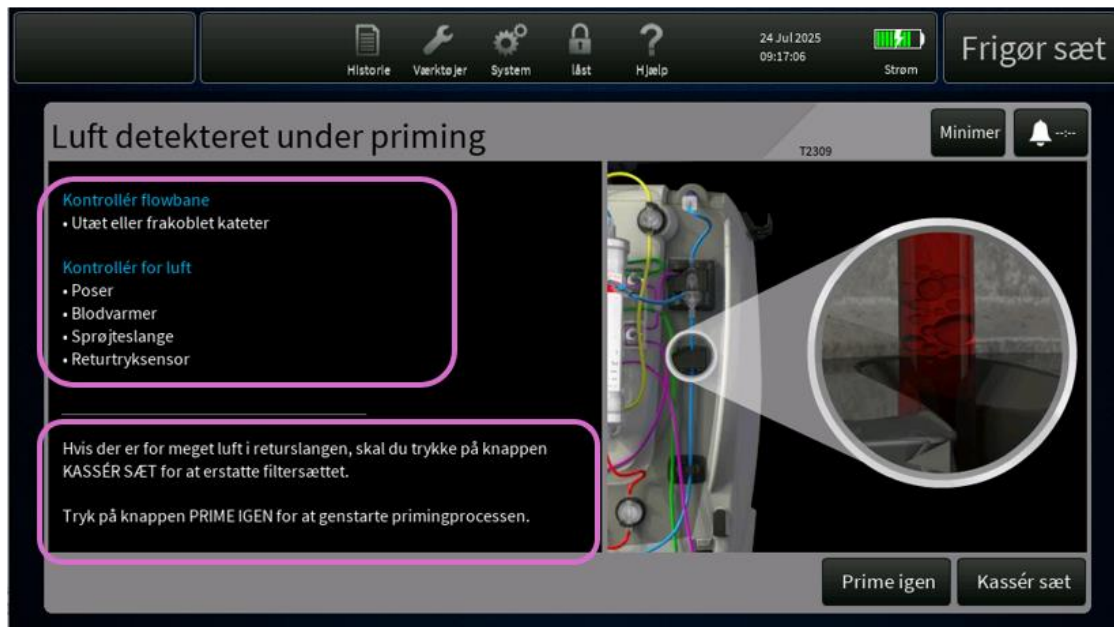

Alarmskærmen guider brugeren til at undersøge potentielle luftkilder i filtersættet og giver løsningsforslag – *Prime igen eller Kassér*.

Alarm T0830 : Blodlækage detekteret – PrisMax-systemet viser følgende alarmskræm, når alarmen *T0830: Blodlækage detekteret* er aktiv.



Alarmskærmen beder brugeren om at bekræfte tilstedeværelsen af blod i udløbsslangen og giver muligheder for de næste trin – *Kassér sæt*, *Fortsæt* eller *Alarm*.

2. **2. Alarm T1313: BLD-normalisering mislykkedes** – PrisMax-systemet viser følgende alarmskærm, når alarmen *T1313: BLD-normalisering mislykkedes* er aktiv.




Alarmskærmen guider brugeren i at løse BLD-normaliseringsfejlen og viser mulige næste trin – *Prime igen* eller *Fortsæt*.

3. **Alarm T0853: Normalisering mislykkedes** – PrisMax-systemet viser følgende alarmskærm, når alarmen *T0853: Normalisering mislykkedes* er aktiv.



Alarmskærmen giver information om den aktuelle transmissivitetsværdi, instruktioner om, hvordan den normaliseres igen, og mulige næste trin – *Alarm fra, Fortsæt eller Kassér sæt* .

4. **Alarm T1205: Fejl BLD-selvtesten** – PrisMax-systemet viser følgende alarmskærm, når alarmen *T1205: Fejl i BLD-selvtesten* er aktiv.

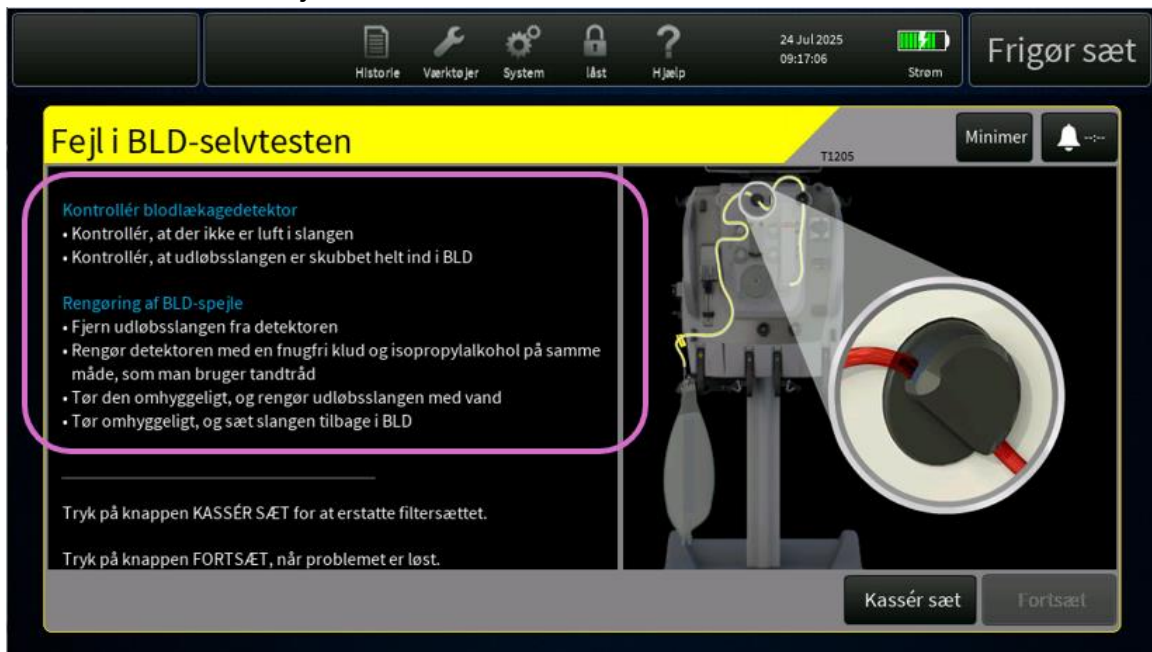

Alarmskærmen guider brugeren til at undersøge den potentielle kilde til Fejl i BLD-selvtesten og angiver de næste trin – *Kassér sæt eller fortsæt*.

5. **5. Alarm T2284: TherMax engangssættet er ikke registreret** – PrisMax-systemet viser følgende alarmskærm, når alarmen *T2284: TherMax-engangssættet er ikke registreret* er aktiv.



Alarmskærmen hjælper brugeren med at løse problemet med detektering af TherMax-engangsartikler og giver mulighed for at kassere sættet, hvis problemet ikke er løst.