

Dato for afsendelse af meddelelse

GE HealthCare Ref. nr. 85489

Til: Direktør/Leder af radiologi
Risikomanager/hospitalsadministrator
Chef for radiologiafdeling
Direktøren af IT-afdelingen
Leder af billedinformatik

VEDR.: **Cybersikkerhedssårbarhed, der påvirker Centricity RIS-i konfigureret med Instant Messenger**

**Sikkerheds-
problem**

GE HealthCare er blevet opmærksom på en cybersikkerhedssårbarhed, der påvirker Centricity RIS-i, når systemet er konfigureret med Instant Messenger. Når Instant Messenger er installeret og i drift, kan en ondsindet aktør udnytte denne sårbarhed til at udføre uautentificeret fjernudførelse af kode i Instant Messenger, hvilket potentielt kan påvirke systemets tilgængelighed og/eller medføre mulighed for manipulation af data. Instant Messenger er et valgfrit modul, som ikke er installeret som standard. Sårbarheden er ikke til stede i RIS-i-systemer uden Instant Messenger eller i systemer, hvor Instant Messenger er deaktiveret.

GE HealthCare har ikke modtaget nogen rapporter om skader som følge af dette problem.

**Handlinger,
der skal
udføres af
kunden/
brugeren**

Indtil GE HealthCare har rettet problemet, kan du fortsætte med at bruge din enhed ved at følge instruktionerne nedenfor.

Sørg for, at jeres IT-afdeling deaktiverer tjenesten "Centricity RIS IM Server" på serveren i overensstemmelse med retningslinjerne for jeres operativsystem, indtil produktkorrektionen er gennemført.

Opbevar dette dokument i arkivet.

Udfyld og returnér den vedlagte bekræftelsesformular til recall.85489@gehealthcare.com eller anvend QR-koden til at indsende dit svar elektronisk.

**Oplysninger
om det berørte
produkt**

De nedenfor anførte softwareversioner kan være berørt:

Produktnavn	Berørte softwareversioner	GTIN
Centricity RIS-i	4.2.x	Ikke gældende
Centricity RIS-i	5.x	Ikke gældende
Centricity RIS-i	6.x	Ikke gældende
Centricity RIS-i	7.0.0 – 7.0.6	00840682147170

**Produkt-
rettelse**

GE HealthCare vil rette alle påvirkede produkter uden omkostninger for kunden. En GE HealthCare-repræsentant vil kontakte dig for at arrangere korrektionen.

**Kontakt-
oplysninger**

I tilfælde af spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne meddelelse, skal GE HealthCare Service eller den lokale servicemedarbejder kontaktes.

80 40 02 47

GE HealthCare bekræfter, at denne meddelelse er blevet indsendt til de relevante tilsynsmyndigheder.

Vær sikker på, at opretholdelse af et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau er vores højeste prioritet. I tilfælde af spørgsmål kan vi kontaktes ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE HealthCare

**BEKRÆFTELSE AF VIGTIG PRODUKTINFORMATION
SVAR PÅKRÆVET**

Udfyld venligst denne formular, og returner den til GE HealthCare straks efter modtagelsen, og ikke senere end 30 dage fra modtagelse. Dette vil bekræfte modtagelsen og forståelsen af den vigtige produktinformation.

Navn på facilitet: _____

Adresse: _____

By/Stat/Postnummer/Land: _____

Kundens e-mailadresse: _____

Kundens telefonnummer: _____

Når denne formular underskrives, vedkender vi modtagelse og forståelse af den medfølgende vigtige produktinformation, og at vi har informeret alle relevante medarbejdere samt har foretaget og vil foretage de relevante handlinger iht. den meddelelse.

Angiv venligst navnet på den ansvarlige person, der har udfyldt denne formular.

Underskrift: _____

Navn med blokbogstaver: _____

Stilling/titel: _____

Dato (DD/MM/ÅÅÅÅ): _____

For at udfylde denne formular elektronisk bedes du scanne QR-koden nedenfor.



Returner venligst den udfyldte formular ved at scanne eller tage et billede af den og sende den med e-mail til:
recall.85489@gehealthcare.com

