

# Vigtig information

## CoaguChek teststrimler - nye lotnumre er klar til levering

26. oktober 2018

### Berørte produkter:

CoaguChek Test

### Berørte katalognumre:

CoaguChek XS PT (PST) Test	07671687170
CoaguChek XS PT Test	04625358170
CoaguChek PT Test	06688721170

### Baggrund:

Den 21. august udsendte vi en vigtig information vedrørende flere lotnumre af CoaguChek teststrimler, som ikke må benyttes til måling af INR-værdier over 4,5.

Vi skrev endvidere, at alle INR-værdier over 4,5 målt på de aktuelle teststrimler skulle kontrolleres ved hjælp af en godkendt laboratoriemetode.

### Konsekvens:


Vi har nu fremstillet nye CoaguChek teststrimler, som medfører, at teststrimlerne igen kan benyttes i det specificerede måleområde fra 0,8 til 8,0.

**NB:** Vær opmærksom på, at der kan findes lokale generelle retningslinjer for brug af måleområdet for CoaguChek teststrimler.

Nedenstående nye lotnumre kan benyttes til måling af INR-værdier i det specificerede måleområde 0,8-8,0. Lotnummeret på teststrimlerne identificeres ud fra de første 6 cifre af lotnummeret, mens de to sidste cifre er uden betydning for brugeren.

Varenummer	Benyttes til	CoaguChek strimmel	Lotnummer
07671687170	CoaguChek INRange	CoaguChek XS PT Test PST, 24 tests	≥ 334499xx (S_344)
04625358170	CoaguChek XS CoaguChek XS Plus CoaguChek XS Pro	CoaguChek XS PT Test, 24 tests	≥ 334499xx (S_344)
06688721170	CoaguChek Pro II	CoaguChek PT Test, 2 x 24 tests	≥ 361433 (S_062)

Lotnummeret på teststrimlerne findes på strimlernes etikette som vist i nedenstående eksempel:

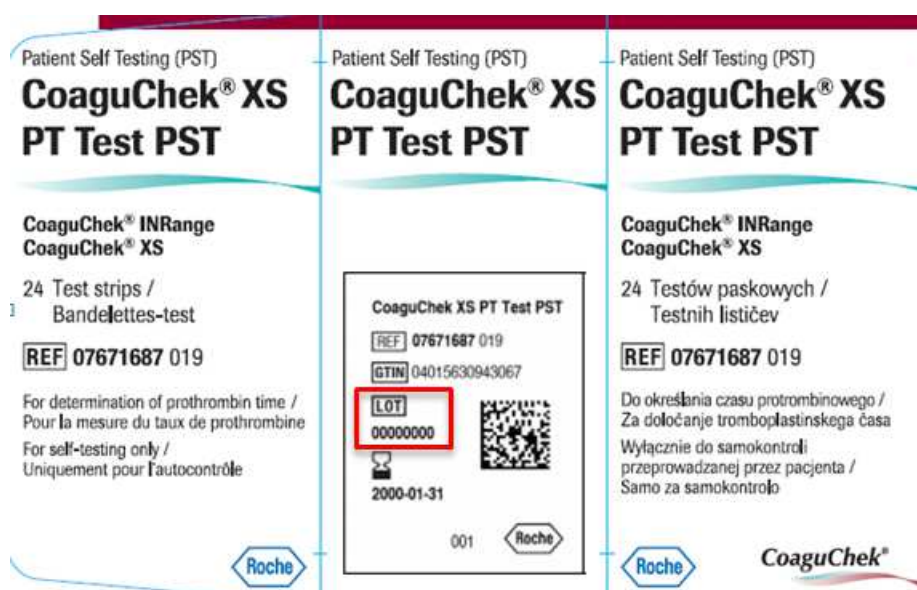

Fremtidige teststrimler, som leveres fra vores lager, vil være med de nye lotnumre, der er specificeret til brug ved måling af INR-værdier mellem 0,8 og 8,0.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, bedes du kontakte Roche kundesupportcenter på telefon 7020 0505 eller på e-mail [kundesupport.dk@roche.com](mailto:kundesupport.dk@roche.com).

Med venlig hilsen

Roche Diagnostics A/S

Mona Jensen  
Technical Product Specialist

Julius Hansen  
Product Manager